

PRIME-DENT®
BOND One
светоотверждаемый универсальный
однокомпонентный адгезив

ПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Материал предназначен только для использования в стоматологии.

Светоотверждаемый однокомпонентный универсальный адгезив является гидрофильным связывающим агентом, который нужно использовать на влажном дэнтине и предназначен для связывания светоотверждаемых композитных материалов с дэнтином и эмалью зуба, а также для бондинга металлов, амальгамы и керамики к зубным тканям при прямых и непрямых реставрациях.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

1. Подготовить рабочую полость по стандартным правилам.
2. Протравить эмаль и дентин при помощи травильного геля на основе фосфорной кислоты. Тщательно смыть травильный гель водой, просушить воздухом, оставив дентин и эмаль немного влажной.
3. Встряхнуть закрытую емкость с материалом для равномерно смешивания. Внести 1-2 капли адгезива на блокнот для смешивания. Используя аппликатор или кисточку, нанести 1 или 2 слоя на подготовленную поверхность. Просушить воздухом в течение нескольких секунд, чтобы удалить остатки растворителя.

Воздушный поток не должен содержать примесей масел и влаги!

Если поверхность не имеет глянцевого блеска, нанести еще 1 слой бонда и просушить. Светоотверждать 10 секунд стандартным стоматологическим фотополимеризатором.

4. Нанести светоотверждаемый композит согласно инструкции композита.
5. Бондинг металлов, амальгам и керамики производить в соответствии с инструкциями производителей данных материалов, а также согласно правилам стоматологического лечения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Не использовать адгезив при наличии у пациента аллергии на метакрилатные смолы.

При работе с материалом необходимо использовать защитные перчатки, маску и очки.

При попадании материала на кожу, промыть участок водой с мылом.

При попадании материала в глаза, промыть большим количеством воды и незамедлительно обратиться к врачу.

При попадании во внутрь выпить большое количество воды и вызвать скорую помощь.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Всегда немедленно и плотно закрывать бутылочку после использования материала.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности указан на каждой упаковке при условии соблюдения температурного режима хранения и правильного использования.

Хранить материал в темном, не доступном для света месте при температуре 2-22°C, лучше в прохладном месте, для продления срока годности, но при температуре не менее 2°C.

Prime Dental Mfg.,
Inc. 555 West Addison Street
Chicago, Illinois 60641
Made in USA