

Инструкция

CERAMCORE B (SILVER) Стеклоиономерный упрочненный цемент

Описание:

- Выраженный антисептический эффект для серебросодержащего стеклоиономера
- Быстрая установка с изначально высокой прочностью на сжатие
- Очень устойчив к истиранию
- Низкий коэффициент термического расширения
- Высвобождает ионы фтора
- Подготовка к работе – просто добавить воды
- Быстро достигает нейтрального уровня pH
- Прочность на сжатие – 180 Мпа
- Соответствует стандартам ISO 9917:1991

Содержимое упаковки:

30 гр. порошка + мерная ложка для порошка + аксессуары

Назначение:

Сильный радиополимерный материал для формирования культи, реконструкции сильно разрушенных зубов и пломбирования подготовленных поднутрений.

Пропорция смешивания:

1:1 (1 мерная ложка порошка на 1 каплю воды)

Рекомендуемый минимум для хорошего смешивания: 2 ложки порошка + 2 капли воды

Время смешивания и установки:

(при температуре + 23°C)

время смешивания - 30 секунд

время работы - 2 минуты

время установки - 2 минуты

общее время - 4 минуты 30 секунд

Руководство по работе:

- перед каждым использованием, встряхните бутылочку с порошком
- наполните мерную емкость наполовину, используйте только дистиллированную или деминерализованную воду
- возьмите необходимое количество порошка и поместите его на лист для смешивания
- разделите порошок на 3 равные части
- поместите необходимое количество капель воды на лист для смешивания
- используя металлический или пластиковый шпатель, замешайте 1/3 порции порошка с водой. Затем добавьте остальной порошок. Вымешивайте до тех пор, пока смесь не достигнет однородной консистенции
- время вымешивания – 30 секунд
- для большей надежности адгезии к тканям зуба, перед внесением стеклоиономера в зубную полость рекомендуется использовать Conditioner Bond PSP или другой дентин кондиционер.
- сразу же после того, как установка завершена, обработайте все поверхности реставрации лаком от фирмы PSP, подождите 4 – 6 минут
- когда цемент затвердеет, его нужно отполировать скоростным бором без использования воды
- еще раз покройте готовую реставрацию лаком, если она сразу не закрывается коронкой или другим материалом

Хранение:

Порошок хранить в сухом прохладном месте, вдали от влаги. Плотно закрывайте крышку бутылочки сразу после использования.

Внимание:

- Промойте шпатель водой и вытрите его до чистоты сразу же после окончания работы во избежание налипания на него материала.
- Избегайте попадания на кожу и в глаза. Если же это произошло, промойте кожу и глаза обильным количеством воды и обратитесь к врачу
- В бутылочке с порошком содержится капсула с влагопоглотителем. Не вынимайте и не ломайте ее.

Изготовлено в Англии

компанией PSP Dental Co. Ltd.

3/5 Dylan Rd Belvedere, Kent, UK