

Інструкція для використання

Зонд верхньощелепної пазухи

Зонд верхньощелепної пазухи використовується в отоларингології для промивання гайморової пазухи.

- виготовлена з нержавіючої сталі медичного призначення;
- довжина 120 мм;
- розмір голки G14
- вигнутий робочий кінець;
- на проксимальному кінці канюля Луера
- стерилізована оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ;

- для професійного використання;
- для одноразового застосування;
- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: зберігати за температури від 5 до 35°C і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;
- одягнути стерильні рукавички;
- розпакувати;
- здійснити місцеву анестезію слизової оболонки носа та обробляють судинозвужувальними засобами;
- увести зонд під передній кінець середньої носової раковини;
- м'яко намагаються в передній третині зводу середнього носового ходу отвір і легким зусиллям просовують зонд догори і злегка назовні;
- промити пазуху розчином антисептика за допомогою шприця чи іншого пристрою, підключеного до канюлі Луера;

- після використання утилізувати у встановленому порядку.



ВИРОБНИК: НВО «Каммед» вул. Крип'якевича 3, м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл., Україна, 32300. тел +38067679-44-09, +38066831-32-31

REF Номер за каталогом



Дата виготовлення



У разі пошкодження упаковки не використовувати



Повторно не використовувати



Виробник



Партія



Стерилізовано оксидом етилену



Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією



Сертифікат відповідності технічному регламенту щодо медичних виробів №UA.TR.101-50.156

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.