

Перед применением обязательно прочитайте инструкцию

RU

# Rebaron

## МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРЯМОЙ ПЕРЕБАЗИРОВКИ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ

Для использования только профессиональными стоматологами и только в соответствии с рекомендуемыми показаниями

### ПОКАЗАНИЯ

Прямая перебазировка съемных протезов, замена базиса.

### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не применяйте для пациентов, у которых наблюдалась аллергия на акриловые пластмассы. В случае возникновения аллергии обратитесь к врачу соответствующего профиля.

### УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

#### 1. ПОДГОТОВКА

- а) Проверьте прилегание протеза с помощью Fit Checker II или с помощью жидко замешанной альгинатной оттисковой массы.
- б) Круглым бором отметьте границы между тонкими и толстыми слоями.
- в) Тщательно очистите контактную поверхность с применением воды и пемзы и загрубите базис протеза в местах, подлежащих перебазировке. (В областях с обширными поднутрениями можно сделать отверстия для снятия напряжений при давлении).
- г) Защитите живые зубы и десневые края с помощью Cосоa Butter, для предотвращения раздражения нанесите аппликационный анестетик или глицерин на слизистую, контактирующую с перебазировочным материалом.

#### 2. ЗАМЕШИВАНИЕ

- а) Стандартное соотношение порошок/жидкость составляет 1.5 г/1.0 мл (половина мерника порошка на 1/3 шприца жидкости).  
Замечание:  
Избыток жидкости может вызвать сильное раздражение.
- б) Поместите жидкость и порошок в чашку и замешивайте в течение 20–30 секунд.

#### 3. ПЕРЕБАЗИРОВКА

- а) Через 30 секунд после замешивания нанесите смесь на протез и подождите, пока смесь не потеряет блеск (приблизительно 1 мин 30 сек).
- б) Когда поверхность поблекнет, установите протез во рту и произведите функциональные движения в положении центральной окклюзии.
- в) Подождите минимум 2 минуты, затем осторожно извлеките протез. Подправьте края по периметру.
- г) Повторно установите протез во рту и зафиксируйте его в положении центральной окклюзии на 2 минуты.  
Замечание:  
Если разогревание материала причиняет пациенту неудобства, дайте затвердеть материалу вне полости рта.

д) REBARON полностью отверждается в течение приблизительно 9 минут от начала замешивания. Произведите окончательную коррекцию и полировку, используя стандартную технику.

### ХРАНЕНИЕ

Храните в прохладном темном месте  
(Срок годности: 3 года с даты выпуска).

### ОТТЕНКИ

- No. 3 – Розовый
- No. 4 – Темно-розовый
- No. 8 – Светло-розовый
- Pink X – Розовый с прожилками

### УПАКОВКА

1. Бутылочка 100 г порошка
2. Бутылочка 100 г (104 мл) жидкости
3. Упаковка 1-1: 100 г. порошка, 100 г. (104 мл.) жидкости, аксессуары.

### ВНИМАНИЕ

1. Жидкость является летучим и легко воспламеняющимся веществом. Закрывайте бутылочку сразу же после использования и держите ее вдали от источников пламени.
2. В случае попадания в глаза немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу соответствующего профиля.

MANUFACTURED by  
GC DENTAL PRODUCTS CORP.  
2-285, Toriimatsu-cho, Kasugai, Aichi 486-0844 Japan

DISTRIBUTED by  
GC CORPORATION  
76-1Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan

GC EUROPE N.V.  
Research-Park, Interleuvenlaan 13, B-3001 Leuven,  
Belgium

GC AMERICA INC.  
3737 West 127th Street, Alsip, IL 60803 U.S.A.

GC ASIA DENTAL PTE. LTD.  
19 Loyang Way, #06-27 Singapore 508724

CE 0086