

ТОВ «Делмед»
61013, м. Харків, вул. Шевченка 24
тел. 764-51-53, 704-13-87
buh@delmed.net
ЄДРПУ 23144629
Р/р 26002052319108
Харківська філія Приватбанк
МФО 351533
Свідоцтво про держреєстрацію № 14801050002014103

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ



www.delmed.com.ua

Инструкция по применению

Стремена Павлика модифицированные “Арина” (артикул СПМ)

май 2018 г.

В основном впервые одевает и регулирует стремена не ребенок детский ортопед либо мануальный терапевт, необходимо следовать всем его инструкциям относительно ношения и одевания элемента. При самостоятельной смене стремян, нужно застегивать ремешки примерно также как при одевании специалистом, а так же фиксировать ножки в таком же положении.



Перед началом следует одеть на малыша мягкую футболку из натуральной ткани и носочки, чтобы ремешки не натирали кожу и не способствовали раздражению и высыпанию. Стремена уже собраны на производстве. Вам нужно раскрыть грудной фиксатор, и липучки обхватывающие икроножные мышцы. Следует положить грудничка на спинку и аккуратно одеть верхнюю часть стремян на ребенка, продев ручки в плечевые лямки и зафиксировав крепеж на уровне груди так, чтобы грудной пояс сидел плотно, но при этом не слишком

сдавливал, и малыш мог дышать полной грудью.

Одевая, необходимо осмотреть спинку, чтобы исключить перекручивание ремешков.

Нижняя часть стремян одевается на носочки, чтобы ремешки не давили и не натирали нежную кожу ножек. Малыш может сопротивляться и капризничать в процессе одевания, но это вполне нормально, сначала ребенку тяжело привыкнуть к фиксации подобного рода. Необходимо провести простую манипуляцию по закреплению ремешков в нужном положении на предусмотренном специалистом расстоянии. Поверх стремян Павлика можно одеть носочки, чтобы ремешки не соскользнули, когда малыш активно двигается или пытается ползать.