

RelyX™ Luting 2

Полимер-модифицированный стеклоиономерный цемент



Простое стало
еще проще



3M ESPE

RelyX™ Luting 2 – комфорт + эффективность



Теперь еще проще в работе благодаря **НОВОМУ СВОЙСТВУ** – предварительному световому отверждению для быстрого и удобного устранения излишков материала.

Стеклоиономерный цемент RelyX™ Luting 2 от компании 3M ESPE прекрасно подходит для фиксации металлических, металлокерамических конструкций (PFM) и конструкций на абатментах имплантатов. RelyX™ Luting 2 – это идеальное сочетание удобства использования и клинически доказанной эффективности.

Его усовершенствованная формула содержит в себе инициаторы, позволяющие легко удалить излишки материала после короткого пятисекундного светового отверждения.



Преимущества работы с удобной системой Clicker™.

Цемент RelyX™ Luting 2 в удобном диспенсере Clicker™ был разработан для обеспечения более быстрого и простого применения. Две пасты разного цвета позволяют контролировать гомогенность смешивания.



Удобная подача материала из диспенсера Clicker™ в пропорции 1:1 для простого смешивания.



Назначения:

Обновленный цемент RelyX™ Luting 2 рекомендуется для фиксации:

- Металлокерамических (PFM) коронок и мостов
- Металлических коронок, мостов, вкладок и накладок
- Эндодонтических штифтов
- Ортодонтических конструкций
- Керамических конструкций на основе оксида алюминия или оксида циркония
- Реставраций на абатментах имплантатов – **НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ!**



Обновленный цемент RelyX™ Luting 2 рекомендуется для фиксации реставраций на абатментах имплантатов.

Первый полимер-модифицированный стеклоиономерный цемент СВЕТОВОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ

Быстрое и легкое устранение излишков материала.


Для удобства устранения излишков засветите материал на протяжении 5 секунд с помощью светодиодной лампы Elipar™ S10 от 3M ESPE или любой другой полимеризационной лампы. В качестве альтернативы, Вы можете дождаться самоотверждения излишков материала. На это потребуется около двух минут после внесения материала в полость рта. Как только излишки достигнут гелеобразной консистенции, они легко могут быть удалены с границ реставрации.




Предварительное световое отверждение для удобного и быстрого устранения излишков материала.



Легкое устранение излишков материала.

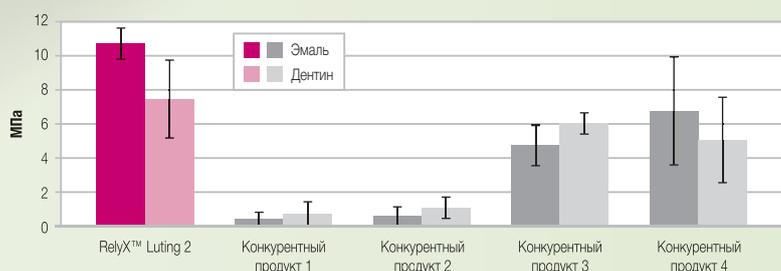

RelyX™ Luting 2 демонстрирует высокую прочность на отрыв к дентину и эмали.

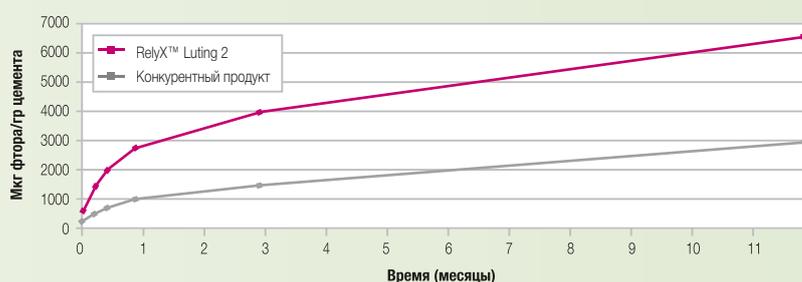

Цемент RelyX™ Luting 2 обеспечивает длительное выделение фтора.

Клинически доказанная более высокая прочность на отрыв.

Цемент RelyX™ Luting 2 обеспечивает молекулярную адгезию к поверхности зуба. По сравнению с другими цементами, он обеспечивает исключительную прочность на отрыв – без применения кондиционера для тканей зуба. Послеоперационная чувствительность практически отсутствует.

Источник: внутренние данные 3M ESPE, 2012 г.

Выделение фтора.

RelyX™ Luting 2 обладает кариесстатическим эффектом, обеспечивая длительное выделение фтора.

Источник: Ton T, Wang Y, Falsafi A, Oxman J. Fluoride Release of a Novel Automix Resin-Modified Glass-Ionomer Luting Cement. J Dent Res 91 (Spec Iss A) 1319, 2012. (www.dentalresearch.org).

Рекомендации
Цемент и Назначения

RelyX™ Luting 2

Полимер-модифицированный
стеклоиономерный цемент

RelyX™ Ultimate

Адгезивный цемент

RelyX™ U200

Самоадгезивный цемент

Металл/Металлокерамика	RelyX™ Luting 2	RelyX™ Ultimate	RelyX™ U200
Вкладки/накладки	+	+	++
Коронки/мосты	++	+	++
Эндодонтические штифты	++	+	++
Мосты Мериленд	-	++	+
Абатменты имплантатов	++	+	++
Стеклокерамика (включая литий дисиликат)			
Вкладки/накладки	-	++	+
Частичные коронки/накладки на жевательную поверхность	-	++	+
Коронки/мосты	-	++	++
Виниры	-	+	-
Оксидная керамика (например, Lava™ Zirconia)			
Коронки/мосты	+	+	++
Эндодонтические штифты	+	+	++
Мосты Мериленд	-	++	+
Абатменты имплантатов	++	+	++
Композитная нанокерамика (например, Lava™ Ultimate для CAD/CAM)			
Вкладки/накладки	-	++	-
Коронки	-	++	-
Виниры	-	+	-
Композиты			
Вкладки/накладки	-	++	+
Коронки	-	++	++
Эндодонтические штифты (например RelyX™ Fiber Post)	-	+	++
Виниры	-	+	-



Особенно рекомендуется*



Рекомендуется



Не предназначен

* Более высокая эффективность для данного назначения или более простое использование при равной эффективности.

Информация для заказа



Набор RelyX™ Luting 2 (3525A)

Артикул Комплектация

Набор RelyX™ Luting 2

3525A 2 “кликера” RelyX™ Luting 2 (по 11 гр.)
1 блокнот для замешивания, инструкция по использованию, техническая карта

3M ESPE

ООО «3М Украина». 3M ESPE
Стоматологическая продукция
03680 г.Киев, Бизнес-центр «Горизонт Парк»
ул.Амосова, 12, корпус №1, 7-й этаж
Тел.: (044) 490-5777,
Факс: (044) 490-5775

www.3MESPE.com.ua

3M, ESPE, Clicker, Elipar, RelyX
и Lava являются торговыми
марками компании 3M или 3M
Deutschland GmbH.

© 3M 2013. Все права защищены.