

3M Наука.
Втілена в життя.

Рішення для незнімного протезування

Процедурне рішення для незнімного протезування

По всьому світу компанія 3M відома впровадженням нових ідей в області стоматології, які формують (а іноді і реформують) ринок. Ми з ентузіазмом підходимо до допомоги у вирішенні Ваших проблем та пропонуємо продукти, які полегшують роботу і надають більшої впевненості при виконанні щоденних процедур. Пропонуємо Вашій увазі рішення, яке дозволить швидко і якісно здійснити повну процедуру незнімного протезування для всіх призначень:

Етапи	Металоконструкції	Оксидна кераміка	Склокераміка
Ретракція	Astringent Retraction Paste		
Відбиток	Express™ XT		
Тимчасова конструкція	Protemp™ 4 + Relyx™ Temp NE		
Фіксація незнімної конструкції	Relyx™ Luting 2	Relyx™ U200	Relyx™ Ultimate

Особливості роботи з продуктами:

Astringent Retraction Paste

Для отримання найкращого результату, пасту необхідно внести безпосередньо в зубоясневу борозну. Внесення не повинно зашкодити зубоепітеліальному з'єднанню.

Express™ XT

А-силікони чутливі до забруднення. При замішуванні ручним способом необхідно використовувати безлатексні рукавички, так як сірка інгібує полімеризацію А-силікону.

Protemp™ 4

Перед внесенням Protemp™ 4 відпрепаровані зуби можна покрити гліцерином, для полегшення вилучення конструкції. Після вилучення тимчасової конструкції з шаблону, її необхідно протерти спиртом для усунення шару, інгібованого киснем.

Важливо для всіх трьох цементів:

Слідкуйте за чистотою клікера. Після видавлювання цементу на палетку чистіть отвори клікера від залишків серветкою і правильно закривайте ковпачок — це запобіжить випадковому змішуванню паст, скороченню терміну придатності і появі крупинок, які можуть перешкоджати правильній посадці конструкції.

Relyx™ Luting 2

Повна полімеризація досягається в анаеробних умовах, надлишки матеріалу краще видалити через 5 хв. після початку замішування.

Relyx™ Ultimate

Найкращий результат досягається з використанням універсального адгезиву Single Bond Universal.

Relyx™ U200

При підвищенні температури відбувається скорочення робочого часу з цементом. Не рекомендується використання каналонаповнювачів для внесення цементу, так як вони призводять до його нагрівання.

Astringent Retraction Paste

Проста та зручна в'язуча паста для ретракції ясен.



Призначення:

Забезпечує сухість зубоясенної борозни при здорових тканинах пародонта при знятті відбитків, під час підготовки тимчасових моделей та під час підготовки до реставрацій II і V класів.

Переваги:

- ▶ Легкість внесення матеріалу та кращий доступ до інтерпроксимальних ділянок завдяки тонкому носику капсули.
- ▶ Ефективне розкриття борозни.
- ▶ М'яка по відношенню до ясен.
- ▶ Надійний гемостаз — зниження ризику кровотечі після видалення матеріалу.
- ▶ На 50% швидше, ніж традиційний метод (ретракційні нитки).
- ▶ Зручні унідози.

Protemp™ 4 та RelyX™ Temp NE

Рішення для тимчасових конструкцій: бісакриловий композитний матеріал для виготовлення тимчасових конструкцій та тимчасовий цемент на основі оксиду цинку без евгенола.



Призначення:

Виготовлення та фіксація тимчасових конструкцій: коронок і мостовидних протезів, вкладок і накладок, вінірів, довгострокових тимчасових конструкцій.

Переваги:

- ▶ Висока міцність і стійкість до стирання — підходить для довгострокових тимчасових конструкцій.
- ▶ Прекрасна естетика та комфортна посадка конструкції.
- ▶ Більш швидка процедура і блискучий результат без полірування і глазурування.
- ▶ Високий ступінь адгезії в поєднанні з легкістю видалення тимчасової конструкції.

RelyX™ Ultimate

Інноваційний адгезивний цемент подвійного твердіння.



Переваги:

- ▶ Цемент подвійного твердіння з максимальною силою адгезії.
- ▶ Виключна естетика: точне та герметичне крайове прилягання, висока зносостійкість, природний блиск та флуоресценція.
- ▶ Простота використання: всього два компоненти (RelyX™ Ultimate та Single Bond Universal), менше етапів роботи.
- ▶ Економія та зручне дозування завдяки диспенсеру Clicker™.

RelyX™ U200

Самоадгезивний композитний цемент.



Переваги:

- ▶ Відмінна адгезія до дентину, емалі та непрямих реставрацій.
- ▶ Мінімальний ризик виникнення постопераційної чутливості.
- ▶ Відсутність етапів протравлювання, праймування та бондингу.
- ▶ Економія часу завдяки одночасному дозуванню з двох туб клікера.
- ▶ Економічне використання матеріала.
- ▶ Толерантність до вологи.
- ▶ Просте видалення надлишків.
- ▶ Зручна та проста форма подачі матеріалу у диспенсері Clicker™.

RelyX™ Luting 2

Полімер-модифікований склоіономерний цемент із властивістю попереднього світлового твердіння.



Переваги:

- ▶ Вдосконалена формула і перевірена ефективність RelyX™ Luting.
- ▶ Диспенсер Clicker™ для більш швидкого і простого застосування.
- ▶ Попереднє світлове твердіння для швидкого і зручного усунення надлишків матеріалу.
- ▶ Особливо добре підходить для фіксації металокерамічних (PFM) конструкцій.
- ▶ Карієсстатичний ефект завдяки тривалому виділенню фтору.
- ▶ Високий рівень біосумісності з тканинами зуба.
- ▶ Не засмічує робоче місце.

Рекомендації	RelyX™ Ultimate	RelyX™ U200	RelyX™ Luting 2
Металоконструкції			
Вкладки/Накладки	+	++	++
Коронки/мости	+	++	++
Ендодонтичні штифти	++	++	++
Оксидна кераміка			
Вкладки/Накладки	++	++	-
Часткові коронки/накладки на жувальну поверхню	++	++	-
Коронки/мости	++	++	+
Вініри	+	-	-
Склокераміка			
Коронки/мости	++	++	-
Ендодонтичні штифти	++	++	-
Мости Меріленд	++	+	-

++ Особливо рекомендується

+ Рекомендується

- Не призначений

Інформація для замовлення

Артикул	Комплектація
56944	Astringent Retraction Paste. Упаковка: 25 унідоз по 0,3 г.
56945	Astringent Retraction Paste. Упаковка: 100 унідоз по 0,3 г.
36895	Express™ XT Penta™ Putty. Рефіл: 1 базова паста (300 мл), 1 каталізатор (60 мл)
36894	Express™ XT Penta™ H. Рефіл: 1 базова паста (300 мл), 1 каталізатор (60 мл)
36896	Express™ XT Penta™ H Quick. Рефіл: 1 базова паста (300 мл), 1 каталізатор (60 мл)
36974	Express™ XT Light Body. Рефіл: 2 картриджа (по 50 мл), 10 накінечників для замішування
36976	Express™ XT Light Body Quick. Рефіл: 2 картриджа (по 50 мл), 10 накінечників для замішування
36975	Express™ XT Regular Body. Рефіл: 2 картриджа (по 50 мл), 10 накінечників для замішування
36977	Express™ XT Regular Body Quick. Рефіл: 2 картриджа (по 50 мл), 10 накінечників для замішування
36973	Express XT Putty Quick. Рефіл для ручного замішування: 1 базова паста (250 мл), 1 паста каталізатор (250 мл), 2 ложки
36972	Express XT Putty Soft. Рефіл для ручного замішування: 1 базова паста (250 мл), 1 паста каталізатор (250 мл), 2 ложки
* У продажу також доступні ознайомчі набори для Pentamix™ 3 – уточніть у офіційних дистриб'юторів.	
46953	Protemp™ 4. Ознайомчий набір (A2): 1 Картридж (67 г), A2: 16 насадок для замішування Garant™ (блакитні); 1 диспенсер Garant™ 10:1
46959	Protemp™ 4. Рефіл відтінку Bleach (Білий): 1 картридж, 67 гр.
46954	Protemp™ 4. Рефіл відтінку A1:1 картридж, 67 гр.
46956	Protemp™ 4. Рефіл відтінку A2: 1 картридж, 67 гр.
46957	Protemp™ 4. Рефіл відтінку A3: 1 картридж, 67 гр.
46960	Protemp™ 4. Рефіл відтінку B3:1 картридж, 67 гр.
56660	RelyX™ Temp NE. Базова паста (30 г), 1 активатор, 1 каталізатор (13 гр), 1 блокнот для замішування
56924	RelyX™ Ultimate Clicker™. Стартовий набір: 1 флакон адгезива Single Bond Universal (1,5 мл), 1 травильний гель (3мл.), 1 RelyX™ Ultimate Clicker™ відтінку A1 (4,5 гр.)
56920	RelyX™ Ultimate Clicker™. Рефіл відтінку Прозорий (4,5 гр.)
56923	RelyX™ Ultimate Clicker™. Рефіл відтінку Bleach (Білий) (4,5 гр.)
56921	RelyX™ Ultimate Clicker™. Рефіл відтінку A1 (4,5 гр.)
56922	RelyX™ Ultimate Clicker™. Рефіл відтінку A3 опаковий (4,5 гр.)
56877	RelyX™ U 200 Clicker™. Рефіл відтінку прозорий (11 гр.)
56878	RelyX™ U 200 Clicker™. Рефіл відтінку A2 універсальний (11 гр.)
56879	RelyX™ U 200 Clicker™. Рефіл відтінку A3 опаковий (11 гр.)
56897	RelyX™ U200 Automix™. Рефіл відтінку прозорий (8,5 гр.)
56895	RelyX™ U200 Automix™. Рефіл відтінку A2 універсальний (8,5 гр.)
56896	RelyX™ U200 Automix™. Рефіл відтінку A3 опаковий (8,5 гр.)
56930	RelyX™ Luting 2. Набір: 2 клікера по 11 гр.