

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ ОТТЯГИВАТЕЛЯ

Перед применением оттягивателя необходимо очистить и выстерилизовать все части оттягивателя (с исключением корпуса насоса).

Способ стерилизации представлен в разделе: «КАК ЧИСТИТЬ И СТЕРИЛИЗОВАТЬ ОТТЯГИВАТЕЛЬ».

После очистки и стерилизации, лактатор готов к применению.

1. Умыть руки перед началом оттягивания
2. Умыть сосок и грудь вокруг него
3. Удобно сесть на стуле с прямой спинкой. Во время вытягивания молока не вставать, не наклоняться и не выполнять других действий
4. Прокрутить регулятор силы отсасывания (2) на минимум (противоположно движению стрелки часов).
5. Приложить всасывающую лейку таким образом чтобы сосок находился внутри неё по середине лейки. Помассировать грудь вокруг лейки чтобы плотно к ней прилежала. Лейка должна тесно прилегать к груди.
6. Включить оттягиватель включателем (9) на корпусе насоса
7. Регулировать переключатель силы всасывания пока сосок не будет находится внутри воронки (4).
 - a. **L** малая сила отсоса
 - b. **H** большая сила отсоса
8. Продолжать вытягивание с одной груди пока не начнёт уменьшаться количество попадаемого молока в вытягиватель
9. Приложить вытягиватель к другой груди и повторить вышеописанные действия
10. По окончании вытягивания выключить устройство и высунуть вилку из розетки

КАК ХРАНИТЬ МОЛОКО

Место хранения	Время хранения доношенные дети	Время хранения преждевременно рождённые
Комнатная температура	8 -12 часов	2-4 часа
Холодильник ($\leq 4^{\circ}\text{C}$)	4 дня	2 дня
Морозильник внутри холодильника (совместные двери)	2 недели	Не применяется
Морозилка холодильник (отдельные двери)	3 месяца	Не применяется
Морозильник ($\leq -20^{\circ}\text{C}$)	6-12 месяцев	В зависимости от потребности

Не замораживать пищи повторно!

Перед подачей пищи подогреть до температуры около 36 C

Не подогрывать и не размораживать пищи в микроволновой печи (изменяется структуры белков, пища теряет свои питательные ценности).

ПОСЛЕ ОТТЯГИВАНИЯ МОЛОКА

Все элементы которые были перечислены в пункте «КАК ЧИСТИТЬ И СТЕРИЛИЗОВАТЬ ОТТЯГИВАТЕЛЬ» должны быть разобраны и промыты. Дренаж (7) необходимо мыть раз в неделю. Не варить. Однако если пища попадет в дренаж, необходимо прервать оттягивание и сразу вымыть дренаж, чтобы избежать высыхания пищи, высушить перед следующим применением.

ГОЛОВА КЛАПАНА И МЕМБРАНА

Во время чистки элементов оттягивателя необходимо обратить особое внимание на тщательное и деликатное мытье головки клапана (6) и мембраны (5). Перед мойкой необходимо отделить мембрану от головки и удалить остатки пищи (применять моющие средства и несколько раз полоскать). Наслоивание остатков пищи может быть поводом нарушений и неправильной работой оттягивателя.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Фирма SEMI BAMBÍ как производитель даёт гарантию на исправную работу продукта на 12 месяцев от даты покупки, подтвержденной на гарантийном талоне.
2. Неисправный продукт необходимо доставить в оригинальной упаковке к продавцу (там где был куплен продукт).
3. Неисправности и поломки устройства которые оказались в периоде гарантии будут бесплатно отремонтированы в течении 14 дней от даты доставки устройства к производителю. В случае необходимости доставки специальных запасных частей срок ремонта может продлиться.
4. Способ ремонта продукта определяет гарант.
5. Гарантией не покрываются поломка которая появилась из-за ненадлежащего или несогласного инструкцией применения, хранения, консервации, самостоятельного ремонта.
6. Гарантией не покрываются зап/части и компоненты которые изнашиваются во время эксплуатации.
7. Гарантийный талон (с обозначенной формой продажи), вместе с подтверждением покупки (чек, счёт фактура) и формой рекламации являются единственным основанием для реализации гарантийных прав.
8. Гарантийный талон без предусмотренных в нем: печати и подписи продавца, даты продажи и подписи покупателя, а также записей с предидущих гарантийных ремонтов является недействительным.
9. Необоснованные жалобы будут возвращены на счет рекламодателя, после возврата стоимости доставки.
10. Подпись покупателя равносильна принятию условий этой гарантии.

ГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСЛЕГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ВЫПОЛНЯЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	ДАТА ЗАВЕДОМЛЕНИЕ О РЕМОНТЕ	ДАТА РЕМОНТА	РОД РЕМОНТА	ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ

Дата покупки и подпись продавца

Подпись покупателя

ОБОЗНАЧИТЬ ФОРМУ ПРОДАЖИ:

- ОБОЗНАЧИТЬ ФОРМУ ПРОДАЖИ:
 Продажа на месте

Эксклюзивный дистрибьютор:
SEMI BAMBÍ PHU
93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
POLAND
Tel/fax: 042 645 34 29
e-mail: tufi@tufi.pl

Производитель:
Uzinmedicare Co. 503-2, Chang-ri
Namsamyong, Longin, Kyeonggi-do
449-885 Korea
Авторизованный представитель:
Obelis s.a., Av. De Tervuren, bte 44
B-1040 Brussels, Belgium

www.tufi.pl

tufi

Электрический лактатор Tufi SPECTRA 3 Натуральный ритм отсасывания...

Инструкция обслуживания




CE
0434

Перед применением необходимо прочитать содержание инструкции. Чтобы продукт действовал эффективно во время применения, необходимо применять его согласно с инструкцией. С целью получения дополнительных информационных необходимо посоветоваться у врача. Инструкции нужно сохранить с целью правильного использования изделия.

Представленный символ размещённый на продуктах или сопровождающейся с ними документацией информирует о том что неисправных электрических устройств нельзя выкидывать вместе с домашними отходами. Продукт можно отдать локальному дистрибьютору во время покупки нового устройства. Правильная утилизация устройства позволяет сохранить ценные ресурсы и избежать негативного влияния на здоровье и окружающую среду которая может быть под угрозой из-за несоответствующего обращения с отходами. Информации о ближайшем пункте сбора можно получить у локальных властей. В случае необходимости избавиться от электро устройств просим связаться с ближайшим пунктом продажи или поставщиком.



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

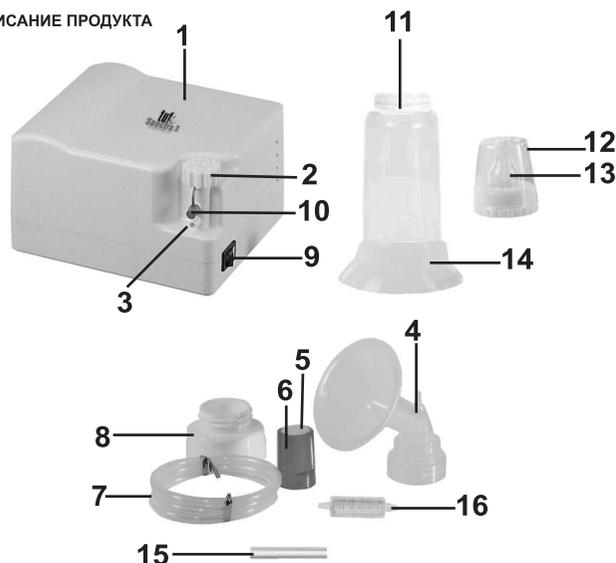

ВСТУПЛЕНИЕ

Женское молоко является уникальным веществом идеальной для своего вида пищи. Кормление грудью, согласно с современными знаниями является идеальным и оптимальным питанием для грудных и маленьких детей, которое обеспечивает им оптимальное состояние здоровья и развития. Несёт пользу для здоровья для матери и для ребёнка, а также для семьи и всего общества.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Электрический лактатор Tufi SPECTRA 3, является очень эффективным устройством для отсасывания молока, предназначенным для домашнего использования. Отображает натуральный ритм сосания ребёнка и имеет регулировку силы отсоса. Может применяться для отсасывания с обеих грудей одновременно. В состав входят все необходимые аксессуары для отсасывания и подачи ребёнку пищи.

В состав входят:

Корпус молокососа вместе с индивидуальным составом (лейка, клапан с мембраной, запасной мембраной, дренаж и адаптор для бутылок с широким горлышком), бутылку с соской, стабилизационная подставка.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Выключить из электросети после применения
- Не применять во влажной среде
- Не оставлять вблизи источников тепла таких как батареи и др.
- Не рвануть
- Устройство не содержит никаких элементов которые нуждаются в сервисе пользователем, не раскручивать. Ремонт пользователем означает утрату гарантии.
- Поврежденный провод или вилку необходимо немедленно заменить в сервисном пункте.

КАК СЛОЖИТЬ ЛАКТАТОР

Чтобы правильно подготовить оттягиватель TUFi Spectra 3 к работе необходимо:

1. Поместить мембрану (5) внутри головы (6) воронки (4)
2. Старательно прижать голову с мембраной в нижнюю часть воронки (4)
3. Соединить дренажом (7) воронку наконечником (3) корпуса насоса.
4. В случае применения фильтра (17), необходимо соединить дренаж фильтра (16) с одной стороны к воронке (4), с другой стороны к любому концу фильтра (17). Другой конец фильтра необходимо соединить с дренажом (7), с наконечником (3) корпуса насоса.
5. Вкрутить бутылочку в воронку (4). Если это бутылочка с широким горлом необходимо применить адаптер (8).
6. В конечной фазе подготовки необходимо проверить и убедиться что дренаж (7) плотно соединён с сосущей воронкой (4) и наконечником (3). Неплотное соединение не позволит оттягивать пищу.
7. Вставить провод в розетку. Бутылочку постоянно ставить на стабилизирующей подставке

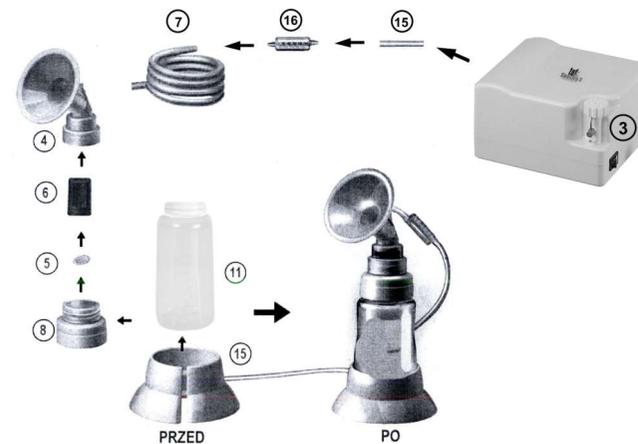

КАК ЧИСТИТЬ И СТЕРИЛИЗОВАТЬ ОТТЯГИВАТЕЛЬ

Перед применением, следующие элементы необходимо чистить и стерилизовать:

- Бутылочка
- Воронка сосущая
- Силиконовая накладка для стимуляции массажа (можно купить отдельно)
- Накрутка на бутылку и соска
- Оболочка соски
- Голова
- Мембрана

Вышеперечисленные элементы лактатора должны быть тщательно умыты, а затем проварены около 3-4 минут. Оптимальный эффект можно получить применяя для стерилизации Электрический Паровой Стерилизатор TUFi.

ФИЛЬТР ЛАКТАТОРА (16) НЕОБХОДИМО МЕНЯТЬ КОГДА ИСЧЕЗНУТ ВИДИМЫЕ НА НЕМ КРАСНЫЕ ПОЛОСЫ!!!

НЕ СТЕРИЛИЗОВАТЬ В МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧАХ

В случае каких либо проблем с оттягиванием молока, необходимо обратиться к врачу.

	Название	Материал		Название	Материал
1	Корпус насоса	ABS	9	Включатель	250V 16A
2	Регулировка силы отсоса	POM	10	Наконечник для подключения 2 состава	X
3	Наконечник для подключения дренажа	X	11	Бутылочка	PP
4	Воронка	PP	12	Пробка бутылочки	PP
5	Мембрана	Silikon	13	Соска	Silikon
6	Голова клапана	PP	14	Стабилизирующая подставка	PP
7	Дренаж	Silikon	15	Дренаж для фильтра	Silikon
8	Адаптер для бутылочек с широким горлом	PP	16	Фильтр	PC