



Гель для механической обработки корневых каналов с антимикробным эффектом

JenD

Произведено: 000 "Джендентал Украина"

■ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА:

- Не требует ручного приготовления (готовая форма);
- Хорошо доставляется в корневой канал как через насадку, так и обычным способом;
- Обладает хелатными свойствами.
- Способствует более тщательной механической обработке; корневой канала как ручными, так и ротационными инструментами. Удаляет смазанный слой;
- Оказывает антимикробное действие на микрофлору корневой канала.

■ ПОКАЗАНИЯ:

Используется при инструментальной обработке корневых каналов совместно с ирригационными растворами (гипохлорид натрия, перекись водорода).

Особенно показан:

- при инфицированных корневых каналах;
- при деструктивных процессах в периапикальных тканях.

■ СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Первое посещение:

Гель вводится в канал с помощью эндодонтической пластиковой насадки. Механическая обработка корневой канала выполняется по следующей схеме:

- Ирригация корневой канала 2,5 - 3% раствором гипохлорида натрия чередуется с введением геля в корневой канал;
- Инструментальное формирование корневой канала происходит при введенном геле, который за счет хелатных свойств убирает смазанный слой и облегчает прохождение корневой канала;
- Повторение описанных процедур следует до требуемой степени обработки корневой канала;
- Завершающая ирригация раствором гипохлорида натрия;
- Очень тщательная ирригация корневой канала дистиллированной водой;
- Временная obturation корневой канала препаратом с гидроокисью кальция на 1 - 2 недели.

Второе посещение:

После механического удаления из корневой канала гидроокиси кальция следуют:

- Ирригация корневой канала 2,5 - 3% раствором гипохлорида натрия, которая чередуется с введением геля в корневой канал;
- Ирригация корневой канала дистиллированной водой;
- Повторная временная obturation корневой канала гидроокисью кальция (при деструктивных процессах) или постоянная obturation корневой канала.

Внимание:

В случаях труднопроходимых инфицированных корневых каналов может потребоваться использование геля Jel-Metrohecor в корневом канале под герметичной повязкой с продолжительностью лечения в 1 - 3 дня.

000 «СТАМИЛ» – ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ «ДЖЕНДЕНТАЛ-УКРАИНА»

Центральный офис:

Лукьяновское отделение:



(044) 573 97 30 / 573 97 60
02132, г. Киев-132, а/я 52



(044) 22 707 55 / 22 818 69
г. Киев, 04116, ул. Бердичевская, 1



info@stamil.ua



www.stamil.ua

