

JEN LC-FLOW



Высокотекучий многоцелевой высококачественный КОМПОЗИТ светового отверждения

Назначение:

- Непосредственное восстановление дефектов эмали (белые и тетрациклиновые пятна, эрозии, обесцвечивание и др.) с минимальной препаровкой зуба или без препаровки.
- Покрытие измененных в цвете поверхностей фронтальных зубов и реставраций из амальгамы (Jen LC-Flow UO Универсальный Опакер).
- Пломбирование полостей V класса.
- Эстетическая коррекция реставраций, выполненных традиционными композитами, маскирующая и демпфирующая подкладка под обычный композит и финишное покрытие композитных пломб с высокой степенью полируемости.
- Ремонт дефектов керамических и акриловых виниров.
- Цементирование слоистых виниров.
- Фиксация шинирующих систем.

Преимущества:

- Текучесть, позволяющая вносить материал непосредственно из шприца в полость.
- Высокий модуль эластичности в сочетании с адгезивными свойствами, обеспечивающие высококачественное краевое прилегание.
- Способность полностью адаптироваться в полости и заполнять все микроуглубления – качество, позволяющее идеально дополнять пломбирование обычными гибридными композитами.
- Высокая степень адгезии по отношению к протравленной эмали, позволяющая работать с небольшими дефектами эмали без использования бондинговых систем.
- Структура композита позволяет доводить полировку до бриллиантового блеска.
- Высокая цветостабильность и износоустойчивость.
- Большой выбор оттенков.

Клиническое использование при небольших полостях II класса:



Исходная ситуация. Средний кариес, II класс по Блеку.



Препарирование полости.



С помощью кариес-маркера Sable Seek проверяем наличие кариозно поврежденных тканей зуба.



Наносим травильный гель Phospho-Jen AS. Смываем. После чего наносим адгезив.



После установки матрицы заполняем полость текучим композитом Jen LC-Flow A3. Фотополимеризуем.



Окончательный вид реставрации после шлифовки и полировки.

ООО «СТАМИЛ» – эксклюзивный представитель компании JenD LLC (JenDental) в Украине.

Главный офис:

02132, г. Киев, ул. Садовая, 191, дом 2
тел./факс: (044) 573-97-30/60, 573-98-78

Лукьяновское отделение:

04116, г. Киев, ул. Бердичевская, 1
тел./факс: (044) 455-99-57, 228-18-69

www.stamil.ua, e-mail: info@stamil.ua

