

Gamma

ТЕХНІКА ДЛЯ ЗДОРОВ'Я

Країна виробник: Швейцарія

Завод виробник: Тайвань

Гарантія 2 роки. Безкоштовне сервісне обслуговування 10 років

Сервісний центр

МОДЕЛЬ MINI

Використовувати тільки
з тест-смужками
GAMMA MS



ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ

1 Вставте тест-смужку в вимкнений прилад.


Дочекайтесь появи на екрані символу "  ".




2 Нанесіть пробу.

Піднесіть крапельку крові до торця тест-смужки в забірний отвір.

Кров всмоктується в забірний отвір, і після того, як контрольне віконце заповнюється повністю, прилад починає вимір.

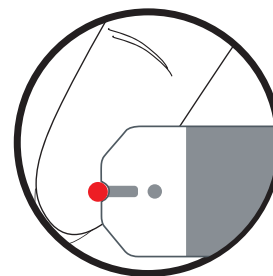

3 Через 5 сек. на екрані з'явиться результат (Наприклад 5,7 ммоль / л), який заноситься в пам'ять автоматично.

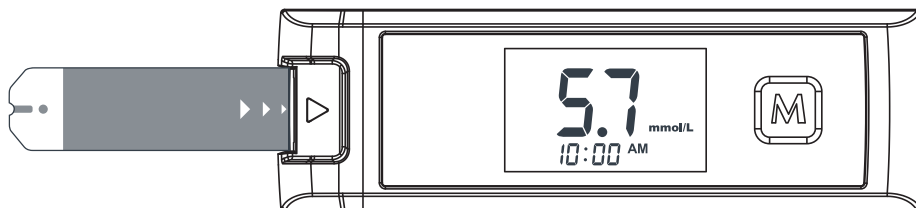

4 Вийміть використану тест-смужку

Після видалення тест-смужки глюкометр відключається автоматично.

! Глюкометр Gamma MINI для проведення аналізу можна не налаштовувати.

ІНФОРМАЦІЙНА ЛІНІЯ:

0 800 600 103

з 9:00 до 18:00 по буднях, ДЗІВІНКИ БЕЗКОШТОВНІ ЗІ СТАЦІОНАРНИХ ТА МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ У МЕЖАХ УКРАЇНИ

