

Перед каждым использованием важно проверять состояние устройства: швы, состояние ремней и ткани. Повреждение может быть отремонтировано Naussica Medical

## WALKING AID SLING


### СТРОПЫ ПОМОЩЬ ПРИ ХОДЬБЕ



Это медицинское устройство должно быть реализовано с помощью квалифицированных медицинских специалистов



- Сертифицированные CE произведено во Франции, стропы Specific Sling адаптируются к каждому пациенту благодаря множеству размеров (S, M, L, XL) используется со всеми стоячими подъемниками, платформу которых можно снять
- Стропа (WALKING AID SLING) используется в качестве средства для ходьбы, чтобы улучшить мобильность и независимость пациента

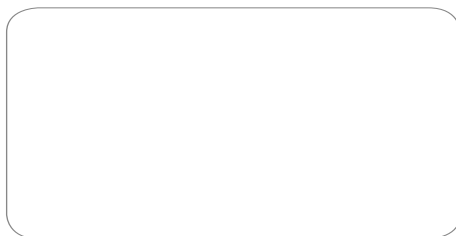

SWYDE2-PF

## Важные рекомендации:


**Чтобы получить максимальную эффективность продукции, необходимо:**

- выбрать подходящий размер для пациента, чтобы получить максимально возможную адаптацию к пациенту
- стропы не должны находиться в непосредственном контакте с поврежденной кожей

# WALKING AID SLING

## SIZE & DIMENSIONS (in cm)

	Plastron	A	B	C
S	70 / 90	21	78	72
M	90 / 115	25	92	76
L	115 / 140	29	106	80
XL	140 / 165	33	120	84

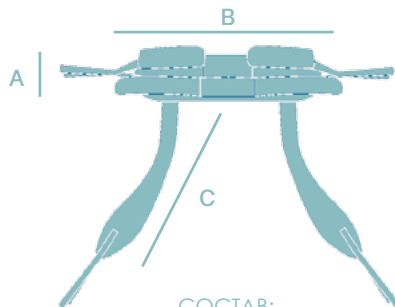

СОСТАВ:  
100 % полиэстер  
40 mm полиэстеровая лента -  
1450 DaN 100 кг/м<sup>3</sup>  
пенополиэтилен  
20/25 кг/м<sup>3</sup> пенополиэтилен  
20 mm polyester bias

## ВНИМАНИЕ

Прочтите инструкцию по эксплуатации перед использованием строп.

Плечики для спинок должны быть одинакового цвета.

Никогда не меняйте настройку крепления ушек к подъемным крюкам, когда кто-либо установлен в стропу.

Прежде чем поднимать человека с помощью подъемника, убедитесь, что стропы надежно закреплены на крюках

