

Таблица размеров

РАЗМЕР	TU (one size fits)	S	M	L	XL
ГРУДЬ (см)	/	70/90	90/115	115/140	140/165
ТАЛИЯ (см)	/	70/90	90/115	115/140	140/165



STAND-UP LIFTS СТРОПЫ

Гид пользователя

Стропы неправильного размера создают дискомфорт и увеличивают риск травмы для пациента.

Выбор правильного размера важен для обеспечения безопасности при транспортировке.

Цветовой код размера краев был введен, чтобы быстро идентифицировать размер каждой петли

- размеру S соответствует желтый цвет
- размеру M соответствует красный цвет
- размеру L соответствует зеленый цвет
- размеру XL соответствует синему цвету
- размеру TU (подходит один размер) соответствует черный цвет

Чтобы выбрать размер стропы, лицо, осуществляющее уход, должен соотнести объем груди (эко и стандартные стропы) или талии (стропы для специальных и прогулочных средств) с размерами, указанными в таблице

Таблица совместимости

	WAYUP 5	WAYUP 5 with opening legs	WAYUP XL	EASYLEV 5	EASYLEV 5 with opening legs	EASYLEV XL	BLUE WAYUP	BLUE WAYUP with opening legs
ECO SLING	★	★	★	★	★	★	★★★★	★★★★
SPECIFIC SLING	★★★★	★★★★	★★★★	★★	★★	★★	★★★★	★★★★
STANDARD SLING	★★	★★	★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★	★★
WALKING AID SLING	/	★★★★	★★★★	/	★★★★	★★★★	/	★★★★

ВАЖНО

Перед использованием подъемника требуется оценка способности пациента ; следует учитывать, в зависимости от ситуации, физические недостатки пациента, патологию и морфологию.