

Перед каждым использованием важно проверять состояние устройства: швы, состояние ремней и ткани. Повреждение может быть отремонтировано Naussica Medical

STANDARD SLING


СТРОПЫ СТАНДАРТНЫЕ



Это медицинское устройство должно быть реализовано с помощью квалифицированных медицинских специалистов



- Специальная стропа (Standart Sling) помещается под подмышками в зависимости от используемого устройства, так как он полностью подкладывается под руки, что распределяет тягу на пациента и позволяет избежать болезненного давления.

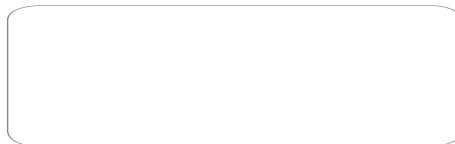

SAPVR-PF

Важные рекомендации:


Чтобы получить максимальную эффективность продукции, необходимо:

- выбрать подходящий размер для пациента, чтобы получить максимально возможную адаптацию к пациенту
- стропы не должны находиться в непосредственном контакте с поврежденной кожей

STANDARD SLING

SIZE & (В СМ)

| | Грудь | A | B |
|----|-----------|----|-----|
| S | 70 / 90 | 21 | 78 |
| M | 90 / 115 | 25 | 92 |
| L | 115 / 140 | 29 | 106 |
| XL | 140 / 165 | 33 | 120 |

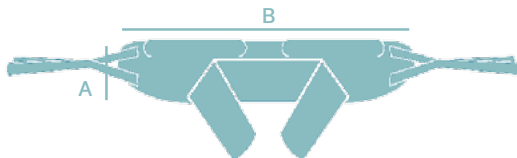

СОСТАВ:

- 100 % полиэстер
- 40 мм полиэстеровой ленты - 1450 DaN
- 50 кг/м³ пенополиэтилен
- 20/25 кг/м³ пенополиэтилен
- 20 мм полиэстер

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Не используйте эту стропу, если размер не подходит для пациента.

Расположите нижнюю часть спинки вокруг лопаток так, чтобы ушки системы крепления находились с обеих сторон человека.

Поместите крепления спинки под руки человека так, чтобы шарики оказались под подмышками.

Закройте пластрон.

Прикрепите два крепления спинки к подъемным крюкам

НАСТРОЙКИ

Система крепления с несколькими подвесками позволяет регулировать положение человека

ВНИМАНИЕ

Прочтите инструкцию по эксплуатации перед использованием строп. Вешалки для спинок должны быть одинакового цвета.

Никогда не меняйте настройку крепления ушек к подъемным крюкам, когда кто-то находится в стропах.

Прежде чем поднимать человека с помощью подъемника, убедитесь, что стропа надежно закреплена на крюках.



ЭТО МЕДИЦИНСКОЕ УСТРОЙСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ УСТАНОВЛЕНО СПЕЦИАЛИСТОМ, ИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ ПО ЕГО УСТАНОВКЕ