

Перед каждым использованием важно проверять состояние устройства: швы, состояние ремней и ткани. Повреждение может быть отремонтировано Nausica Medical

## ECO SLING



Это медицинское устройство должно быть реализовано с помощью квалифицированных медицинских специалистов



- Сертифицированный CE и произведенный во Франции, Eco Sling выпускается в одном размере и используется со всеми подъемниками, оснащенными системой крюков
- Он размещается под подмышками или на поясице в зависимости от используемого устройства
- Прокладка под руками распределяет тягу на пациента и позволяет избежать болезненного давления, особенно под мышками и на уровне спины

SXPECO-PF

## Важные рекомендации:

**Чтобы получить максимальную эффективность продукции, необходимо:**

- выбрать подходящий размер для пациента, чтобы получить максимально возможную адаптацию к пациенту
- стропы не должны находиться в непосредственном контакте с поврежденной кожей


# ECO SLING

## SIZE & DIMENSIONS (в см)

	A	B
One size fits	29	106

### СОСТАВ:

- 100 % полиэстер
- 40 мм полиэстеровая лента
- 1450 DaN 50 кг/м<sup>3</sup>
- пенополиэтилен

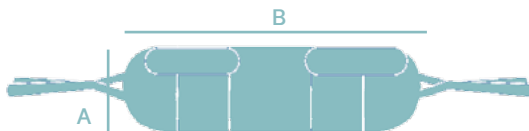

## ПЭ пеноструктура по применению

**Не используйте эту стропу, если размер не подходит для пациента.**

Расположите нижнюю часть спинки в поясничной области так, чтобы ушки системы крепления находились по обе стороны от человека.

Поместите крепления спинки под руки человека.

Закройте пластрон.

Прикрепите два крепления спинки к подъемным крюкам.

## НАСТРОЙКИ

Система крепления с несколькими подвесками позволяет регулировать положение человека.

## ВНИМАНИЕ

Прочитайте инструкцию по применению перед использованием строп. Повесьте на распределительную планку петли, которые находятся на одном уровне.

Не изменяйте какие-либо настройки, пока пациент висит на стропе. Прежде чем поднимать пациента, убедитесь, что стропа правильно закреплена на стержне распределителя



**ЭТО МЕДИЦИНСКОЕ УСТРОЙСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ УСТАНОВЛЕНО ПРОФЕССИОНАЛОМ, ИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ОБУЧИТЬСЯ, ЧТОБЫ УСТАНОВИТЬ ЭТО**