

Перед каждым использованием важно проверять состояние устройства: швы, состояние ремней и ткани. Повреждение может быть отремонтировано Naussia Medical

SPECIFIC SLING СТРОПЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ



Это медицинское устройство должно быть реализовано с помощью квалифицированных медицинских специалистов



- Сертифицированные CE произведено во Франции, стропы Specific Sling адаптируются к каждому пациенту благодаря множеству размеров (S, M, L, XL) и используется со всеми стоячими подъемниками, оснащенными системой крюков
- Специальная стропа (Specific Sling) используется на поясничной области, чтобы создать естественную схему подъема пациента, поскольку ее жесткая пенная прокладка на уровне спины уменьшает болезненное давление, а ее ремень позволяет перемещать в положении сидя

SWYP2-PF

v 02.03/2019

Важные рекомендации:


Чтобы получить максимальную эффективность продукции, необходимо:

- выбрать подходящий размер для пациента, чтобы получить максимально возможную адаптацию к пациенту
- стропы не должны находиться в непосредственном контакте с поврежденной кожей

SPECIFIC SLING

SIZE & ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (в см)

	Грудь	A	B
S	70 / 90	21	78
M	90 / 115	25	92
L	115 / 140	29	106
XL	140 / 165	33	120

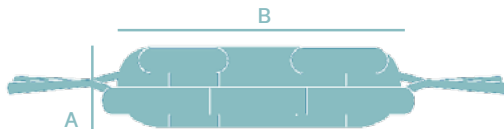

СОСТАВ:

100 % полиэстер

40 мм полиэстеровая лента - 1450 DaN

100 кг/м³ пенополиэтилен

20/25 кг/м³ пенополиэтилен

20 мм полиэстер

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Расположите нижнюю часть спинки в поясничной области так, чтобы ушки системы крепления находились по обе стороны от человека.

Поместите крепления спинки под руки человека.

Закройте пластрон. Прикрепите два крепления спинки к подъемным крюкам.

НАСТРОЙКИ

Система крепления с несколькими подвесками позволяет регулировать положение человека

ВНИМАНИЕ

Прочтите инструкцию по эксплуатации перед использованием строп. Вешалки для спинок должны быть одинакового цвета.

Никогда не меняйте настройку крепления ушек к подъемным крюкам, когда кто-то находится в стропах.

Прежде чем поднимать человека с помощью подъемника, убедитесь, что стропа надежно закреплена на крюках.

v 02.03/2019



ЭТО МЕДИЦИНСКОЕ УСТРОЙСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ УСТАНОВЛЕНО СПЕЦИАЛИСТОМ, ИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ ПО ЕГО УСТАНОВКЕ