



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

МИДГРУПwww.mid.bye-mail.info@mid.by

ПАСПОРТ

НАСОСЫ-ДОЗАТОРЫ ЛОКТЕВЫЕ

насос-дозатор локтевой “МИД-01”, насос-дозатор локтевой с защитной крышкой и замком “МИД-01/К”

Насос-дозатор локтевой “МИД-01” (далее-дозатор “МИД-01”) и насос-дозатор локтевой с защитной крышкой и замком “МИД-01/К” (далее-дозатор “МИД-01/К”) применяются при гигиенической обработке рук.

Дозатор “МИД-01” и дозатор “МИД-01/К” создают удобство пользования, обеспечивают соблюдение высоких санитарно-гигиенических требований.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Привод устройства: | ручной (локтевой). |
| 2. Принцип работы: | многократный возвратно-поступательный. |
| 3. Макс. усилие на рычаг: | не более 35Н (3,5 кг). |
| 4. Масса устройства: | не более 0,45 кг -для дозатора “МИД-01”,
не более 0,56 кг -для дозатора “МИД-01/К” . |
| 5. Габаритные размеры: | 225х100х360 -для дозатора “МИД-01”,
225х100х370 -для дозатора “МИД-01/К”. |
| 6. Производительность: | от 1,5 до 2,5 мл. |

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1. Насос-дозатор локтевой | 1 шт. |
| 2. Защитная крышка с замком | 1 шт. для дозатора “МИД-01/К” |
| 3. Ключ от замка | 2 шт. для дозатора “МИД-01/К” |
| 4. Саморез 3,0х30 | 4 шт. |
| 5. Дюбель 6,0х30 | 4 шт. |
| 6. Паспорт | 1 шт. |
| 7. Коробка картонная упаковочная | 1 шт. |

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Закрепите дозатор на стене при помощи входящих в комплект саморезов (рис. 1)



Перед установкой дозатора обратите внимание на следующее:

- ☒ дозатор рекомендуется установить над раковиной или поддоном;
- ☒ под дозатором должно быть свободное пространство не менее 25 см для удаления флакона;
- ☒ над дозатором должно быть свободное пространство не менее 3 см для снятия устройства со стены;
- ☒ высота подвеса дозатора 120-145 см от пола до верха корпуса.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Откройте защитную крышку (для дозатора “МИД-01/К”).

Вставьте флакон с жидким мылом или антисептиком в дозатор (рис. 2).

Опустите защитную крышку и закройте ее на замок (для дозатора “МИД-01/К”).

Для заполнения насосной системы произведите несколько нажатий на рычаг до появления первой порции раствора из дозатора. Дозатор готов к работе. После каждого последующего нажатия на рычаг будет выдаваться порция раствора.

Величину порции раствора можно менять при повороте корпуса насоса.

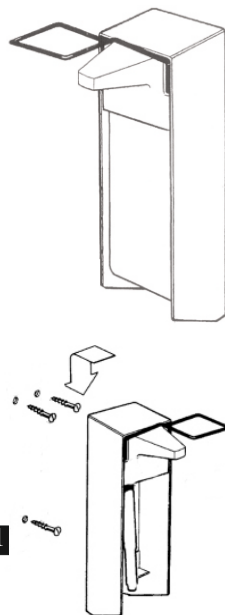
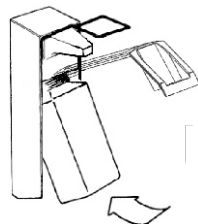
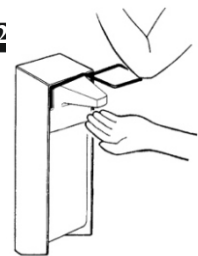
Для этого в отсутствие флакона следует приподнять корпус насоса и повернуть в любую сторону, для того чтобы выбрать подходящий режим дозирования.

Режимы дозирования обозначены цифрами 1-4, которые указаны на корпус насоса.

- “1” - 1,5 мл
- “2” - 1,8 мл
- “3” - 2,2 мл
- “4” - 2,5 мл



Нажатие на рычаг рекомендуется производить локтем (рис. 3).

рис. 3**рис. 1****рис. 2**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

МИДГРУПwww.mid.bye-mail.info@mid.by

ПАСПОРТ

НАСОСЫ-ДОЗАТОРЫ ЛОКТЕВЫЕ

насос-дозатор локтевой “МИД-01”, насос-дозатор локтевой с защитной крышкой и замком “МИД-01/К”

Насос-дозатор локтевой “МИД-01” (далее-дозатор “МИД-01”) и насос-дозатор локтевой с защитной крышкой и замком “МИД-01/К” (далее-дозатор “МИД-01/К”) применяются при гигиенической обработке рук.

Дозатор “МИД-01” и дозатор “МИД-01/К” создают удобство пользования, обеспечивают соблюдение высоких санитарно-гигиенических требований.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Привод устройства: | ручной (локтевой). |
| 2. Принцип работы: | многократный возвратно-поступательный. |
| 3. Макс. усилие на рычаг: | не более 35Н (3,5 кг). |
| 4. Масса устройства: | не более 0,45 кг -для дозатора “МИД-01”,
не более 0,56 кг -для дозатора “МИД-01/К” . |
| 5. Габаритные размеры: | 225х100х360 -для дозатора “МИД-01”,
225х100х370 -для дозатора “МИД-01/К”. |
| 6. Производительность: | от 1,5 до 2,5 мл. |

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1. Насос-дозатор локтевой | 1 шт. |
| 2. Защитная крышка с замком | 1 шт. для дозатора “МИД-01/К” |
| 3. Ключ от замка | 2 шт. для дозатора “МИД-01/К” |
| 4. Саморез 3,0х30 | 4 шт. |
| 5. Дюбель 6,0х30 | 4 шт. |
| 6. Паспорт | 1 шт. |
| 7. Коробка картонная упаковочная | 1 шт. |

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Закрепите дозатор на стене при помощи входящих в комплект саморезов (рис. 1)



Перед установкой дозатора обратите внимание на следующее:

- ☒ дозатор рекомендуется установить над раковиной или поддоном;
- ☒ под дозатором должно быть свободное пространство не менее 25 см для удаления флакона;
- ☒ над дозатором должно быть свободное пространство не менее 3 см для снятия устройства со стены;
- ☒ высота подвеса дозатора 120-145 см от пола до верха корпуса.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Откройте защитную крышку (для дозатора “МИД-01/К”).

Вставьте флакон с жидким мылом или антисептиком в дозатор (рис. 2).

Опустите защитную крышку и закройте ее на замок (для дозатора “МИД-01/К”).

Для заполнения насосной системы произведите несколько нажатий на рычаг до появления первой порции раствора из дозатора. Дозатор готов к работе. После каждого последующего нажатия на рычаг будет выдаваться порция раствора.

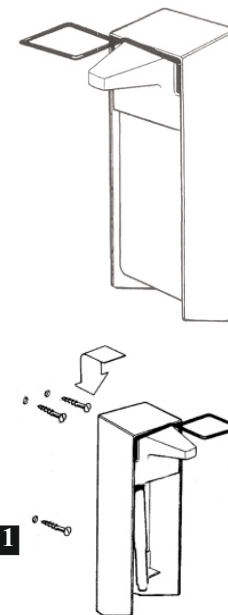
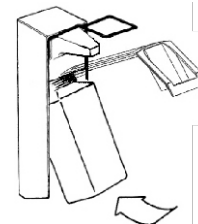
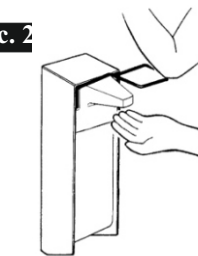
Величину порции раствора можно менять при повороте корпуса насоса.

Для этого в отсутствие флакона следует приподнять корпус насоса и повернуть в любую сторону, для того чтобы выбрать подходящий режим дозирования.

Режимы дозирования обозначены цифрами 1-4, которые указаны на корпус насоса.

- “1” - 1,5 мл
- “2” - 1,8 мл
- “3” - 2,2 мл
- “4” - 2,5 мл

Нажатие на рычаг рекомендуется производить локтем (рис. 3).

рис. 3**рис. 1****рис. 2**

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очищайте поверхности дозатора ветошью смоченной, в моющем растворе. Для дезинфекции дозатора применяются препараты, разрешенные для дезинфекции изделий медицинского назначения.



Не пользуйтесь абразивными и содержащими хлор очистителями.

При ухудшении работы дозатора необходимо промыть насосную систему без разборки устройства. Для этого нужно залить в флакон горячую (60-70°C) воду и производить многократные нажатия на рычаг до восстановления нормальной работы дозатора.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

1. Гарантийный срок эксплуатации дозаторов “МИД-01” и “МИД-01/К” - 12 месяцев с даты реализации.

ГАРАНТИЙНЫМ СЛУЧАЕМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ:

1. Приведение в негодность дозатора по причине ремонта потребителем.
2. Приведение в негодность дозатора по причине использования средств, не соответствующих области применения (не являющихся средствами по уходу за руками).
3. Приведение в негодность дозатора по причине нарушений эксплуатации и технического обслуживания.
4. Наличие механических повреждений.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Насос-дозатор локтевой “МИД-01”, насос-дозатор локтевой с защитной крышкой и замком “МИД-01/К” соответствуют техническим условиям ТУ ВУ 690777163.001-2010, изм. №1 и признаны годными к эксплуатации.

Серийный номер

Дата изготовления

АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА

Республика Беларусь

222720, Минская область, г. Дзержинск,

ул. Фоминых, 56/2-1

тел/факс +375 17 395 13 30, +375 17 288 43 60

WWW.MID.BY

E-MAIL:INFO@MID.BY

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очищайте поверхности дозатора ветошью смоченной, в моющем растворе. Для дезинфекции дозатора применяются препараты, разрешенные для дезинфекции изделий медицинского назначения.



Не пользуйтесь абразивными и содержащими хлор очистителями.

При ухудшении работы дозатора необходимо промыть насосную систему без разборки устройства. Для этого нужно залить в флакон горячую (60-70°C) воду и производить многократные нажатия на рычаг до восстановления нормальной работы дозатора.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

1. Гарантийный срок эксплуатации дозаторов “МИД-01” и “МИД-01/К” - 12 месяцев с даты реализации.

ГАРАНТИЙНЫМ СЛУЧАЕМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ:

1. Приведение в негодность дозатора по причине ремонта потребителем.
2. Приведение в негодность дозатора по причине использования средств, не соответствующих области применения (не являющихся средствами по уходу за руками).
3. Приведение в негодность дозатора по причине нарушений эксплуатации и технического обслуживания.
4. Наличие механических повреждений.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Насос-дозатор локтевой “МИД-01”, насос-дозатор локтевой с защитной крышкой и замком “МИД-01/К” соответствуют техническим условиям ТУ ВУ 690777163.001-2010, изм. №1 и признаны годными к эксплуатации.

Серийный номер

Дата изготовления

АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА

Республика Беларусь

222720, Минская область, г. Дзержинск,

ул. Фоминых, 56/2-1

тел/факс +375 17 395 13 30, +375 17 288 43 60

WWW.MID.BY

E-MAIL:INFO@MID.BY

