

ТОВ «Делмед»
61013, м. Харків, вул. Шевченка 24
тел. +38(057) 752-03-05
zakaz@delmed.net
ЄДРПУ 23144629
Р/р UA77 351533 00000 26002052319108
Харківська філія Приватбанк
МФО 351533
Свідоцтво про держреєстрацію № 14801050002014103

ОРТОПЕДИЧНІ ВИРОБИ
DELMEDE
www.delmed.com.ua

Шановний пацієнт!

Ви придбали попереково-крижовий ортопедичний корсет, який було призначено Вам для поліпшення опорно-рухової функції попереково-клубового відділу хребта в період лікування або профілактики захворювання чи травми.



Використання корсета у відповідності з встановленими правилами дозволить Вам запобігти негативного впливу на стан здоров'я і буде сприяти Вашому одужанню.

Важливі відмінності нашого корсета:

Металеві ребра жорсткості дозволяють моделювати корсет багато разів, перегінати метал під Вашу фігуру. Ребра жорсткості трохи пружинять і тримають прогнуті Вами форму. Це дає велику жорсткість виробу і в більшості випадків досить для реабілітації при компресійному переломі.

Матеріал основи - 100% бавовна, саржа - тканина джинсового

плетіння. Міцна, дихаюча, приємна до тіла.

Шнурівка збоку дає можливість регулювання обсягів в разі схуднення або набору ваги.

Липучка попереду дозволяє швидко і легко протягом дня знімати і одягати корсет.

Металеві ребра оброблені, щоб Ви могли прати корсет в міру забруднення. Ручне прання в теплій мильній воді.

Дія:


- корсет для попереково-крижового відділів хребта та на таз;
- розвантаження і фіксація хребта;
- компенсація навантажень на хребет;
- стабілізуюча дія на попереково-крижовий відділ, саногенетична, мікромасажна дія на шкіру і м'язи спини;
- корсет обмежує рухи тулуба.

Призначення:

- больовий синдром в попереку;
- остеохондроз, спондильоз і спондилоартроз;
- міжхребцеві грижі;
- запалення крижово-клубового зчленування (сакроілеїт);
- підтримка та розвантаження після мануальної терапії та лікувальної гімнастики;
- фізичні навантаження, профілактика захворювань.

Керівництво з експлуатації

Корсет попереково-крижовий (артикул КПК)

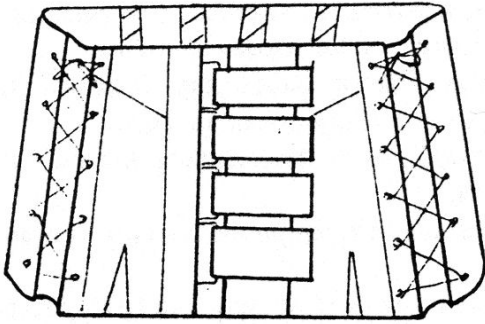

- 1.1 Корсети одягають на тулуб, одягнений у натільну білизну.
- 1.2 Застібки повинні знаходитись у застібненому вигляді, навіть коли корсет знімають.
- 1.3 Корсет не повинні викликати стискування, ущемлення, порушення кровообігу, больових відчуттів при користуванні виробом та забезпечувати надійну фіксацію всього тулуба.
- 1.4 У разі виникнення негативних відчуттів треба

послабити тиск за допомогою шнурівки або застібки або звернутись до лікаря чи відповідального робітника підприємства- виробника, що здійснює контроль за якістю виробу в період експлуатації.

2. Підготовка до користування корсетом

- 2.1 Перед надяганням корсета слід перевірити стан застібки текстильної. При появі на ній ниток від одягу слід голкою видалити нитки з обох сторін застібки.
- 2.2 Перед надяганням корсету треба вдягти бавовняну нижню білизну або футболку меншого розміру з рукавами, розправити її, усуваючи зморшки.
- 2.3 Одягати корсет треба стоячи. Іноді, за призначенням лікаря корсет пропонується вдягати лежачи.
- 2.4 Шнурівка у корсеті має функцію змінювання розміру та більш щільного фіксування корсету на тулубі з урахуванням індивідуальних особливостей статури пацієнта.

3. Користування корсетом

- 3.1 Режим користування корсетом у кожному конкретному випадку визначає лікар, що призначив корсет.
- 3.2 Контроль за лікуванням пацієнта, якому призначено корсет, тип виробу та визначення строків періодичних оглядів пацієнта здійснює лікар по місцю проживання пацієнта.
- 3.3 Рекомендації щодо користування виробом, елементами санітарно-гігієнічного догляду визначає лікар чи відповідальний працівник протезно- ортопедичного підприємства.

4. Технічне обслуговування та зберігання

4.1 Строк використання корсета залежить від догляду за ним та своєчасного усунення дефектів, які виникли в період експлуатації. Гарантійний строк експлуатації корсетів становить 6 місяців від дня видачі виробу в експлуатацію

4.2 Корсет зберігають у сухому приміщенні при температурі повітря від плюс 10°C до 35°C. Забороняється зберігання виробу в одному приміщенні з агресивними засобами.

4.3 Якщо в Вас виникають питання щодо користування та експлуатації виробу, будь-ласка звертайтеся за нашими телефонами +38(095)0544933, +38(050)9563341 з ПН по ПТ, з 9.00 до 17.00 години. Відправляйте повідомлення у Вайбер та Телеграмм на ці номери. Ми відповімо як можна швидше.



Додайте наші контакти до Вашого смартфона за допомогою QR коду.