

# 3M

## Filtek™ Universal

Універсальний композитний матеріал

Твої реставрації

Твій КОМПОЗИТ

Твій день



Натуральні відтінки

# Універсально простіше

## 8 дизайнерських відтінків. Універсальна опаківість. Простіше не буває.

Ефективність є ключовим фактором успіху в роботі, особливо коли щоденний графік дуже насичений. Це одна з причин, чому стоматологи обирають прості однокольорові техніки реставрацій майже у 80% випадків\*. Компанія 3M знайшла рішення – 3M™ Filtek™ Universal – універсальний композитний матеріал.

### Спрощений підбір кольору!


Лише 8 спеціально розроблених відтінків плюс Extra White (XW), що перекривають 19 класичних VITA відтінків та для вибілених зубів відповідно. Кожен відтінок Filtek™ Universal має універсальну опаківість, що відповідає більшості клінічних потреб.

- З технологією **Natural Match**, що поєднує в собі наночастини, пігменти і запатентовану технологію мономерів, котрі знижують стрес та рівень усадки, ви створюєте однокольорову естетику, яка природньо адаптується до зубного ряду.
- **Флуоресцентні пігменти** увиразнюють природний вигляд реставрації.

- **3M Нанотехнологія наповнювача** – збільшує рентгенконтрастність.

\* Внутрішні дані 3M

### 8 доступних відтінків

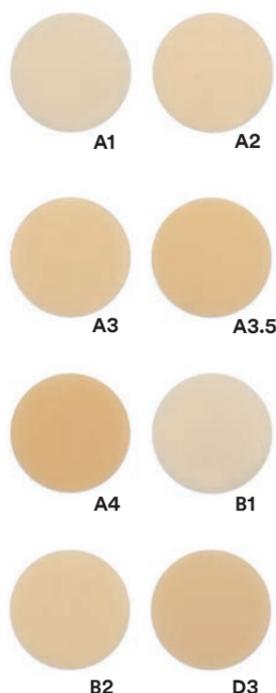

### Додаткові відтінки Extra White (XW) та Pink Opaquer (PO) дозволяють Вам досягнути ідеального рівня естетики в окремих випадках

Extra White для пацієнтів, у кого вибілені зуби.



XW

Приховайте темні знебарвлення, які псують естетику ваших реставрацій. Pink Opaquer ефективно маскує метал та дисколорит.



### НОВИЙ клас універсального композиту


Починаючи з моменту полімеризації, реставрації піддаються різноманітним випробуванням: жування, чищення зубною щіткою та шкрябання. Ми збільшили рівень міцності та надійності, вперше поєднавши дві запатентовані стоматологічні технології в одному універсальному композиті.

### Технології інноваційних LOW-STRESS мономерів



Вперше запроваджені в наших bulk-fill композитах, допомагають захистити реставрації від проблем, пов'язаних з усадкою та полімеризаційним стресом.

### Технологія 3M СПРАВЖНЬОГО нанонаповнювача

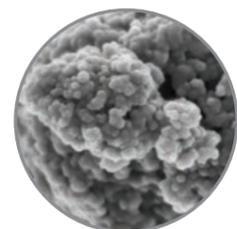


Забезпечує високу міцність та зносостійкість, а також тривале непереврене утримання блиску.

100 тис. збільшення нанокластера. Фото надано Др. Дж. Пердігао, Університет Мінесоти (США).

...оберіть даний відтінок 3M™ Filtek™ Universal Restorative\*

Якщо відтінок VITA...

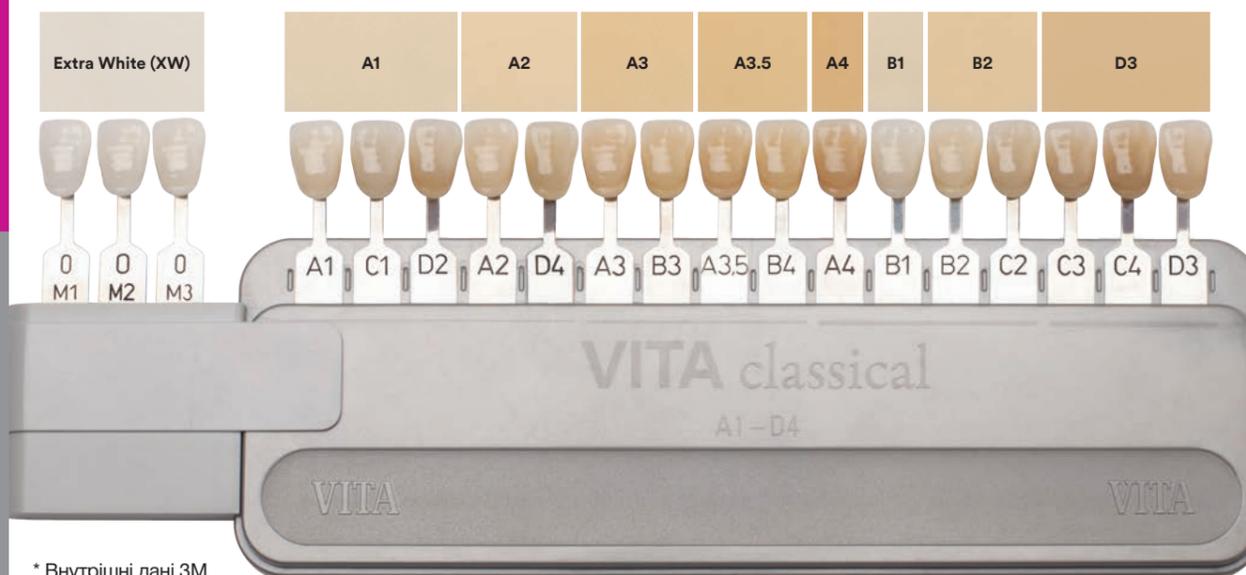

\* Внутрішні дані 3M

## Закриття діастеми на центральних різцях верхньої щелепи за допомогою 3M™ Filtek™ Universal Restorative, відтінок A1



ПОЧАТКОВА СИТУАЦІЯ: композитні реставрації підлягають заміні. Планується композитне закриття діастеми.



Видалення старих реставрацій.



Протравлення поверхні за допомогою 3M™ Scotchbond™ Universal Etchant. Змивання гелю водою після 15 сек.



Адгезивна підготовка, відновлення апроксимальних поверхонь і пришийкової ділянки за допомогою 3M™ Filtek™ Universal A1.



Вигляд реставрацій після нанесення композиту та видалення матриці.



Шліфування реставрації спіральними дисками 3M™ Sof-Lex™ Pre-Polishing Spiral (бежеві).



Фінішна обробка поверхні спіральними дисками 3M™ Sof-Lex™ Diamond (рожеві).



ФІНАЛЬНИЙ РЕЗУЛЬТАТ: Досягнуто природнього та естетичного вигляду реставрацій.

Клінічне застосування та фото надані лікарем Др. Вальтер Девото, Університет Генуї, Італія

## Основні властивості:

- **Спрощений підбір кольору** – 8 спеціально розроблених відтінків для більшості ваших пацієнтів.
- **Універсальна опаковність** для максимально природнього вигляду реставрації.
- **Extra White (XW)** для вибілених зубів.
- **Флуоресцентні пігменти** надають реставраціям природнього естетичного вигляду.
- **Рожевий Pink Oraquer (PO)** з неймовірним ефектом хамелеону маскує темні ділянки.
- **Нанотехнологія 3M** для легкого полірування та довготривалого утримання блиску.
- **Інноваційні low-stress мономери AUDMA та AFM** зменшують усадку і знімають полімеризаційний «стрес», стійкі до руйнування.
- **Висока рентгенконтрастність** для легкої діагностики на повторних візитах.
- **Капсули можна безпечно нагрівати** – 3M™ Filtek™ Universal в капсулах можна нагрівати до 70°C / 158°F протягом однієї години, тим самим це знижує силу екструзії і не змінює фізичні властивості\*.

\*Див. інструкцію із застосування

## Призначення:

- Прямі реставрації для фронтальної та бічної групи зубів.
- Відновлення кукси зуба.
- Шинування.
- Непрямі реставрації, включаючи вкладки, накладки та вініри.




## Інформація про продукцію

### 3M™ Filtek™ Universal Restorative

Артикул №	Опис продукції
6575-CK	<b>3M™ Filtek™ Universal стартовий набір, капсули</b> Набір містить 80 капсул по 0,2 г кожна відтінків A1 x20, A2 x20, A3 x20, A3.5 x20 і 10 капсул по 0,2 г відтінку Pink Oraquer (PO); технічний гід, інструкцію із застосування.
6570-SK	<b>3M™ Filtek™ Universal стартовий набір, шприці</b> Набір містить 5 шприців по 4 г кожен відтінків A1, A2, A3, A3.5 та Pink Oraquer (PO); технічний гід, інструкцію із застосування.
5850RD	<b>3M™ Filtek™ Диспенсер для капсульних версій композитних матеріалів</b>
Рефіли	Артикул №
<b>Відтінок</b>	<b>Шприці</b> <b>Капсули</b>
A1	6570A1      6575A1
A2	6570A2      6575A2
A3	6570A3      6575A3
A3,5	6570A3,5      6575A3,5
A4	6570A4      6575A4
B1	6570B1      6575B1
B2	6570B2      6575B2
D3	6570D3      6575D3
XW — Extra White	6570XW      6575XW
PO — Pink Oraquer	6570PO      6575PO
<b>СТАНДАРТНІ упаковки:</b>	КАПСУЛИ – 20 капсул по 0,2 г кожна      ШПРИЦІ – 1 шприц 4 г
<b>PINK ORAQUER (PO):</b>	КАПСУЛИ – 10 капсул по 0,2 г кожна      ШПРИЦІ – 1 шприц 4 г

Кожна упаковка та набір містять технічний гід та інструкцію із застосування.

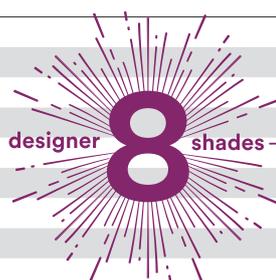

**3M Україна**  
Стоматологічна продукція  
Київ, 03038  
Вул. М. Амосова 12  
БЦ «Горизонт Парк», 7-й поверх  
Тел.: +38 044 490 57 77  
3moralcareukraine@mmm.com  
www.3m.com.ua



3M, Filtek, Elipar, Scotchbond, Sof-Lex є торговими марками компанії 3M та 3M Deutschland GmbH.  
© 3M 2020. Усі права захищено.