

# ЩИТОК ЗАХИСНИЙ



## ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ ВИРОБА

### ПРИЗНАЧЕННЯ

Щиток захисний, що використовується під час стоматологічних процедур, зменшує ризики пов'язані з інфекціями, що передаються крапельним шляхом, захищає від впливу шкідливих механічних факторів.

### СПОСІБ КРІПЛЕННЯ

Зняти акуратно плівку, уникаючи забруднень і подряпин, прикріпити захисну пластину широкою стороною у зажими по боках оправи.

Висоту і відхилення плівки можна відрегулювати індивідуально.

Не слід складати оправу з закріпленою пластиною, перед складанням пластину необхідно від'єднати.

Увага: оправи виготовлені з термопластичного матеріалу, їх можна вигинати і моделювати у відповідності з індивідуальними потребами при зануренні у гарячу воду.

### ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Після забруднення захисну пластину необхідно зняти з оправи, а потім обережно промити водою з додаванням миючого засобу і дати висохнути. Пластина можна використовувати знову. У разі появи на плівці подряпин або потертостей, що є результатом зносу – пластину слід викинути і використати наступну.

Не витирати насухо! Не використовуйте спирт!

Виробник не несе відповідальності за наслідки використання продукту не у відповідності з інструкцією і призначенням.

### КОМПЛЕКТАЦІЯ (можливі варіанти)

1. ЩИТОК COMFORT - оправа з металевими кліпсами+ набір змінних плівок
2. ЩИТОК COMFORT LIGHT - оправа з пластиковими кріпленням + комплект змінних плівок
3. ЩИТОК VISOR для коригувальних окулярів - комплект пластин з кліпсами для носіння на коригувальних окулярах.



CERKAMED Войцех Павловські  
37-450 Стальова Воля, Польща  
вул. Квятковського, 1  
тел./факс 0048 15 842-35-85

<b>Уповноважений представник в Україні та адреса:</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю «ІВОДЕНТ»
	вул. Курінного Чорноти, 2, корпус 1, м. Івано-Франківськ, 76018, Україна; phone/ fax: +38 (0342) 55 94 55 e-mail: <a href="mailto:info@ivodent.com.ua">info@ivodent.com.ua</a> <a href="http://www.ivodent.com.ua">www.ivodent.com.ua</a>