



ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ МЕДИЧНОГО ВИРОБУ
Шприци ін'єкційні одноразового використання торгової марки IGAR

1. Перед використанням перевірити цілісність індивідуальної упаковки та термін придатності медичного виробу.
2. Розкриття індивідуальної упаковки здійснюється безпосередньо перед використанням медичного виробу.
3. З'єднати голку, щільно надівши її на конус шприца, зняти захисний ковпачок.
4. Заповнивши лікарським засобом, розмістити шприц вертикально голкою вгору, видалити залишки повітря, натискаючи на шток-поршень шприца. Зробити ін'єкцію.
5. Зберігати у недоступному для дітей місці, уникати надмірно високих температур, надмірної вологості повітря та прямого сонячного світла.
6. Не використовувати медичний виріб у разі пошкодження упаковки та/або після контакту з нестерильною поверхнею.
7. Не використовувати медичний виріб повторно, лише для одноразового використання.
8. Розкрита упаковка, використаний або невикористаний медичний виріб підлягають утилізації відповідно до вимог національних стандартів.

Назва модифікації медичного виробу українською мовою
Шприц ін'єкційний одноразового використання торгової марки IGAR двокомпонентний "Луер" 2 мл, з голкою 0,8 × 38 мм (21G × 1 1/2")
Шприц ін'єкційний одноразового використання торгової марки IGAR двокомпонентний "Луер-Лок" 2 мл, з голкою 0,8 × 38 мм (21G × 1 1/2")
Шприц ін'єкційний одноразового використання торгової марки IGAR двокомпонентний "Луер" 2 мл, з голкою 0,8 × 16 мм (21G × 5/8")
Шприц ін'єкційний одноразового використання торгової марки IGAR двокомпонентний "Луер-Лок" 2 мл, з голкою 0,8 × 16 мм (21G × 5/8")
Шприц ін'єкційний одноразового використання торгової марки IGAR двокомпонентний "Луер" 2 мл, з голкою 0,7 × 38 мм (22G × 1 1/2")
Шприц ін'єкційний одноразового використання торгової марки IGAR двокомпонентний "Луер-Лок" 2 мл, з голкою 0,7 × 38 мм (22G × 1 1/2")
Шприц ін'єкційний одноразового використання торгової марки IGAR двокомпонентний "Луер" 2 мл, з голкою 0,7 × 40 мм (22G × 1 1/2")
Шприц ін'єкційний одноразового використання торгової марки IGAR двокомпонентний "Луер-Лок" 2 мл, з голкою 0,7 × 40 мм (22G × 1 1/2")
Шприц ін'єкційний одноразового використання торгової марки IGAR двокомпонентний "Луер" 2 мл, з голкою 0,6 × 30 мм (23G × 1 1/4")
Шприц ін'єкційний одноразового використання торгової марки IGAR двокомпонентний "Луер-Лок" 2 мл, з голкою 0,6 × 30 мм (23G × 1 1/4")
Шприц ін'єкційний одноразового використання торгової марки IGAR двокомпонентний "Луер" 2 мл, з голкою 0,5 × 16 мм (25G × 5/8")
Шприц ін'єкційний одноразового використання торгової марки IGAR двокомпонентний "Луер-Лок" 2 мл, з голкою 0,5 × 16 мм (25G × 5/8")
Шприц ін'єкційний одноразового використання торгової марки IGAR двокомпонентний "Луер" 5 мл, з голкою 0,8 × 38 мм (21G × 1 1/2")
Шприц ін'єкційний одноразового використання торгової марки IGAR двокомпонентний "Луер-Лок" 5 мл, з голкою 0,8 × 38 мм (21G × 1 1/2")
Шприц ін'єкційний одноразового використання торгової марки IGAR двокомпонентний "Луер" 5 мл, з голкою 0,8 × 40 мм (21G × 1 1/2")
Шприц ін'єкційний одноразового використання торгової марки IGAR двокомпонентний "Луер-Лок" 5 мл, з голкою 0,8 × 40 мм (21G × 1 1/2")

Сторінка 1 з 4

Шприц ін'єкційний одноразового використання торгової марки IGAR трикомпонентний "Луер" 10 мл, з голкою 0,7 × 38 мм (22G × 1 1/2")
Шприц ін'єкційний одноразового використання торгової марки IGAR трикомпонентний "Луер-Лок" 10 мл, з голкою 0,7 × 38 мм (22G × 1 1/2")
Шприц ін'єкційний одноразового використання торгової марки IGAR трикомпонентний "Луер" 10 мл, з голкою 0,7 × 40 мм (22G × 1 1/2")
Шприц ін'єкційний одноразового використання торгової марки IGAR трикомпонентний "Луер-Лок" 10 мл, з голкою 0,7 × 40 мм (22G × 1 1/2")
Шприц ін'єкційний одноразового використання торгової марки IGAR трикомпонентний "Луер" 10 мл, з голкою 0,6 × 30 мм (23G × 1 1/4")
Шприц ін'єкційний одноразового використання торгової марки IGAR трикомпонентний "Луер-Лок" 10 мл, з голкою 0,6 × 30 мм (23G × 1 1/4")
Шприц ін'єкційний одноразового використання торгової марки IGAR трикомпонентний "Луер" 20 мл, з голкою 0,8 × 38 мм (21G × 1 1/2")
Шприц ін'єкційний одноразового використання торгової марки IGAR трикомпонентний "Луер-Лок" 20 мл, з голкою 0,8 × 38 мм (21G × 1 1/2")
Шприц ін'єкційний одноразового використання торгової марки IGAR трикомпонентний "Луер" 20 мл, з голкою 0,8 × 40 мм (21G × 1 1/2")
Шприц ін'єкційний одноразового використання торгової марки IGAR трикомпонентний "Луер-Лок" 20 мл, з голкою 0,8 × 40 мм (21G × 1 1/2")
Шприц ін'єкційний одноразового використання торгової марки IGAR трикомпонентний "Луер" 20 мл, з голкою 0,7 × 38 мм (22G × 1 1/2")
Шприц ін'єкційний одноразового використання торгової марки IGAR трикомпонентний "Луер-Лок" 20 мл, з голкою 0,7 × 38 мм (22G × 1 1/2")
Шприц ін'єкційний одноразового використання торгової марки IGAR трикомпонентний "Луер" 20 мл, з голкою 0,7 × 40 мм (22G × 1 1/2")
Шприц ін'єкційний одноразового використання торгової марки IGAR трикомпонентний "Луер-Лок" 20 мл, з голкою 0,7 × 40 мм (22G × 1 1/2")
Шприц ін'єкційний одноразового використання торгової марки IGAR трикомпонентний "Луер" 50 мл, з голкою 2,1 × 30 мм (14G × 1 1/4")



Виробник **Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"**
місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103,
телефон/факс: +380445853455

Місце виробництва **Shandong Zibo Shanchuan Medical Instrument Co., Ltd.,**
(Виробничі потужності) № 88 Shanchuan Road, Zichuan, 255100, Zibo City, Shandong, China

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від "02" жовтня 2013 року №753, про що видано Декларацію про відповідність.

Директор



М.П.

В.Г. Биков

Сторінка 4 з 4