



Інструкція

ВСТУП

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтеся з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу.



Не використовуйте виріб, не ознайомившись з Інструкцією. Не використовуйте виріб у випадку його пошкодження. Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.

Універсальні ходунці «OSD-EY-913» (далі за паспортом – виріб / ходунці) – рекомендовано для застосування у медичних закладах та вдома.

Розроблено для максимальної зручності та безпеки користувача.

Даний виріб відповідає вимогам європейської Директиви 93/42/ЄЕС виробів медичного призначення.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- 1. ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, що виріб готовий до експлуатації та НЕ ПОТРЕБУЄ будь-якого технічного втручання або додаткової модернізації.
2. ЗАВЖДИ перевіряйте технічний стан виробу перед кожним використанням. ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, що усі частини закріплені та міцно зафіксовані. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ його у випадку зносу або пошкодження.
3. ЯКЩО ВИЯВЛЕНО несправність, то НЕ ПРОВОДЬТЕ ремонт самостійно. Зверніться до спеціаліста.
4. ВЧАСНО замінійте наконечники!
5. БУДЬТЕ ОБАЧНІ на нерівних поверхнях.
6. НІКОЛИ не сидіть на ходунцях.
7. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ виріб на сходах та ескалаторах.
8. МАКСИМАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ на виріб – 136 кг. НІКОЛИ не перевищуйте допустимий ліміт ваги!
9. У ВИПАДКУ використання виробу різними пацієнтами РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ систематично і ретельно мити та дезінфікувати його, щоб уникнути інфекцій.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування виробу, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Table with 2 columns: Параметр, Значення. Rows include: Модель (OSD-EY-913), Матеріал (алюміній), Ширина (50), Глибина (43), Висота (76-89), Вага (2,7), Максимальне навантаження (136).

ВИКОРИСТАННЯ

Розкладання

- 1. Розкладіть раму. Для того, щоб розкласти ходунці розверніть дві бічні частини, поки не почуєте клацання. Щоб скласти ходунці натисніть центральну кнопку й поверніть бічну частину.
2. Установіть бажану для користувача висоту.
3. Перевірте «ходові якості» реабілітаційних ходунців.

Регулювання висоти

Регулювання висоти ходунців відбувається за допомогою кнопок на кожній ніжці. Установіть потрібну висоту ніжок. Як тільки кнопка потрапить у потрібний отвір на ніжці, висота буде зафіксована. Переконайтеся у тому, що всі ніжки мають однакову висоту, а всі кнопки потрапили у відповідні отвори.

Використання

Універсальні ходунці «OSD-EY-913» можуть використовуватись у двох режимах: фіксований та крокуючий. Для зміни режиму необхідно натиснути на кнопку на рамі ходунців (див. Рис. 1).

Використання у фіксованому режимі (див. Рис. 2):


Перемістіть ходунці вперед на відстань, що дорівнює Вашому стандартному кроку. Потім, спираючись на них, перемістіть ногу до висуненої уперед частини ходунців, далі – другу ногу. Для переміщення повторіть зазначені вище рекомендації.

Використання у крокуючому режимі (див. Рис. 2):

Розташуйте ходунці перед собою. Перемістіть одну сторону ходунців на кілька сантиметрів уперед. Потім пересувайте ногу до висунутої уперед частини ходунців. Те ж саме повторіть з іншою частиною. Для переміщення уперед, повторіть вищезазначені рекомендації.



Рис. 1

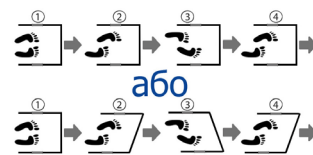

УНІВЕРСАЛЬНА КОНСТРУКЦІЯ

Рис. 2

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ДОГЛЯД

Зовнішню поверхню виробу обробляйте дезінфікуючими засобами, зареєстрованими та дозволенними в Україні для дезінфекції поверхонь за режимами, регламентованими діючими документами стосовно застосування дезінфікуючих засобів, затвердженими в установленому порядку.

Завжди тримайте виріб у чистоті для використання протягом тривалого терміну. Очищайте за допомогою води та миючих засобів. Не використовуйте розчинники та абразивні препарати. Протирайте виріб сухою ганчіркою після кожного використання.

ПРИМІТКА: Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшення конструкції виробу, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції.



Перевіряйте належну якість виробу перед кожним використанням, якщо обладнання використовується не регулярно, то оглядайте його мінімум раз на рік. У разі поломки або несправності, пошкоджень або розривів одного або декількох деталей, НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ виріб.

УМОВИ ГАРАНТІЇ

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу викладених у Інструкції.

- 1. Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну.
2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
a) порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
b) за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
v) якщо пристрій використовувався не за призначенням.
3. Гарантія не розповсюджується на:
a) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
b) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
v) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.

УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.

Дата продажу: Підпис/Печатка:

ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Виріб «OSD-EY-913» відповідає технічним вимогам і визнаний придатним для експлуатації.

Виробник: Foshan Nanhai Anjian Medical Equipment Parts Co., Ltd / Фошан Нангаї Анджиан Медікал Еквіпмент Партс Ко., Лтд.

№.3 Xinj Industrial Park, Xiqiao Town, Nanhai District, Foshan City, Guandong Province, China / №.3 Ксінджи Індастріал Парк, Ксікяо Таун, Нангаї Дістрікт, Фошан Сіті, Гуандонг Провінсе, Китай.

Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «ОСД Східна Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. 40-Річчя Жовтня, 100/2.

Номер редакції: № 4 від 08.02.2019.

Дата виготовлення: див. на упаковці.

Термін придатності виробу: необмежений.

Гарантійний термін на виріб «OSD-EY-913» – 12 місяців з дати продажу за умови дотримання правил експлуатації виробу, зазначених у Інструкції.

