



# САНІЛІТ

**ВМІСТ АКТИВНОГО ХЛОРУ  
НЕ МЕНШЕ 50%**

Засіб дезінфекційний хлорний



НЕ ЗАЛИШАЄ ПЛЯМ  
ТА НАЛЬОТУ

## СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

- Дезінфекція поверхонь у приміщеннях, жорстких меблів, зовнішніх поверхонь медичних приладів та апаратів
- Дезінфекція санітарно-технічного устаткування та виробів медичного призначення
- Дезінфекція, поєднана з ПСО, виробів медичного призначення
- Дезінфекція медичних та біологічних відходів
- Дезінфекція транспорту (залізничного, автомобільного, авіаційного, річкового тощо)
- Профілактична дезінфекція об'єктів

**СКЛАД ЗАСОБУ:** натрієва сіль дихлороізоціанурової кислоти – 81%; допоміжні компоненти, що забезпечують мийні властивості засобу, швидку розчинну дію таблеток, знижують корозійну дію хлору (бікарбонат натрію та карбонат натрію – 11%).

## ПЕРЕВАГИ ЗАСОБУ

- Дезінфекція одночасно з достерилізаційним очищенням\*
- Можливість порційного фасування
- Термін придатності готових розчинів – 7 діб
- Можливість багаторазового використання робочих розчинів – до 7 діб\*\*
- Можливість застосування засобу у присутності хворих (без засобів захисту)

\* Для виробів медичного призначення.

\*\*За режимом дезінфекція поєднана з достерилізаційним очищенням виробів медичного призначення.

# САНІЛІТ

ВМІСТ АКТИВНОГО ХЛОРУ НЕ МЕНШЕ 50%

## СПЕКТР АНТИМІКРОБНОЇ ДІЇ

Засіб має антимікробну активність відносно грамнегативних і грампозитивних бактерій (включаючи збудників туберкульозу), вірусів (зокрема аденовіруси, віруси грипу, парагрипу та інших збудників гострих респіраторних інфекцій, ентеровіруси, ротавіруси, вірус поліомієліту, віруси ентеральних [А], парентеральних [В, С] гепатитів, герпесу, атипової пневмонії, пташиного грипу, ВІЛ), патогенних грибів роду кандиди, дерматофітів.

## ЗАСТОСУВАННЯ

Режим використання	Концентрація
Дезінфекція поверхонь	0,016-0,004%
Дезінфекція санітарно-технічного устаткування	0,032-0,096%
Дезінфекція виробів медичного призначення	0,032-0,064%
Дезінфекція біологічних виділень	0,288%
Дезінфекція об'єктів при проведенні генеральних прибирань	0,016-0,096%

**ФАСУВАННЯ:** коробка 1 кг, банка 1 кг.

**ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ:** 5 років з дати виготовлення.

## Виробник та місце виготовлення:

ТОВ «МДМ», Україна, 08062, Київська обл., Макарівський р-н, с. Пашківка, вул. Кірова, 2  
тел.: (044) 490-59-96, email: office@mdmgroup.com.ua, www.mdmgroup.com.ua

## ТУ У 24.2-34558424-001:2007

Свідоцтво про державну реєстрацію  
№ 05.03.02-08/1012 від 04.11.2014 р.



Management System  
ISO 9001:2008  
www.tuv.com  
ID 01 100 1519054



Сертифікована  
система управління якістю  
ДСТУ ISO 9001:2009