

СЕЧОЗБІРНИК ДЛЯ БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ

Інструкція з використання

Розпряміть латексний сечовий мішок за допомогою води або повітря, щоб запобігти злипанню мішка. Якщо катетер сплющений, просочіть крізь нього теплу воду. Прикріпіть воронку до еластичного поясу як показано на малюнку:



1. Покладіть латексний мішок для сечовиділення еластичний фіксуючий пояс

2. За допомогою кнопок приєднайте мішок для сечовиділення до еластичного поясу



3. Під'єднайте один кінець сечового катетера до мішка для сечовиділення

4. Інший кінець під'єднайте до дренажного мішка



Довжина катетера 95 см

5. Зав'яжіть пояс на талії і прикріпіть до живота трикутну тканину. Потім помістіть уретру в силіконову воронку. Для чоловіків похилого віку використовується пристрій спеціального розміру (пеніс і яєчки можна розмістити всередині ємкості). З'єднайте дві довгі смужки трикутної тканини на поясі.

6. Дренажний мішок для збору сечі – нижній клапан (синій або зелений) повинен бути закритий. Для збору сечі верхній клапан закрийте. Дренажний мішок з сечею повісте на ліжко, а потім підключіть катетер до мішка-воронки.

7. Регулярно перевіряйте наповненість сечею дренажного мішка. Коли відокремлюєте катетер та сечовий мішок, щільно тримайте з'єднувальну трубу сечового мішка. Для спорожнення дренажного мішка, відкрийте клапан (синій або зелений) внизу мішка.

Увага! Пацієнтам із затримкою сечі використовувати заборонено!

Опис:

- Зроблений з високоякісного медичного силікону
- Не викликає алергії
- Попереджає бічні протікання
- Багаторазового використання
- Трусики-бандаж з 100% бавовни, виготовлені з двосторонньої дихаючої тканини

В набір входять:

- Мішок-воронка для сечовиділення - 1 шт.
- Дренажний мішок для сечі (500 мл або 1000 мл) - 2 шт.
- Катетер (приблизно 95 см) - 1 шт.
- Бандаж (90-120 см) – 1 шт.

В наявності моделі:

- чоловічі (пеніс довше 3 см)
- для чоловіків похилого віку (пеніс менше 3 см, пеніс і яєчки можна розмістити всередині ємкості)
- жіночі