

**КАТЕТЕР ТИПУ «БАКРІ» ДЛЯ ТАМПОНАДИ МАТКИ**

Катетер типу «Бакрі» використовується у гінекології для тампонади порожнини матки з метою відновлення функції скорочення матки.

- виготовлено з термопластичного нетоксичного полімеру
- довжина 600 мм
- двохканальна трубка (основний канал і канал для надування балона)
- адаптер Жане на проксимальному кінці основного каналу
- закритий дистальний кінець заокругленої форми
- надувний латексний балон на дистальному кінці
- перфорація дистального кінця до надувного балона у вигляді 2 отворів
- канюля Луєра на проксимальному кінці каналу для надування балона
- контрольний балон на клапані надування
- стерилізований оксидом етилену

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

- містить натуральний латекс, що може спричинити алергічну реакцію
- для професійного використання
- для одноразового застосування
- не використовувати у разі пошкодження упаковки

**ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ** – 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці

**УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ.** Зберігати за температури від 5 до 35 °С і відносній вологості повітря не більше 65 %

**ЗАСТОСУВАННЯ**

- перевірити цілісність індивідуальної упаковки
- одягнути стерильні рукавички
- розпакувати
- обробити піхву і шийку матки антисептиком
- увести катетер у порожнину матки
- надути балон, наповнивши його фізіологічним розчином за допомогою шприця (об'єм вказано у таблиці)
- переконатися, що уся балонна частина катетера повністю знаходиться у межах порожнини матки і шийка балона знаходиться вище входу в матку
- проконтролювати положення катетера за допомогою УЗД
- підтримуючи контакт дистального кінця катетера із дном матки, проксимальний кінець катетера приєднати до трубки резервуару
- поповнювати кількість розчину в резервуарі
- тримати заповнений розчином катетер у порожнині матки з відкритою клемою і стабільним рівнем

розчину в резервуарі ( етап безпосереднього тампонування матки)

- поетапно знижувати висоту розміщення резервуару пропорційно до спонтанного зростання рівня розчину в резервуарі, що виникає у зв'язку з відновленням функції скорочення матки
- спустити балон за допомогою шприця
- вивести катетер
- після використання утилізувати у встановленому порядку

Об'єм балона (мл)	Ch/F	Зовнішній діаметр (мм)
100	18	6,0
300	24	8,0



**ВИРОБНИК:** НВО «Каммед» вул. Крип'якевича 3, м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл., Україна, 32300.

**REF** Номер за каталогом



Дата виготовлення



У разі пошкодження упаковки не використовувати



Повторно не використовувати



Партія



Стерилізовано оксидом етилену



Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією



Сертифікат відповідності технічному регламенту щодо медичних виробів №UA.TR.101-50.156

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.