



## КОВЗАЮЧИЙ РУКАВ

### Інструкція з використання

Ковзаючий рукав - спеціальне пристосування, яке служить для переміщення пацієнтів по поверхні ліжка. Корисний при переміщенні від низу до верху і зверху вниз, в сторони, а також при посадці людини на ліжку. Використовується для полегшення праці доглядаючому за хворим. Можливість переміщення пацієнта з вагою тіла до 130 кг зусиллями однієї людини.

Рукав - це труба, виготовлена з міцної і ковзаючої тканини. Ковзання шарів тканини відносно один одного допомагає рівномірно розподілити вагу пацієнта і безперешкодно переміщати його по будь-якій рівній поверхні, не докладаючи великих зусиль.

#### Показання для застосування ковзаючого рукава:

- Зміна натільної і постільної білизни, гігієнічні процедури.
- Профілактика пролежнів, запалення легенів, тромбозу, контрактури суглобів.
- Повернення пацієнта в зручне положення, якщо він протягом дня "сповзає" вниз.
- Зміна положення лежачого пацієнта за його бажанням або для профілактичних процедур.
- Підготовка хворого до подальшого переміщення.

Склад: 100% поліестер

Щільність тканини (г / м<sup>2</sup>): залежить від партії, 57-115

Розмір рукава: залежить від партії, 65-75 × 90-100 +/- 1-2 см.

#### Рекомендації по догляду і пранню:

- Машинне прання при 30 ° С.
- Заборонено машинна сушка.
- Не прасувати, не відбілювати.

Термін придатності: необмежений

Виробник і продавець: Mediset™ ФОП Корольова Н.М., м. Київ, Україна. Продаж у роздріб та гуртом: +380983165023, mediset.ukraine@gmail.com

