



ВИРОБНИК:
Ultragél Hungary 2000 Kft.
1211 Будапешт
вул. Текерчелю, **12**
Угорщина



ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ **ГЕЛЬ ДЛЯ УЗД**

Гель для УЗД був розроблений для використання під час ультразвукової фізіотерапії та діагностики. Він не містить жирів, не залишає плям, легко розчиняється у воді та видаляється, не висихає, не подразнює шкіру та не пахне. Гель є гіпоалергенним та не містить активних складників, які могли б пошкодити зонд або ехографічне обладнання. Консерванти є нетоксичними і використовуються виключно в рамках закону. Гель не містить солі та формальдегіду.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

- Очистіть та знежиріть шкіру пацієнта.
- Нанесіть необхідну кількість гелю.
- Після закінчення процедури зітріть усі залишки гелю паперовою салфеткою або марлею, змоченою водою.
- Якщо на надчутливій шкірі пацієнта з'явилися ознаки подразнення, припиніть використання гелю.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Тільки для зовнішнього використання.
- Продукт не стерильний.
- Не використовуйте гель на шкірі, що пошкоджена подряпинами, еритемою або ранною.
- Закрийте пляшку після використання.
- Може викликати подразнення або почервоніння у людей, що страждають від алергії.
- При попаданні в очі може викликати подразнення.
- Лікаря з чутливою шкірою необхідно вдягнути захисні рукавички під час використання.

СКЛАДНИКИ: вода, карбомер, гідроокис натрія, EDTA (динатрієва сіль етилендіамінтетраоцтової кислоти), метилізотіазолінон, метилхлороізотіазолінон, бензиловий спирт.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в темному місці при кімнатній температурі. Тримайте упаковку подалі від прямих сонячних променів та джерел УФ випромінювання.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

36 місяців

ГАРАНТІЙНА ЗАЯВА

Ultragel гарантує, що цей продукт відповідає вимогам Директиви 93/42/ЕЕС та був вироблений із додержанням процедур системи якості Ultragel, яка сертифікована на відповідність стандарту ISO 9001:2008.

Штамп Ultragel Hungary 2000 Kft.

Підпис Генерального директора Ultragel Hungary 2000 Ltd.

Mr. Balazs Komaromy

