

Інструкція із застосування медичного виробу

Аплікатори з бавовняною кінцівкою, у транспортній пробірці

№ п/п	Перелік виробів
1	Аплікатор з бавовняною кінцівкою, у транспортній пробірці, дерев'яний стрижень стерильний, одноразового використання
2	Аплікатор з бавовняною кінцівкою, у транспортній пробірці, пластиковий стрижень стерильний, одноразового використання
3	Аплікатор з бавовняною кінцівкою, у транспортній пробірці, металевий стрижень стерильний, одноразового використання

Призначення: Аплікатор з бавовняною кінцівкою у транспортній пробірці призначений для взяття і транспортування зразків біологічного матеріалу в медичні установи для проведення лабораторних досліджень; взяття санітарних змивів; засівання матеріалу на рідкі та щільні поживні середовища та ін.

Характеристики: до складу виробу входять: круглодонна пластикова пробірка (12x150мм), аплікатор з бавовняною кінцівкою, вмонтований в пробку. Аплікатор являє собою гігроскопічний бавовняний тампон, який виготовлено шляхом намотування волокна за спеціальною технологією, що надає йому краплеподібну форму, зафіксований на дерев'яному, пластиковому або металевому стрижні. Розміри аплікатора: 150мм × Ø 2.2мм, діаметр тампона 5мм ± 0.5мм. На етикетці на поверхні пробірки передбачено місце для нанесення персональних даних.

Інструкція із застосування:

1. З дотриманням правил асептики розкрити упаковку.
2. Вилучити аплікатор з упаковки. Медичний виріб готовий до використання.
3. Тримавши аплікатор за край стрижня з пробкою, провести необхідні маніпуляції (відбір необхідної кількості біоматеріалу).
4. Обережно помістити аплікатор в пробірку, не торкаючись її стінок.
5. Направити матеріал в медичну установу за призначенням.
6. Після проведення необхідних маніпуляцій утилізувати виріб відповідно до вимог чинного законодавства.

Застереження:

1. Уникати зволоження, нагрівання та забруднення під час зберігання та транспортування.
2. Виріб призначений лише для використання кваліфікованим медичним персоналом.
3. Не використовувати, якщо пошкоджена упаковка.
4. Використати одразу після відкриття упаковки.
5. Тільки для одноразового використання!

Виріб був стерилізований за допомогою радіаційної стерилізації (R). Апірогенний та нетоксичний.

Термін придатності - 5 років від дати, вказаної на упаковці.

Індивідуальна упаковка.

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 753, про що видано Декларацію про відповідність.

Виробник: Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd.

No.1 Medicine Lane, Renmin Road, Lianyungang, Jiangsu Province, China.

tel: 86-518-85476682, www.suyunmedical.com

Уповноважений представник в Україні: ТОВ "Джей Ес Україна".

Україна, 65078, м. Одеса, вул. Івана та Юрія Лип, 13

(048) 766-91-61; email: jsukraine@ukr.net; www.jsukraine.com.ua