



**ВИРОБНИК:**

**Ultragel Hungary 2000 Kft.**

**1211 Будапешт**

**вул. Текерчелю, 12**

**Угорщина**



**ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ**  
**ГЕЛЬ ДЛЯ ЕКГ**

Гель для ЕКГ розроблений для зменшення опору між шкірою та електродами. Гель для ЕКГ не окислюється, не містить жирів, солі та формальдегіду, не залишає плям, легко розчиняється у воді та видаляється, не висихає, не подразнює шкіру та не пахне. Гель є гіпоалергенним, не залишає осаду на електродах та не містить активних складників, які могли б пошкодити електроди. Консерванти є нетоксичними і використовуються виключно в рамках закону.

**ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ**

- Очистіть та знежиріть шкіру пацієнта.
- Нанесіть необхідну кількість гелю.
- Після закінчення процедури зітріть усі залишки гелю паперовою салфеткою або марлею, змоченою водою.
- Якщо на надчутливій шкірі пацієнта з'явилися ознаки подразнення, припиніть використання гелю.

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

- Тільки для зовнішнього використання.
- Продукт не стерильний.
- Не використовуйте гель на шкірі, що пошкоджена подряпинами, еритемою або ранною.
- Закрийте пляшку після використання.
- Може викликати подразнення або почервоніння у людей, що страждають від алергії.
- При попаданні в очі може викликати подразнення.
- Лікаря з чутливою шкірою необхідно вдягнути захисні рукавички під час використання.

**СКЛАДНИКИ:** вода, карбомер, гідроокис натрія, хлорид натрія, EDTA (динатрієва сіль етилендіамінтетраоцтової кислоти), метилізотіазолінон, метилхлорізотіазолінон, бензиловий спирт.

**УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ**

Зберігати в темному місці при кімнатній температурі. Тримайте упаковку подалі від прямих сонячних променів та джерел УФ випромінювання.

**ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ**

36 місяців

**ГАРАНТІЙНА ЗАЯВА**

Ultragel гарантує, що цей продукт відповідає вимогам Директиви 93/42/ЕЕС та був вироблений із додержанням процедур системи якості Ultragel, яка сертифікована на відповідність стандарту ISO 9001:2008.

Штамп Ultragel Hungary 2000 Kft.

Підпис Генерального директора Ultragel Hungary 2000 Ltd.

Mr. Balazs Komaromy

