

Слуховой аппарат CLEARTONE V100



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый клиент!

Наш прибор — отличное устройство для людей, которые хотят слышать лучше.

Пожалуйста, внимательно прочтите Руководство пользователя перед использованием слухового аппарата. Это поможет вам правильно эксплуатировать и обслуживать устройство, что существенно продлит срок его службы.

Если у вас возникнут вопросы, позвоните в наш Центр обслуживания клиентов. Наши представители обязательно помогут разобраться.

Основная информация о приборе

Название: Слуховой аппарат CLEARSTONE

Модель: V100

Размер: 24,6 x 17,7 x 22,3 мм


Конструкция устройства: Слуховой аппарат состоит из основного блока, аккумулятора и берушей.

Принцип работы: Звуковой сигнал улавливается микрофонами, трансформируется в цифровой сигнал, обрабатывается процессором, переводится обратно в акустический сигнал и передается пользователю через динамик.

Противопоказания: Острый наружный отит, отит, хронический гнойный отит, острый гнойный отит, аллергия на материал.

1

Конструкция

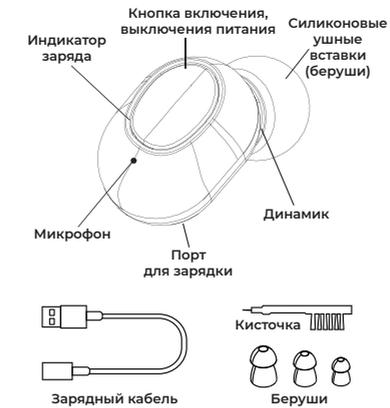

2


Спецификация

Допустимые условия работы устройства	
Температура окружающей среды:	0° - 40°C;
Относительная влажность:	< 80%;
Атмосферное давление:	86кПа - 106кПа;
Рабочее напряжение:	3,7 В;
Электроакустические характеристики прибора	
Максимальный OSPL90:	менее 115 дБ ± 3 дБ;
Уровень звукового давления на выходе (среднее значение высокой частоты):	110 дБ ± 4 дБ;
Полнодиапазонное усиление звука (среднее значение высоких частот):	25 дБ ± 5 дБ;
Эквивалентный уровень входного шума:	29 дБ ± 3 дБ;
Диапазон частотной характеристики (не более чем):	400 Гц - 4700 Гц;
Аккумуляторная Батарея:	Li-ion (литий-ионный аккумулятор);
Емкость:	50 мАч;
Номинальный рабочий ток:	6 мА;

3

Подготовка к работе

Выберите подходящий размер беруши (S, M, L) из комплекта и наденьте их на головку усилителя. Если вы чувствуете, что беруши не вставляются в ушную канал плотно, попробуйте использовать изделие другого размера.

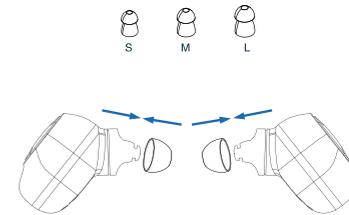

4

Инструкция по эксплуатации

1. Выньте TWS наушники из бокса (зарядного устройства).
2. Выберите подходящий размер беруши (S, M, L) из комплекта и наденьте их на головку прибора.
3. Удерживая слуховой аппарат большим и указательным пальцами, осторожно вставьте ушной вкладыш в слуховой проход.
4. Нажмите кнопку включения и удерживайте ее 3 секунды для того чтобы запустить усилители (как правый, так и левый).

Регулировка громкости

Прибор имеет 5 уровней громкости. Переключение производится следующим образом:

1. Нажмите на клавишу включения и выключения один раз, слуховой аппарат выдаст звуковую команду из двух коротких сигналов. Это значит, что громкость увеличилась на 1 уровень. Когда вы услышите сигналы из трех коротких сигналов, значит вы достигли максимального уровня громкости.

5

2. Снова нажмите на кнопку, слуховой усилитель издаст звуковой сигнал и громкость снова переключается на уровень 1.

Пожалуйста, не закрывайте отверстие микрофона руками при регулировке, иначе прибор будет пищать.

Зарядка слуховых аппаратов

1. Достав TWS наушники из ушей, положите их в бокс (зарядное устройство). Предварительно выключите устройства, нажав клавиши включения/выключения и удерживая их в течение 3 секунд.
2. Поместите слуховые аппараты в зарядную коробку. Загорится цифровой дисплей.
3. Левый и правый наушник начнет заряжаться. При этом загорится зеленый индикатор на приборе с соответствующей стороны.
4. Если зеленый индикатор L и R не горят, это означает, что слуховой аппарат заряжен.

Полная зарядка прибора занимает около часа. Слуховой аппарат может работать на одном полном заряде около 10 часов.

6

Зарядка бокса (зарядного устройства)

Для зарядки бокса используйте адаптер с выходной мощностью не менее 5V (1A).

Подключите зарядный кабель к адаптеру и вставьте его в гнездо USB на задней стороне бокса (зарядного устройства). В это время число на экране загорится и начнет мигать. Когда число достигает 100%, это означает, что зарядное устройство полностью заряжено.

Зарядка бокса (зарядного устройства) обычно занимает не более 2 часов.

Полной зарядки бокса (зарядного устройства) хватает на 5-6 полных зарядок слуховых аппаратов.

7

Рекомендации к использованию

1. Перед тем, как начать пользоваться прибором, необходимо пройти профессиональный осмотр и проверку слуха у врача.
2. Не погружайте устройство в воду. Перед купанием или мытьем волос, снимите слуховой аппарат и положите его в футляр. После купания подождите пока не высохнет слуховой проход и лишь потом устанавливайте прибор.
3. После того как вы снимите слуховой аппарат на ночь, его следует зарядить, избегая воздействия яркого света, высокой температуры и влажности.
4. Внешняя поверхность слухового усилителя должна быть чистой. Также регулярно необходимо чистить беруши от ушной серы.
5. Если во время пользования прибором вы почувствуете дискомфорт, прекратите его использование.
6. Если усилитель звука не используется в течение длительного времени, батарея может разрядиться из-за наличия внутреннего сопротивления. Если прибор не включается, убедитесь, что он полностью заряжен.
7. Запрещается бросать или ронять прибор, так как это может привести к повреждению его внутренних компонентов.
8. Усилитель слуха запрещено использовать при высокочастотной и лучевой терапии, а также в местах, где действуют сильные магнитные поля.
9. Никогда не используйте прибор в потенциально взрывоопасной среде.
10. Слуховой усилитель нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Прибор подлежит утилизации на специализированных станциях.
11. Не позволяйте детям играть с изделием и аксессуарами к нему. Это позволит избежать получения травм или повреждений прибора.

8

Нет звука: что делать?

1. Убедитесь в том, что слуховые аппараты включаются, сигнализируя при зажатии клавиш включения;
2. Отрегулируйте громкость несколько раз, чтобы убедиться, что в приборе есть звук;
3. Перед включением, убедитесь, что устройство полностью заряжено и повторите шаги 1 и 2;
4. Если предыдущие рекомендации не помогли, можно сделать вывод, что слуховой аппарат не работает должным образом или неисправен. В таком случае, обратитесь в центр обслуживания клиентов для помощи и решения вопроса.

Слышите свистящий звук в ухе: что делать?

1. Убедитесь, что слуховой аппарат установлен в ушное отверстие герметично и до конца.
2. Используйте беруши другого размера, убедитесь, что они не деформированы.
3. Убедитесь в отсутствии обильного скопления ушной серы. При необходимости, удалите ее.
4. Убедитесь, что слуховой аппарат расположен правильно (не вверх ногами)

9

Способы транспортировки и хранения

1. Условия транспортировки: противоскользящие, обращаться осторожно. Защитить прибор от воздействия на него прямых солнечных лучей и влаги.
2. Условия хранения: Прибор следует хранить в прохладном и сухом месте.
3. Обращайтесь осторожно, не допускайте механических повреждений или сильного удара прибора.

Комплектация

Слуховой аппарат: 2 шт (L/R)
Бокс (зарядное устройство): 1шт.
Зарядный кабель: 1 шт.
Беруши: комплект S, M, L.
Щетка для чистки: 1
Инструкция по эксплуатации: 1 экз.

Спасибо, что выбрали CLEARSTONE

10