

## Слуховой аппарат CLEARSTONE S30



### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Уважаемый клиент!

Наш прибор — отличное устройство для людей, которые хотят слышать лучше.

Пожалуйста, внимательно прочтите Руководство пользователя перед использованием слухового аппарата. Это поможет вам правильно эксплуатировать и обслуживать устройство, что существенно продлит срок его службы.

Если у вас возникнут вопросы, позвоните в наш Центр обслуживания клиентов. Наши представители обязательно помогут разобраться.

## Основная информация о приборе

**Название:** Слуховой аппарат CLEARSTONE

**Модель:** S30

**Размер:** 55 x 38 x 16 мм

**Конструкция устройства:** Слуховой аппарат состоит из основного блока, аккумулятора и берушей.

**Принцип работы:** Звуковой сигнал улавливается микрофонами, трансформируется в цифровой сигнал, обрабатывается процессором, переводится обратно в акустический сигнал и передается пользователю через динамик.

**Противопоказания:** Острый наружный отит, отит, хронический гнойный отит, острый гнойный отит, аллергия на материал.

1

## Конструкция



Зарядный кабель



Кисточка  
Беруши

2

## Спецификация

Допустимые условия работы устройства	
Температура окружающей среды:	0° - 40°C;
Относительная влажность:	< 80%;
Атмосферное давление:	86кПа - 106кПа;
Рабочее напряжение:	3,7 В;
Электроакустические характеристики прибора	
Максимальный OSPL90:	менее 135 дБ ± 3 дБ;
Уровень звукового давления на выходе (среднее значение высокой частоты):	129 дБ ± 4 дБ;
Полнодиапазонное усиление звука (среднее значение высоких частот):	35 дБ ± 5 дБ;
Эквивалентный уровень входного шума:	32 дБ ± 3 дБ;
Диапазон частотной характеристики (не более чем):	400 Гц - 4700 Гц;
Аккумуляторная Батарея:	Li-ion (литий-ионный аккумулятор);
Емкость:	50 мАч;
Номинальный рабочий ток:	6 мА;

3

## Подготовка к работе


Выберите подходящий размер беруши (S, M, L) из комплекта и наденьте их на головку усилителя.

Если вы чувствуете, что беруши не вставляются в ушной канал плотно, попробуйте использовать изделие другого размера.



4

## Инструкция по эксплуатации

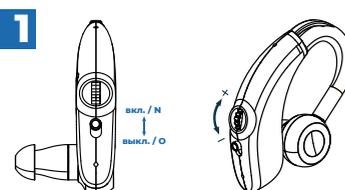

1. Переведите переключатель в положение «Вкл» / «N», чтобы включить слуховой аппарат.

2. При помощи колесика отрегулируйте громкость до комфортного уровня (перед установкой прибора в ушной канал, рекомендуется установить минимальную громкость).

5

3



3. Вращая вакуумную трубку, адаптируйте слуховой аппарат для ношения на левом или правом ухе.

4. Для установки слухового аппарата удерживайте беруши большим и указательным пальцами и аккуратно вставьте в слуховой проход до конца. Для качественной установки беруши, нажмите на заднюю часть уха после чего закрепите слуховой аппарат за ухом.

5. Для зарядки устройства, подключите зарядный кабель в соответствующий разъем на приборе. Если индикатор зарядки светится, значит слуховой аппарат заряжается. Когда индикатор погаснет — устройство полностью заряжено и готово к работе. Перед зарядкой, слуховой аппарат необходимо выключить при помощи переключателя, переведя его в положение «Выкл» / «O»

6

## Рекомендации к использованию

1. Перед тем, как начать пользоваться прибором, необходимо пройти профессиональный осмотр и проверку слуха у врача.
2. Не погружайте устройство в воду. Перед купанием или мытьем волос, снимите слуховой аппарат и положите его в футляр. После купания подождите пока не высохнет слуховой проход и лишь потом устанавливайте прибор.
3. После того как вы снимите слуховой аппарат на ночь, его следует зарядить, избегая воздействия яркого света, высокой температуры и влажности.
4. Внешняя поверхность слухового усилителя должна быть чистой. Также регулярно необходимо чистить беруши от ушной серы.
5. Если во время пользования прибором вы почувствуете дискомфорт, прекратите его использование.

7

6. Если усилитель звука не используется в течение длительного времени, батарея может разрядиться из-за наличия внутреннего сопротивления. Если прибор не включается, убедитесь, что он полностью заряжен.
7. Запрещается бросать или ронять прибор, так как это может привести к повреждению его внутренних компонентов.
8. Усилитель звука запрещено использовать при высокочастотной и лучевой терапии, а также в местах, где действуют сильные магнитные поля.
9. Никогда не используйте прибор в потенциально взрывоопасной среде.
10. Слуховой усилитель нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Прибор подлежит утилизации на специализированных станциях.
11. Не позволяйте детям играть с изделием и аксессуарами к нему. Это позволит избежать получение травм или повреждений прибора.

8

## Нет звука: что делать?

1. Отрегулируйте громкость несколько раз, чтобы убедиться, что в приборе есть звук;
2. Перед включением, убедитесь, что устройство полностью заряжено и повторите шаг 1;
3. Если предыдущие рекомендации не помогли, можно сделать вывод, что слуховой аппарат не работает должным образом или неисправен. В таком случае, обратитесь в центр обслуживания клиентов для помощи и решения вопроса.

## Слышите свистящий звук в ухе: что делать?

1. Убедитесь, что слуховой аппарат установлен в ушное отверстие герметично и до конца.
2. Используйте беруши другого размера, убедитесь, что они не деформированы.
3. Убедитесь в отсутствии обильного скопления ушной серы. При необходимости, удалите ее.
4. Убедитесь, что слуховой аппарат расположен правильно (не вверх ногами)

9

## Способы транспортировки и хранения

1. Условия транспортировки: противоскользящие, обращаться осторожно. Защитить прибор от воздействия на него прямых солнечных лучей и влаги.
2. Условия хранения: Прибор следует хранить в прохладном и сухом месте.
3. Обращайтесь осторожно, не допускайте механических повреждений или сильного удара прибора.

## Комплектация

Слуховой аппарат: 1 шт  
Зарядный кабель: 1 шт.  
Беруши: комплект S, M, L.  
Щетка для чистки: 1  
Инструкция по эксплуатации: 1 экз.

Спасибо, что выбрали CLEARSTONE

10