



## КОВЗАЮЧІ ПРОСТИРАДЛА

### Інструкція з використання

Ковзаючі простирадла - спеціальне пристосування, яке служить для переміщення пацієнтів по поверхні ліжка. Корисний при переміщенні у всіх напрямках, при посадці людини на ліжку, а також для профілактики пролежнів. Принцип дії виробу полягає в особливості тканини і самого виробу, яке має подвійне полотно. За рахунок слизької тканини полотна легко переміщуються одне щодо іншого, нівелюючи вагу пацієнта. По всьому периметру простирадла розташовані петлі, які дозволяють зміщувати пацієнта в будь-якому напрямку. Можливість переміщення пацієнта з вагою тіла до 130 кг зусиллями однієї людини.

#### Застосування

- Обидва полотна в складеному стані розміщуються під спиною хворого, якого перевертають на бік (руки на грудях, ноги зігнуті в колінах), потім перевертають іншим боком на розправлені ділянки ковзаючого простирадла і розкладають нижнє полотно повністю (якщо перекладається на інше ліжко, розстелити на обидва ліжка).
- Переміщення пацієнта відбувається завдяки руху верхнього полотна, яке тягнуть за ручки-скоби в потрібному напрямку. Допускається поворот простирадла відносно один одного на 90 і більше градусів.
- **Після використання простирадло акуратно витягують з-під хворого, оскільки тканина дуже слизька, людина може травмуватися**

#### Показання для застосування ковзаючого рукава:

- Зміна натільної і постільної білизни, гігієнічні процедури.
- Профілактика пролежнів, запалення легенів, тромбозу, контрактури суглобів.
- Повернення пацієнта в зручне положення, якщо він протягом дня "сповзає" вниз.
- Зміна положення лежачого пацієнта за його бажанням або для профілактичних процедур.
- Підготовка хворого до подальшого переміщення.

**Склад:** 100% поліестер

**Розмір простирадла:** в наборі 2 шт.: з ручками 65×180 см., без ручок 130×180 см., в наборі 2 шт.

#### Рекомендації по догляду і пранню:

- Машинне прання від 30°C до 80 °C.
- Заборонена машинна сушка.
- Не прасувати
- Не відбілювати

Термін придатності: необмежений

Продаж у роздріб та гуртом: +380983165023, mediset.ukraine@gmail.com

Виробник і продавець: Mediset<sup>™</sup> ФОП Корольова Н.М., м. Київ, Україна.