

## Інструкція із застосування

Медичний силіконовий пластир від шрамів та рубців Clever Girl®

### Призначення:

Використовується для згладжування та запобігання утворення гіпертрофічних і келоїдних рубців/шрамів, викликаних травмою, опіками та хірургічними операціями. Силіконовий пластир розгладжує, пом'якшує, зменшує почервоніння і вираженість рубців, робить їх менш помітними.

### Протипоказання:

1. Не використовуйте безпосередньо на відкриті рани, які ще не загоїлись та на яких ще залишилась корка. Припиніть використання, якщо є ексудація, запалення або інфекція на ділянці рубця/шрама.
2. Людям, які мають алергічну реакцію або підвищену чутливість до основи пластиру (клеючої речовини) та медичного силіконового гелю, забороняється використання.

**Термін придатності:** 3 роки.

### Метод використання:

1. Пластир можна використовувати, як тільки зажила рана (або через 3 ~ 5 днів після видалення швів).
2. Помийте руки та шрам з милом, потім висушіть.
3. Відкрийте упаковку з медичним силіконовим пластиром та витягніть його, прикладіть пластир до ділянки з рубцем, щоб зазначити ділянку рубця. Переконайтеся, що пластир заходить за межі рубця/шрама на 1 сантиметр. (Для більших ділянок з шрамами, можна використовувати зразу декілька шматочків пластиру, але вони повинні щільно прилягати один до одного).
3. Обережно зніміть полімерний захисний шар, потім прикріпіть пластир липкою стороною на чисту ділянку шраму/рубця та добре розгладьте та притисніть його. Для рубців, що знаходяться на згибах, можна використовувати тонкий еластичний бинт для закріплення та фіксації пластиру під час сну або фізичних вправ.
4. Щоб шкіра звикла до силіконового пластиру, спочатку використовуйте його 4-8 годин на добу. Час використання можна поступово збільшувати до 24 годин.
5. Зазвичай лікувальний курс – один-два місяці. Для застарілих або загрубілих шрамів/рубців силіконовий пластир повинен використовуватися протягом 3-6-ти місяців безперервно, іноді до 1 року.
6. Пластир знімається 1 раз в день для огляду і очищення поверхні шкіри. Після цього, він може бути повторно накладений.
7. Силіконовий пластир зазвичай замінюється кожні 3-7 днів. Втім його можна використовувати поки поверхня пластиру буде залишатися липкою.

Не ковтати. Тримати в місці, недоступному для дітей до трьох років.

Для зовнішнього використання.

Не заморозувати.

**Умови зберігання:** Зберігати при кімнатній температурі та в захищеному від прямого сонячного світла місці.

Дата випуску інструкції:



ТОВ «СИНТЕЗ»

Україна, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Будівельників, 79/117,

Тел.: +38 (04343) 6-74-00

[www.sinteth.com.ua](http://www.sinteth.com.ua)

