



Реабілітаційний тренажер для тренування м'язів розгиначів-згиначів пальців руки і відновлення після травм, інсульту.

Реабілітаційний тренажер для м'якого тренування м'язів розгиначів і згиначів пальців і відновлення після травм, інсульту. Використовується після інсульту, перелому хребців в шийному відділі хребта, ДЦП та ін. Корекція з боку спазмів фаланг кисти рук.

Тренажер дозволяє розробляти пальці рук в активному режимі. У ряді неврологічних захворювань пальці приведені до долоні (стиснуті в кулак). Звичайні тренажери, типу еспандера, в даній ситуації не приносять користі, тому що вони ще більше навантажують м'язи-згиначі, погіршуючи стан пацієнта.

Цей же тренажер дозволяє м'яко тренувати м'язи-розгиначі і згиначі. Постійні тренування повертають рухливість у пальцях, розширюють їх можливості, дозволяють відновити вторичні нейронні зв'язки мозку. Розвиток дрібної моторики пальців прискорює відновлення мови та інших важливих функцій.

Використання тренажера:

- 1) Закріпіть тренажер на зап'ястку
- 2) Налаштуйте пружину для великого пальця під праву чи ліву руку
- 3) Вставте пальці в тримачі для пальців
- 4) Налаштуйте тренажер під свою руку та згідно потрібного навантаження
- 5) Повільно намагайтесь звести всі пальці разом, наче намагаєтесь посолити страву.
- 6) Повільно розігніть пальці

УВАГА! Вправи з даним тренажером повинен надати реабілітолог. Не займайтесь самолікуванням.

У наборі:

- Тренажер з діагональним налаштуванням або без діагонального налаштування* - 1 шт.
*в залежності від артикула

Зроблено в Китаї

Реалізація в Україні: Mediset™ ФОП Корольова Н.М., м. Київ, Україна.

Продаж у роздріб та гуртом:
+380 (97) 858 09 77



Підлаштування по довжині пальців



Налаштування по висоті (регулює рівень навантаження)