

Інструкція

Подушка для перевертання призначена для зручного переміщення на ліжку лежачих та малорухливих пацієнтів під час проведення гігієнічних процедур та процедур з догляду.

Подушка забезпечує переміщення пацієнта перекочуванням. Важіль сили, який створюється виробом, дозволяє ефективно повертати пацієнта, використовуючи незначні фізичні зусилля.

Високі виїмки на верхній частині подушки призначені для м'якої фіксації та розведення ніг у колінній ділянці, завдяки чому з'являється доступ до області промежини, що полегшує проведення гігієнічних процедур.

Використання:

- Подушку завести під коліна
- Поставивши подушку на ребро, встановити вертикально
- Перевертаючи пристрій, притримуйте хворого за плече
- Після виконання необхідних процедур (миття, зміна білизни, одягу, уколи і т.д.), переверніть хворого на спину і приберіть пристрій.

Рекомендації: конструкція виробу призначена для використання людьми з масою тіла не більше 110 кг (для стандартного) або 130 кг (для збільшеного) та/або обхватом стегна (вище за коліно) не більше 60 см (для стандартного) або 75 см (для збільшеного).

Перед повертанням підопічного переконайтеся, що до краю ліжка достатньо місця для повороту на бік без ризику падіння

Не використовуйте на оголеній шкірі, якщо у людини тонка шкіра, або шкіра, схильна до подразрень

Матеріал чохла: ПВХ-тканина

Наповнювач: надщільний поролон

Догляд за виробом:

- Не прати.
- Не замочувати виріб цілком (тільки чохол, що знімається), не занурювати подушку в рідину.
- Не прасувати.
- Для чищення поверхні матеріалу від забруднень використовувати мильні розчини або розчини на спиртовій основі.
- Після обробки дезінфікуючими та миючими засобами необхідно протерти серветкою, змоченою у простій воді.



- Забороняється застосовувати полярні розчинники (ацетон, етилацетат, диметилформамід, бензол, толуол, ксилол тощо), активні хімічні речовини: кислоти та луги, а також абразивні миючі засоби для миття виробу

Розміри (Д*Ш*В, см):

Стандартний:

50*37*13 см, ширина виїмки для ніг - 13,5 см

Збільшений:

60*42*14 см, ширина виїмки для ніг - 17 см

Вироблено в Україні на замовлення Mediset™
ФОП Корольова Н.М., м. Київ, Україна.

Продаж у роздріб та гуртом:

+380 (97) 858 09 77

mediset.ukraine@gmail.com

Сайт: mediset.com.ua