



Складані дворівневі ходунці:
SC4015A
Інструкція

ВСТУП

Дякуємо, що надали перевагу нашій продукції. Будь ласка, уважно ознайомтесь з цією Інструкцією і дотримуйтесь її під час використання виробу.



**Не використовуйте виріб, не ознайомившись з Інструкцією.
Не використовуйте виріб у випадку його пошкодження.
Не намагайтеся внести зміни до конструкції виробу.**

ТМ «OSD» гарантує використання високоякісних матеріалів та контроль виробництва на усіх його стадіях.
Дворівневі ходунці «SC4015A» (далі за паспортом — виріб / ходунці) — рекомендовано для застосування у медичних закладах та вдома.
Виріб розроблено для максимальної зручності та безпеки користувача. Відповідає вимогам європейської Директиви 93/42/ЄЕС виробів медичного призначення.



Виробник залишає за собою право без попереднього повідомлення змінювати будь-які характеристики, зазначені у цій Інструкції. Усі дані, зазначені в Інструкції, наведені для ознайомлення.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що виріб готовий до експлуатації та **НЕ ПОТРЕБУЄ** будь-якого технічного втручання або додаткової модернізації.
- ЗАВЖДИ** перевіряйте технічний стан виробу перед кожним використанням. **ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ**, що усі частини закріплені та міцно зафіксовані. **НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** у випадку зносу або пошкодження.
- ЯКЩО ВІЯВЛЕНО** несправність, то **НЕ ПРОВODЬТЕ** ремонт самостійно. Зверніться до спеціаліста.
- ВЧАСНО** замініуйте наконечники!
- БУДЬТЕ ОБАЧНІ** на нерівних поверхнях.
- НІКОЛИ** не сидіть на ходунцях.
- НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** виріб на сходах та ескаляторах.
- МАКСИМАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ** на виріб — 140 кг. **НІКОЛИ** не перевищуйте допустимий ліміт ваги!
- У ВІПАДКУ** використання виробу різними пацієнтами **РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ** систематично і ретельно мити та дезінфікувати його, щоб уникнути інфекцій.

ТМ «OSD» не гарантує безпеку користувачеві та правильне функціонування виробу, якщо будь-який з оригінальних компонентів був змінений або замінений на неоригінальний.



Використовуйте ходунці тільки у якості опори для рук під час пересування. Не використовуйте ходунці, як інвалідний візок. Максимальне навантаження — 140 кг. Не перевищуйте цей ліміт.


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значення
Різновид:	фіксовані
Конструкція:	складана
Матеріал рами:	алюміній
Матеріал руків'я:	піноматеріал
Ширина, (см):	53
Висота, (см):	від 75 до 85
Вага виробу, (кг):	3,5
Максимальне навантаження, (кг):	140
Гарантія, (міс.):	12

ОСОБЛИВОСТІ

- Міцна алюмінієва конструкція. Легка вага.
- Спеціальна дворівнева конструкція допомагає легко піднятися із сидячого положення.
- Зручні нековзкі накладки на ручках виконані зі спіненого матеріалу.
- Працюють у «фіксованому» режимі.
- 5 рівнів регулювання за висотою залежно від фізіологічних особливостей користувача.
- Гумові наконечники запобігають ковзанню.
- Ходунці складаються, що зручно при зберіганні та транспортуванні.

ВИКОРИСТАННЯ

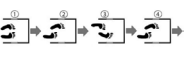

ФІКСОВАНА
КОНСТРУКЦІЯ

Рис. 1

Використання у фіксованому режимі (див. Рис. 1).
Перемістіть ходунці уперед на відстань, що дорівнює Вашому стандартному кроку. Потім, спираючись на них, перемістіть ногу до висуненої уперед частини ходунців, далі — другу ногу. Для переміщення повторіть зазначені вище рекомендації.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Зовнішню поверхню виробу обробляйте дезінфікуючими засобами, зареєстрованими та дозволеними в Україні для дезінфекції поверхонь за режимами, регламентованими діючими документами стосовно застосування дезінфікуючих засобів, затвердженими в установленому порядку.
Завжди тримайте виріб у чистоті для використання протягом тривалого терміну. Очищайте за допомогою води та миючих засобів. Не використовуйте розчинники та абразивні препарати. Протирайте виріб сухою ганчіркою після кожного використання.
ПРИМІТКА: Підприємство-виробник систематично веде роботи з поліпшення конструкції виробу, тому можливі деякі зміни, не зазначені в Інструкції.



Перевіряйте належну якість виробу перед кожним використанням, якщо обладнання використовується не регулярно, то оглядайте його мінімум раз на рік. У разі поломки або несправності, пошкоджень або розривів одного або декількох деталей, НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ виріб.

УМОВИ ГАРАНТІЇ

ТОВ «ОСД Східна Європа» гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу, викладених в Інструкції.

- Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного терміну.
- Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:
 - а) порушення правил експлуатації, викладених в Інструкції;
 - б) за наявності ознак стороннього втручання (спроба самостійного ремонту виробу);
 - в) якщо пристрій використовувався не за призначенням.
- Гарантія не розповсюджується на:
 - а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;
 - б) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин тощо;
 - в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі), неправильне підключення пристрою.
- Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі згідно зі статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів»:

Обмін товару належної якості проводиться за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд (складений в заводську упаковку), споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.

УВАГА: Артикул, технічні характеристики, колір, зовнішній вигляд та комплектація виробів можуть бути змінені виробником без попередження.

Дата продажу: _____ Підпис/Печатка: _____

ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Виріб «SC4015A» відповідає технічним вимогам і визнаний придатним для експлуатації.

Виробник: FOSHAN SUNCARE MEDICAL PRODUCTS CO., LTD. No. 168, Fusheng Rd, Fuwan Industry Area, Gaoming District, Foshan City, Guangdong province, P.R. China / ФОШАН САНКЕА МЕДІКАЛ ПРОДАКТС КО., ЛТД. № 168, Фушенг Рд, Фуван Індустрі Ерія, Гаомінг Дістрікт, Фошан Сіті, Гуандонг Провінс, П.Р. Китай.

Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «ОСД Східна Європа»; адреса: Україна, 03127, м. Київ, пр. 40-Річчя Жовтня, 100/2.

Номер редакції: № 7 від 07.02.2023.

Термін придатності виробу: див. на маркуванні.

Гарантійний термін на виріб «SC4015A»: 12 місяців з дати продажу за умови дотримання правил експлуатації виробу, зазначених в Інструкції.

