



# Ftorcalcit®-E

Сольова система для  
глибокого фторування емалі

## Призначення

Ftorcalcit-E призначений до застосування в стоматологічній практиці для: десенсibilізації шийки зуба, локальної профілактики і лікування карієсу зубної емалі, мінерального запечатування фісур.

## Властивості

Комплект Ftorcalcit-E включає рідину №1 і рідину №2.

Послідовне нанесення рідини №1 і №2 Ftorcalcit-E забезпечує глибоке фторування зубної емалі або кісткового цементу шийки зуба. В наслідок реакції між компонентами рідин утворюється гель кремнієвої кислоти і розподілені у ньому кристали фториду кальцію, магнію і міді. Висока концентрація іонів фтору і міді забезпечує захист зуба від карієсогенних мікроорганізмів, стимулює регенерацію тканин пародонту.

## Спосіб застосування

### Десенсibilізація шийки зуба

Ділянку зуба, яка обробляється, очищають від зубного нальоту за допомогою круглої щітки пастою для клінічного чищення, промивають водою і просушують стисненим повітрям. Шийку зуба протягом 30 секунд рясно змочують ватяним тампоном, просоченим рідиною №1 Ftorcalcit-E. Після цього, не роблячи проміжного полоскання, на шийку зуба наносять рідину №2 Ftorcalcit-E і через 30 секунд проводять полоскання. Процедуру повторюють

ще 2 рази через 1-3 тижні. Надалі процедуру проводять 1-2 рази на рік.

**Увага!** Не допускати попадання рідин в очі!

### Профілактика карієсу шляхом глибокого фторування

Зуби, очищають зубною щіткою, включаючи міжзубний простір. Просушують стисненим повітрям і обробляють поквратно за допомогою тампона, змоченого рідиною №1 Ftorcalcit-E. Потім, не роблячи полоскання, наносять рідину №2 Ftorcalcit-E і через хвилину полощуть рот.

Процедуру проводять 1-2 рази на рік.


### Мінеральна герметизація фісур

Фісури заздалегідь очищають від м'якого нальоту, просушують стисненим повітрям і змочують препаратами, як вказано вище при профілактиці карієсу. Надалі процедуру повторюють 1 раз на рік, не змінюючи спосіб профілактики карієсу методом глибокого фторування.

## Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище +25°C. Після використання матеріали щільно закрити.

ПП "Латус",  
61010, м. Харків,  
вул. Текстильна, 82  
Тел. +380577332697  
[www.latus.com.ua](http://www.latus.com.ua)

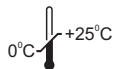

**Тільки для  
професійного  
використання**

