



Инструкция по применению спрей назальный «ЧИСТОНОС® СПРЕЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ»



30 мл (ml)

Состав.

Действующие вещества: морская соль - 0,7%, экстракт календулы - 0,16%.

Вспомогательные вещества: вода, бензоат натрия, лимонная кислота, D-пантенол, фурацилин.

Описание.

Однородная жидкость от светло-желтого до желтого цвета, без посторонних включений и примесей.

Форма выпуска.

Спрей во флаконе полимерном объемом 30 мл (ml). Не менее чем 220 доз.

Свойства.

Действие спрея назального «ЧИСТОНОС® СПРЕЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ» обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.

Основное предполагаемое действие спрея назального «ЧИСТОНОС® СПРЕЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ» в организме или на организм человека не достигается с помощью фармакологических, иммунологических или метаболических средств.

Изотонический раствор морской соли способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа. Улучшает функцию мерцательного эпителия, который усиливает защитные функции слизистой оболочки полости носа и придаточных пазух от попадания болезнетворных бактерий и вирусов.

D-пантенол связывает содержание влаги в слизистой оболочке носа и таким образом оптимально поддерживается эффект морской воды. Во время нахождения в организме превращается в пантотеновую кислоту (витамин B5), которая способствует регенерации и заживлению, а также способствует активизации клеток слизистой.

Фурацилин включен в состав в качестве вспомогательного вещества с целью предупреждения микробной деградации изделия, поддержания количества микроорганизмов на низком безопасном уровне.

Экстракт календулы оказывает противовоспалительное, противомикробное и ранозаживляющее действие. Снимает раздражение и успокаивает слизистую оболочку.

Спрей назальный «ЧИСТОНОС® СПРЕЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ» применяется:

- для ухода за слизистой оболочкой пазух носа при гнойно-воспалительных изменениях в полости носа для восстановления и защиты физиологических функций слизистой оболочки;
- для профилактики инфекций полости носа, в том числе и гриппа;
- детьми, которые страдают проблемами носового дыхания, сухостью слизистой оболочки носа, наличием в носу корочек, с целью восстановления физиологических функций оболочки носа.

Способ применения.

Для восстановления функций слизистой оболочки носа при острых и хронических нарушениях носового дыхания:

- детям с 3-х лет – по рекомендации врача;
- детям с 6 до 9 лет – 2-4 раза в сутки;
- детям с 9 до 12 лет – 4-6 раз в сутки по 2 впрыскивания.

Для профилактики инфекций:

- детям с 3-х лет – по рекомендации врача;
- детям с 6 до 9 лет – 2 раза в сутки;
- детям с 9 до 12 лет – 3-4 раза в сутки по 1 впрыскиванию.

Для размягчения и удаления носовых выделений использовать 2-3 раза в сутки по 2 впрыскивания в каждый носовой ход, пока скопления носовых выделений, которые отложились в носовом проходе, не будут размягчены и удалены.

Особенности применения.

Это средство можно применять детям в возрасте от 6 лет. Применение детям разрешается только в присутствии взрослых.

Спрей назальный «ЧИСТОНОС® СПРЕЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ» не влияет на скорость психомоторных реакций.

Для предупреждения распространения инфекции не следует пользоваться одним флаконом несколькими лицам.

Нельзя применять это средство лицам с индивидуальной повышенной чувствительностью к его компонентам.

Срок годности.

Смотреть на упаковке.

Условия хранения.

Хранить при температуре от +5 °C до +25 °C в защищенном от света и недоступном для детей месте.

Не следует применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Производитель.
ООО «Георг Биосистемы».

Ул. Вокзальная, д. 3, пгт Побугское, Голованевский район, Кировоградская обл., 26555, Украина.

Адрес производства.

Ул. Дорожная, 64Б, г. Каменское, Днепропетровская обл., 51905, Украина.

Тел.: 0 800 501 161. **E-mail:** contact@georgbio.com

www.georgbio.com

ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ УКАЗАННЫХ НА МАРКИРОВКЕ:

	Использовать до
	Номер партии
	Производитель
	Дата производства
	Ограничения температуры
	Инструкция по применению
	Знак соответствия техническим регламентам
	Оберегать от солнечного света

Во избежание подделок в оригинальную упаковку средства, в дополнение к инструкции по применению, вложен листок-вкладыш с уникальным кодом.

Сторона 1	Сторона 2
	AA 00 00 00 00



Інструкція із застосування спрей назальний «ЧИСТОНОС® СПРЕЙ ДЛЯ ДІТЕЙ»



30 мл (ml)

Склад.

Діючі речовини: морська сіль – 0,7%, екстракт календули – 0,16%.

Допоміжні речовини: вода, бензоат натрію, лимонна кислота, D-пантенол, фурацилін.

Опис.

Однорідна рідина від світло-жовтого до жовтого кольору, без сторонніх включень та домішок.

Форма випуску.

Спрей у флаконі полімерному місткістю 30 мл (ml). Не менше ніж 220 доз.

Властивості.

Дія спрею назального «ЧИСТОНОС® СПРЕЙ ДЛЯ ДІТЕЙ» зумовлена властивостями компонентів, що входять до його складу.

Основна передбачувана дія спрею назального «ЧИСТОНОС® СПРЕЙ ДЛЯ ДІТЕЙ» в організмі або на організм людини не досягається за допомогою фармакологічних, імунологічних або метаболічних засобів.

Ізотонічний розчин морської солі сприяє підтримці нормального фізіологічного стану слизової оболонки порожнини носа. Покращує функцію миготливого епітелію, який підсилює захисні функції слизової оболонки порожнини носа і придаткових пазух від попадання хвороботворних бактерій і вірусів.

D-пантенол пов'язує вміст вологи в слизовій оболонці носа і таким чином оптимально підтримується ефект морської води. Під час знаходження в організмі перетворюється на пантотенову кислоту (вітамін B5), яка сприяє регенерації і загоєнню, а також сприяє активізації клітин слизової.

Фурацилін включено до складу в якості допоміжної речовини з метою попередження мікробної деградації виробу, підтримки кількості мікроорганізмів на низькому безпечному рівні.

Екстракт календули надає протизапальну, протимікробну і ранозагоєвальну дію. Знімає подразнення і заспокоює слизову оболонку.

Спрей назальний «ЧИСТОНОС® СПРЕЙ ДЛЯ ДІТЕЙ» застосовується:

- для догляду за слизовою оболонкою пазух носа при гнійно-запальних змінах у порожнині носа для відновлення і захисту фізіологічних функцій слизової оболонки;
- для профілактики інфекцій порожнини носа, у тому числі і грипу;
- дітям, котрі страждають проблемами носового дихання, сухістю слизової оболонки носа, наявністю в носі скориночок, з метою відновлення фізіологічних функцій оболонки носа.

Спосіб застосування.

Для відновлення функцій слизової оболонки носа при гострих та хронічних порушеннях носового дихання:

- дітям з 3-х років – за рекомендацією лікаря;
- дітям з 6 до 9 років – 2-4 рази на добу;
- дітям з 9 до 12 років – 4-6 разів на добу по 2 впорскування.

Для профілактики інфекцій:

- дітям з 3-х років – за рекомендацією лікаря;
- дітям з 6 до 9 років – 2 рази на добу;
- дітям з 9 до 12 років – 3-4 рази на добу по 1 впорскуванню.

Для розм'якшення та видалення носових виділень використовувати 2-3 рази на добу по 2 впорскування у кожний носовий хід, доки скупчення носових виділень, що відклись у носовому проході, не будуть розм'якшені та видалені.

Особливості застосування.

Цей засіб можна застосовувати дітям віком від 6 років. Застосування дітям дозволяється тільки в присутності дорослих осіб.

Спрей назальний «ЧИСТОНОС® СПРЕЙ ДЛЯ ДІТЕЙ» не впливає на швидкість психомоторних реакцій.

Для попередження поширення інфекції не слід користуватися одним флаконом кільком особам.

Не можна застосовувати цей засіб особам із індивідуальною підвищеною чутливістю до його компонентів.

Термін придатності.

Дивитися на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі від +5 °С до +25 °С в захищеному від світла та недоступному для дітей місці.

Не слід застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Виробник.

ТОВ «ГЕОРГ Біосистеми»,
Вул. Вокзальна, буд. 3, смт Побузьке, Голованівський район,
Кіровоградська обл., 26555, Україна.

Адреса виробництва.

Вул. Дорожна, 64Б, м. Кам'янське, Дніпропетровська обл.,
51905, Україна.

Тел.: 0 800 501 161. E-mail: contact@georgbio.com

www.georgbio.com

ЗНАЧЕННЯ СИМВОЛІВ НАВЕДЕНИХ НА МАРКУВАННІ:

	Використати до
	Номер партії
	Виробник
	Дата виготовлення
	Обмеження температури
	Інструкція із використання
	Знак відповідності технічним регламентам
	Оберегти від сонячного світла

Для запобігання підробок в оригінальну упаковку засобу, на додаток до інструкції із застосування, вкладено листок-вкладку з унікальним кодом.

Сторона 1	Сторона 2
	AA 00 00 00 00 00