




Інструкція із застосування спрей назальний **СИНУС ЛІФТ®** АКТИВ СПРЕЙ

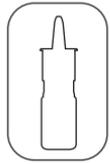

10 мл (ml)

Склад.

Діючі речовини: сухий екстракт цикламену європейського – 2,6% (рідкого 41,6%).

Допоміжні речовини: вода, карбомер, натрію гідроокис, метилпарабен, бензоат натрію, тіосульфат натрію.

Опис.

Гелеподібна маса від світло-жовтого до жовто-коричневого кольору, без сторонніх включень. Допускається слабовиражена зерниста текстура.

Форма випуску.

Спрей у флаконі полімерному місткістю 10 мл (ml).

Властивості.

Дія спрею назального «СИНУС ЛІФТ® АКТИВ СПРЕЙ» зумовлена властивостями компонентів, що входять до складу.

Основна передбачувана дія спрею назального «СИНУС ЛІФТ® АКТИВ СПРЕЙ» в організмі або на організм людини не досягається за допомогою фармакологічних, імунологічних або метаболічних засобів.

Екстракт цикламену європейського допомагає відновити комфортне носове дихання завдяки комплексному впливу на слизову оболонку носа. Його ефективність забезпечують біологічно активні речовини – високоочищені сапоніни. Вони сприяють:

- відновленню прохідності пазух носа;
- усуненню запалення та набряку;
- нормалізації водно-сольового балансу слизової оболонки.

Карбомер виконує роль загущувача і гелеутворювача.


Тіосульфат натрію застосовується як антиоксидант.

Спрей назальний «СИНУС ЛІФТ® АКТИВ СПРЕЙ» застосовується:


- для очищення і захисту фізіологічних функцій слизової оболонки пазух носа при гнійно-запальних процесах;
- для відновлення комфортного носового дихання і функцій слизової оболонки порожнини носа, порушених внаслідок гнійно-запальних змін придаткових пазух носа та активних лікувальних заходів.



мал. 1

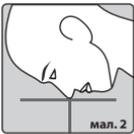

мал. 2

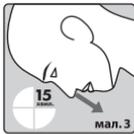

мал. 3

Спосіб застосування.

В кожний новий хід робити по 1-2 впрыску спрею (мал. 1). Рекомендується після цього через 1-2 хвилини нахилити голову донизу на 10-15 хвилин так, щоб кінець носа був самою нижньою точкою положення голови (мал. 2), та протягом всього цього часу повільно продувати обидві половини носа, не затискаючи ніс (мал. 3). При такому положенні голови вміст всіх пазух носа спорозниється, тому можливі значні виділення з носа. Процедура проводиться не більше, ніж 2 рази на добу. Дітям з 6 до 12 років застосування можливе після консультації лікаря.

Особливості застосування.

Курс застосування не більше 7 днів. Під час застосування можливе короточасне відчуття слабкого печіння у носоглотці, рефлекторні явища у вигляді слинотечі, рідше короточасні слюзотечі. В жодному з вказаних випадків немає потреби у припиненні застосування.

УНИКАТИ ПОПАДАННЯ СПРЕЮ В ОЧІ. ІНТЕНСИВНО НЕ ВДИХАТИ ОДНОЧАСНО З ВВЕДЕННЯМ СПРЕЮ.

Цей засіб можна застосовувати дітям віком від 12 років. Застосування дітям дозволяється тільки в присутності дорослих осіб.

Спрей назальний «СИНУС ЛІФТ® АКТИВ СПРЕЙ» не впливає на швидкість психомоторних реакцій.

Для попередження поширення інфекції не слід користуватися одним флаконом кільком особам.

Не можна застосовувати цей засіб особам із індивідуальною підвищеною чутливістю до його компонентів.

Термін придатності.

Дивитися на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі від +5 °C до +25 °C в захищеному від світла та недоступному для дітей місці. Не слід застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Виробник.

ТОВ «Георг Біосистеми».

Вул. Вокзальна, буд. 3, смт Побузьке, Голованівський район, Кіровоградська обл., 26555, Україна.

Адреса виробництва.

Вул. Дорожна, 64Б, м. Кам'янське, Дніпропетровська обл., 51905, Україна.

Тел.: 0 800 501 161. E-mail: contact@georgbio.com

www.georgbio.com

ЗНАЧЕННЯ СИМВОЛІВ НАВЕДЕНИХ НА МАРКУВАННІ:

	Використати до
	Номер партії
	Виробник
	Дата виготовлення
	Обмеження температури
	Інструкція із використання
	Знак відповідності технічним регламентам
	Оберігати від сонячного світла

Для запобігання підробок в оригінальну упаковку засобу, на додаток до інструкції із застосування, вкладено листок-вкладку з унікальним кодом.

Сторона 1	Сторона 2
	AA 00 00 00 00 00


Дата останнього перегляду інструкції із застосування: 21.09.2022

Georg BioSystems®

www.gaimorit.com.ua



Инструкция по применению спрей назальный **СИНУС ЛИФТ®** АКТИВ СПРЕЙ

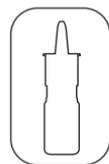

10 мл (ml)

Состав.

Действующие вещества: сухой экстракт цикламена европейского - 2,6% (жидкого 41,6%).

Вспомогательные вещества: вода, карбомер, натрия гидроокись, метилпарабен, бензоат натрия, тиосульфат натрия.

Описание.

Гелеобразная масса от светло-желтого до желто-коричневого цвета, без посторонних включений. Допускается слабовыраженная зернистая текстура.

Форма выпуска.

Спрей во флаконе полимерном объемом 10 мл (ml).

Свойства.

Действие спрея назального «СИНУС ЛИФТ® АКТИВ СПРЕЙ» обусловлено свойствами компонентов, входящих в состав.

Основное предполагаемое действие спрея назального «СИНУС ЛИФТ® АКТИВ СПРЕЙ» в организме или на организм человека не достигается с помощью фармакологических, иммунологических или метаболических средств.

Экстракт цикламена европейского помогает восстановить комфортное носовое дыхание благодаря комплексному влиянию на слизистую оболочку носа. Его эффективность обеспечивают биологически активные вещества – высокоочищенные сапонины.

Они способствуют:

- восстановлению проходимости пазух носа;
- устранению воспаления и отека;
- нормализации водно-солевого баланса слизистой оболочки.

Карбомер выполняет роль загустителя и гелеобразователя.

Тиосульфат натрия применяется как антиоксидант.

Спрей назальный «СИНУС ЛИФТ® АКТИВ СПРЕЙ» применяется:

- для очищения и защиты физиологических функций слизистой оболочки пазух носа при гнойно-воспалительных процессах;
- для восстановления комфортного носового дыхания и функций слизистой оболочки полости носа, нарушенных в результате гнойно-воспалительных изменений придаточных пазух носа и активных лечебных мероприятий.

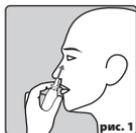


рис. 1

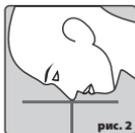


рис. 2

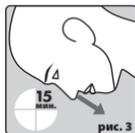


рис. 3

Способ применения.

В каждый носовой ход делать по 1-2 впрыскивания спрея (рис.1). Рекомендуется после этого через 1-2 минуты наклонить голову вниз на 10-15 минут так, чтобы кончик носа был самой нижней точкой положения головы (рис. 2), и в течение всего этого времени медленно продвуть обе половины носа, не зажимая нос (рис. 3). При таком положении головы содержимое всех пазух носа опорожняется, поэтому возможны значительные выделения из носа. Процедуру проводить не более, чем 2 раза в сутки. Детям с 6 до 12 лет применение возможно после консультации врача.

Особенности применения.

Курс применения не более 7 дней. При применении возможно кратковременное ощущение слабого жжения в носоглотке, рефлекторные явления в виде слюнотечения, реже кратковременные слезотечения. Ни в одном из указанных случаев нет необходимости в прекращении применения.

ИЗБЕГАТЬ ПОПАДАНИЯ СПРЕЯ В ГЛАЗА. ИНТЕНСИВНО НЕ ВДЫХАТЬ ОДНОВРЕМЕННО С ВВЕДЕНИЕМ СПРЕЯ.

Это средство можно применять детям в возрасте от 12 лет.

Применение детям разрешается только в присутствии взрослых.

Спрей назальный «СИНУС ЛИФТ® АКТИВ СПРЕЙ» не влияет на скорость психомоторных реакций.

Для предупреждения распространения инфекции не следует пользоваться одним флаконом несколькими лицам.

Нельзя применять это средство лицам с индивидуальной повышенной чувствительностью к его компонентам.

Срок годности.

Смотреть на упаковке.

Условия хранения.

Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте. Не следует применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Производитель.

ООО «Георг Биосистемы».

Ул. Вокзальная, д. 3, пгт Побугское, Голованевский район, Кировоградская обл., 26555, Украина.

Адрес производства.

Ул. Дорожная, 64Б, г. Каменское, Днепропетровская обл., 51905, Украина.

Тел.: 0 800 501 161. E-mail: contact@georgbio.com
www.georgbio.com

ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ УКАЗАННЫХ НА МАРКИРОВКЕ:

	Использовать до
	Номер партии
	Производитель
	Дата изготовления
	Ограничения температуры
	Инструкция по применению
	Знак соответствия техническим регламентам
	Оберегать от солнечного света

Во избежание подделок в оригинальную упаковку средства, в дополнение к инструкции по применению, вложен листок-вкладыш с уникальным кодом.

Сторона 1	Сторона 2
	AA 00 00 00 00 00

Georg BioSystems

www.gaimorit.com.ua

Дата последнего пересмотра инструкции по применению: 21.09.2022