

## Комплекти духових трубок TELINJECT

Духові трубки TELINJECT доступні в 3 різних діаметрах і 3 різних довжинах.

Залежно від того, яку трубку та шприц TELINJECT ви використовуєте, можливі постріли на відстані до 20 м.


Наші мундштуки виготовлені з легких сплавів з гладкою поверхнею або з вуглецевої трубки, що дозволяє шприцу прискорюватися майже без тертя і безперервно. Завдяки цьому гарантується надзвичайна точність і бездоганна результативність стрільби.

Вовняні стабілізатори в продувній трубці B516 (B516V) повинні бути замінені на пластикові адаптери/стабілізатори для шприців.

У таблиці нижче перераховані відповідні мундштуки та тренувальне обладнання для різних діаметрів трубок.

Комплект Blowpipe	ВЕТЕРИНАРНА ПРАКТИКА	OVERSEA 2m	FARMER	UNIVERSAL	HIGH DISTANCE 2m
Артикул	SET 31.C	SET 32T.C	SET 515.C	SET 516	SET 516/B
Духова трубка з мундштуком	B31.C 1m, Ø 11 mm	B32T.C 1+1 m, Ø 11 mm	B515.C 1m, Ø 14 mm	B516R 1m, Ø 16 mm	B516R+B516V 1+1 m, Ø 16 mm
Довжина (m)	1	1 + 1	1,5	1	1 + 1
Дальність (m)	6 – 8	10 – 12	8 – 12	10 – 12	12 – 15
Калібр (mm)	11	11	14	16	16
Мундштук	MU11	MU11	MU13	MU20	MU20
Об'єм шприца (мл)	1, 2, 3	1, 2, 3	5	1, 2, 3, 5	1, 2, 3, 5
Тренувальний дротик	U30B	U30B	–	U30B + STAB6B	U30B + STAB6B

### Збирання розібраної 2-метрової повітродувної труби (B32T, B516R+B516V)

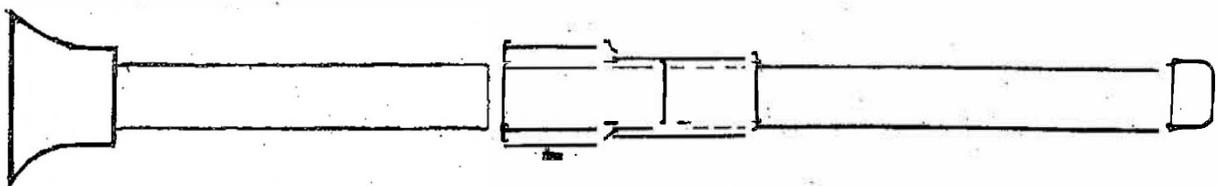

Обидві частини довжиною 1 м вставляються одна в одну на корпусі муфти і фіксуються бічним гвинтом

### **Інструкція з використання**

- Перед кожним використанням пропустити засіб для сухого чищення через трубку. Для цього спочатку опустіть інструмент для чищення з латунним грузилом в трубку. Потягніть за грузило на інший кінець трубки, таким чином просуваючи вовняну щітку через трубку.
- Проштовхніть весь шприц в трубку за допомогою штока.
- Сфокусуйтеся на мішені, розставивши ноги, злегка нахиливши верхню частину тулуба, зігнувши руки і міцно тримаючи мундштук.
- Цільтеся обома очима, таким чином, щоб кінець трубки і мішень були на одній лінії. На більшій відстані потрібно цілитися трохи вище. При використанні 2-метрової дудки більшої точності прицілювання можна досягти, якщо притулити дудку до когось або чогось (наприклад, до плеча асистента).
- Безпосередньо перед пострілом зробіть глибокий вдих, затримайте дихання і ретельно закрийте кінець трубки кінчиком язика. Додатково притисніть губи рукою, щоб запобігти втраті повітря під час видування. Нарешті, дуже швидко витягніть язик назад, щоб видути шприц з мундштука з максимальною силою.

### **Можливі помилки у поводженні з трубкою.**

Дути як на трубі, дути занадто коротко, недостатньо сильно притискати мундштук до рота, примружувати ліве око, коли цілишся в мундштук.

### **Тренувальне обладнання**

Як і в багатьох сферах життя, тільки практика робить нас досконалими. Тому ми рекомендуємо вам зробити кілька тренувальних пострілів у тренувальну мішень (наприклад, солону, матрац) не тільки перед першим, але й перед кожним наступним використанням. Для точного налаштування особливо підходять тренувальні дротики, балістика яких подібна до наповненого 3 мл шприца з трубкою (S30B), або шприци з трубкою, наповнені дистильованою водою і використовувані з тренувальною голкою.

### **Обслуговування**

Незважаючи на те, що трубки відносно міцні, їх слід очищати за допомогою сухого інструменту після кожного використання. Вологість і бруд з часом пошкоджують трубки і призводять до погіршення результатів стрільби. Завжди розбирайте частини трубки для зберігання. Оптимальний захист при зберіганні та транспортуванні забезпечує чохол для мундштука (SAFEH).

**TELINJECT GmbH - 35 років без стресових дистанційних ін'єкцій для тварин**