



### Інструкція з використання

#### Професійний засіб «ONclean tableware» («ONclean посуд»)

Цей засіб розроблений і виготовлений у відповідності з основними вимогами Технічного регламенту щодо медичних виробів України і для цього пристрою застосовувалися процедури Додатку 8 для маркування знаком відповідності.



**УВАГА!** Перед використанням засобу ознайомтесь з Інструкцією.

**УВАГА!** Використовуйте засіб лише за призначенням.

**УВАГА!** Всі роботи з засобом слід проводити в захисних гумових рукавичках, уникати попадання в очі та на шкіру.

#### ПРИЗНАЧЕННЯ:

Засіб для ручного миття посуду «ONclean tableware» («ONclean посуд») (далі – засіб) призначений для якісного миття лабораторного, медичного та побутового посуду в побуті, у лікувально-профілактичних установах різного профілю, на підприємствах різного виду діяльності, дитячих дошкільних та навчальних закладах, комунальному господарстві, ресторанному господарстві, харчовій промисловості, систем автосервісу, на всіх видах транспорту тощо для дотримання гігієнічних норм та виключення ризику випадкового інфікування.

**ОПИС:** Тягуча речовина у вигляді концентрату або готового до використання розчину для якісного миття посуду, ефективно видаляє жир та плями, утворює стійку піну, що дає можливість за допомогою однієї дози засобу вимити велику кількість брудного посуду, легко обполіскується, не залишає мильної плівки.

**СКЛАД:** вода, аніонні ПАВ 5-15%, неіонні ПАВ <5%, хлорид натрію <5%, запашка, барвник.

#### КОМПЛЕКТНІСТЬ:

1. Каністра 5000 мл
2. Інструкція з використання.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зовнішній вигляд: Однорідна в'язка рідина без сторонніх включень .

Колір: Використаного барвника.

Запах: Використаної запашки.

Показник рН: 6,4.

Термін експлуатації – 2 роки.

### ЗРАЗОК МАРКУВАННЯ:

**ONCLEAN TABLEWARE**

Професійний засіб «ONclean посуд»

**ЗАСІБ ДЛЯ МИТТЯ ПОСУДУ**

Склад: вода, аніонні ПАВ 5-15%, неіонні ПАВ <5%, хлорид натрію <5%, запашка, барвник.

Засіб зберігають в оригінальній упаковці подалі від нагрівальних приладів і прямого сонячного проміння при температурі від +5°C до +25°C. Термін зберігання – 2 роки з дати виготовлення. Використовувати згідно з інструкцією по застосуванню.

ТОВ «Бланідас», Україна,  
02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, 15А,  
тел.: 0 800 33 15 02  
help@lysoform.ua lysoform.ua

LOT xx.xx.xxxx

Об'єм:  
**5000**  
мл±0,5%

рН 6,4

Спосіб використання:

- Концентрат 1 ml/1 l води
- Або нанести на губку декілька крапель концентрату
- Помити
- Ополоснути

Рекомендовано для медичного клінінгу

МЕДИЧНИЙ КЛІНІНГ

**СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:** Для миття посуду у проточній воді нанести декілька крапель засобу на губку. Для миття посуду у емності додати у теплу воду рекомендовану кількість концентрату (див. табл. 1). Після миття посуд ретельно промити під проточною холодною водою і залишити до повного висихання.

**Таблиця №1. Приготування робочих розчинів**

Концентрація засобу, %	Кількість засобу, мл	Кількість води, мл	Спосіб обробки
0,1	1	999,0	Миття у ємності

**ЗБЕРІГАННЯ:**

Зберігати засіб потрібно в оригінальній упаковці, на стелажах у приміщенні, що вентилується при температурі від +5°C до +25°C та відносній вологості повітря 30 - 80% ±10%, подалі від нагрівальних приладів і прямого сонячного проміння в захищеному від потрапляння пилу і механічних навантажень.

**УТИЛІЗУВАННЯ:**

Пакування та залишки засобу потрібно утилізувати відповідно до діючих санітарно-гігієнічних норм: ДСанПіН «Про затвердження Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами» Наказ МОЗ від 08.06.2015 № 325.

**ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА:**

Виробник гарантує термін придатності для експлуатації засобу - 2 роки з дати виробництва при дотриманні умов і правил експлуатування, транспортування і зберігання.

**ВИРОБНИК:**

ТОВ «Бланідас», 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, 15А, Тел/Факс: 0 800 33 15 02; e-mail: help@lysoform.ua