



## Інструкція з використання Професійний засіб «ONclean surface» («ONclean поверхня»)

Цей засіб розроблений і виготовлений у відповідності з основними вимогами Технічного регламенту щодо медичних виробів України і для цього пристрою застосовувалися процедури Додатку 8 для маркування знаком відповідності.



**УВАГА! Перед використанням засобу ознайомтесь з Інструкцією.**

**УВАГА! Використовуйте засіб лише за призначенням.**

**УВАГА! Всі роботи з засобом слід проводити в захисних гумових рукавичках, уникати попадання в очі та на шкіру.**

### **ПРИЗНАЧЕННЯ:**

Професійний засіб «ONclean surface» («ONclean поверхня») (далі – засіб) призначений для якісного очищення усіх видів поверхонь (підлоги, стін, меблів, медичних та робочих поверхонь) в лікувальних закладах різного профілю, на підприємствах фармацевтичної, хімічної, біотехнологічної, мікробіологічної промисловості для дотримання гігієнічних норм та виключення ризику випадкового інфікування.

**ОПИС:** Концентрований розчину для якісного очищення усіх видів поверхонь. Очищує поверхню від будь-якого забруднення з мінімальним дозуванням засобу, не залишає брудних розводів, не містить фосфатів та інших шкідливих речовин. Засіб не містить небезпечних для здоров'я людей та тварин речовин, не завдає шкоди довкіллю.

**СКЛАД:** суміш неіоногенних ПАВ 5-15%, катіонні ПАВ<5%, інгібітор корозії, запашка, барвник, вода.

### **КОМПЛЕКТНІСТЬ:**

1. Каністра 5000 мл;
2. Інструкція з використання.

### **ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Зовнішній вигляд: однорідна рідина без сторонніх включень.

Колір: використаного барвника.

Запах: використаної запашки.

Показник рН: 7,5.

Термін експлуатації – 2 роки.

## ЗРАЗОК МАРКУВАННЯ:



Професійний засіб «ONclean поверхня»

### ЗАСІБ ДЛЯ МИТТЯ ВСІХ ВИДІВ ПОВЕРХОНЬ

**Склад:** суміш неіонегенних ПАВ 5–15%, катіонні ПАВ < 5%,  
інгібітор корозії, запашка, барвник, вода.  
Засіб зберігають в оригінальній упаковці подалі від  
нагрівальних приладів і прямого сонячного проміння  
при температурі від +5°C до +25°C.  
Термін зберігання – 2 роки з дати виготовлення.  
Використовувати згідно з інструкцією по застосуванню.

Рекомендовано для  
медичного клінінгу



**СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:** Розчинити рекомендовану кількість засобу (див. таб. 1) у ємності з водою кімнатної температури та помити поверхню робочим розчином засобу. Для точного і гігієнічного дозування використовувати Станцію OnClean для автоматичного дозування дезінфікуючих та мийних засобів. Приготований робочий розчин можливо перелити у ємності для попереднього замочування мопів або відра та використовувати за призначенням. Для цього слід ретельно протерти забруднену поверхню mopом, змоченим у робочому розчині.

**Таблиця №1. Приготування робочих розчинів засобу.**

Концентрація засобу, %	Кількість засобу, мл	Кількість води, мл
0,5	50	9950,0
1	100	9900,0

**УВАГА!** Поверхні, які контактують з харчовими продуктами, після обробки, необхідно ретельно змити водою.

**УВАГА!** При попаданні в очі та на шкіру концентрованого засобу слід промити місця попадання водою.

**ЗБЕРІГАННЯ:**

Зберігати засіб потрібно в оригінальній упаковці, на стелажах у приміщенні, що вентилюється при температурі від +5°C до +25°C та відносній вологості повітря 30 - 80% ±10%, подалі від нагрівальних приладів і прямого сонячного проміння в захищеному від потрапляння пилу і механічних навантажень.

**УТИЛІЗУВАННЯ:**

Пакування та залишки засобу потрібно утилізувати відповідно до діючих санітарно-гігієнічних норм: ДСанПіН «Про затвердження Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами» Наказ МОЗ від 08.06.2015 № 325.

**ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА:**

Виробник гарантує термін придатності для експлуатації засобу - 2 роки з дати виробництва при дотриманні умов і правил експлуатування, транспортування і зберігання.

**ВИРОБНИК:**

ТОВ «Бланідас», 02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, буд. 15А, Тел/Факс: 0 800 33 15 02; e-mail: help@lysoform.ua