



Інструкція з використання

Професійний засіб «ONclean glass» («ONclean скло»)

Цей засіб розроблений і виготовлений у відповідності з основними вимогами Технічного регламенту щодо медичних виробів України і для цього пристрою застосовувалися процедури Додатку 8 для маркування знаком відповідності.



УВАГА! Перед використанням засобу ознайомтесь з Інструкцією.

УВАГА! Використовуйте засіб лише за призначенням.

УВАГА! Всі роботи з засобом слід проводити в захисних гумових рукавичках, уникати попадання в очі та на шкіру.

ПРИЗНАЧЕННЯ:

Професійний засіб «ONclean glass» («ONclean скло») (далі – засіб) призначений для якісного очищення скляного лабораторного та медичного посуду, скляних та дзеркальних поверхонь в лікувальних установах різного профілю, на підприємствах фармацевтичної, хімічної, біотехнологічної, мікробіологічної промисловості для дотримання гігієнічних норм та виключення ризику випадкового інфікування.

ОПИС: Концентрована рідина, яка швидко та якісно видаляє забруднення, має приємний запах та нейтральний рН, швидко висихає, залишає поверхні чистими і блискучими без плям і розводів, засіб зручний у використанні.

СКЛАД: вода, органічний розчинник 15-30%, аніонні ПАР <5%, барвник, запашка, консервант.

КОМПЛЕКТНІСТЬ:

1. Каністра 5000 мл;
2. Інструкція з використання.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зовнішній вигляд: однорідна рідина без сторонніх включень.

Колір: використаного барвника.

Запах: використаної запашки.
Показник рН: 7,3.

ЗРАЗОК МАРКУВАННЯ:

ONclean GLASS

Професійний засіб «ONclean скло»
ЗАСІБ ДЛЯ МИТТЯ СКЛЯНИХ ПОВЕРХОНЬ

Рекомендовано для медичного клінінгу
МЕДИЧНИЙ КЛІНІНГ

Склад: вода, органічний розчинник 15-30% ,
аніонні ПАВ <5%, барвник, запашка, консервант.

Засіб зберігають в оригінальній упаковці подалі
від нагрівальних приладів і прямого сонячного
проміння при температурі від +5°C до +25°C.
Термін зберігання – 2 роки з дати виготовлення.
Використовувати згідно з інструкцією по застосу-
ванню.

ТОВ «Бланідас», Україна,
02099, м. Київ, вул. Зрошувальна, 15А,
тел.: 0 800 33 15 02
help@lysoform.ua lysoform.ua

LOT xx.xx.xxxx

Об'єм:
5000
мл±0,5%

Спосіб використання:

- Концентрат
- 10 ml/1 l води
- Розпилити
- Протерти

рН 7,3

ДОЗУВАННЯ ТА СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ: Рекомендовану кількість засобу (див. табл. 1) додати до ємності з водою кімнатної температури. Для точного і гігієнічного дозування використовувати Станцію OnClean для автоматичного дозування дезінфікуючих та мийних засобів. Приготований робочий розчин методом розпилення нанести на поверхню, протерти серветкою без дрібних ворсинок. При використанні професійної серветки з мікрофібри, засіб наносити безпосередньо на серветку.

Таблиця №1. Приготування робочих розчинів засобу

Концентрація засобу, %	Кількість засобу, мл	Кількість води, мл	Спосіб обробки	Кількість робочого розчину з 1 л концентрату
1,0	10,0	990,0	Протирання	100

УВАГА! При попаданні в очі та на шкіру концентрованого засобу слід промити місця попадання водою.

ЗБЕРІГАННЯ:

Зберігати засіб потрібно в оригінальній упаковці, на стелажах у приміщенні, що вентилюється при температурі від +5°C до +25°C та відносній вологості повітря 30 - 80% \pm 10%, подалі від нагрівальних приладів і прямого сонячного проміння в захищеному від потрапляння пилу і механічних навантажень.

УТИЛІЗУВАННЯ:

Пакування та залишки засобу потрібно утилізувати відповідно до діючих санітарно-гігієнічних норм: ДСанПіН «Про затвердження Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поведження з медичними відходами» Наказ МОЗ від 08.06.2015 № 325.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА:

Виробник гарантує термін придатності для експлуатації засобу - 2 роки з дати виробництва при дотриманні умов і правил експлуатування, транспортування і зберігання.

ВИРОБНИК:

ТОВ «Бланідас», 01015, м. Київ, вул. Зрошувальна, буд. 15А, Тел/Факс: 0 800 33 15 02; e-mail: help@lysoform.ua