

Stomaflex®



Оттисковые материалы

Stomaflex® Putty
Stomaflex® Light

С-силиконы. Новая Классика.

C-силиконы. Новая Классика.

Stomaflex® является надежным, проверенным временем оттискным материалом, который успешно применяется в повседневной практике многих врачей.




Новая усовершенствованная система оттискных материалов Stomaflex® представляет собой классическую комбинацию материалов Putty и Light, гарантирующую еще более точные оттиски. Новый материал имеет превосходные рабочие характеристики и является гидрофильным.


Превосходное качество каждого оттиска

- Благодаря высокой степени восстановления после деформации.
- Благодаря улучшенной пространственной стабильности по сравнению с предыдущим поколением Stomaflex.

Восстановление после деформации %

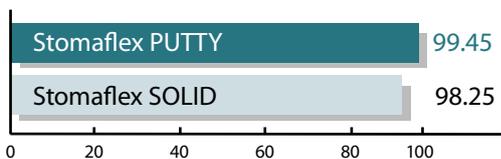


Восстановление после деформации %

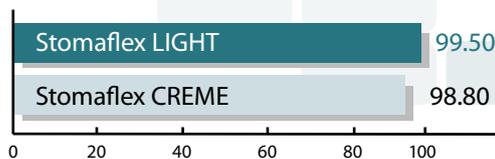


Линейная пространственная стабильность %



Линейная пространственная стабильность %

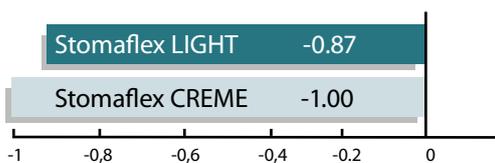


Высокая детализация оттиска даже в условиях влажной среды

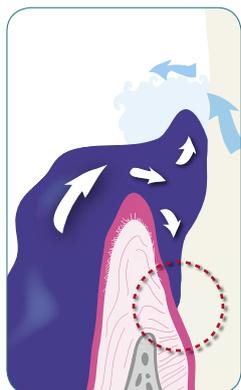

Эффект "вытеснения" жидкости

- Благодаря высокой гидрофильности материала Stomaflex Light

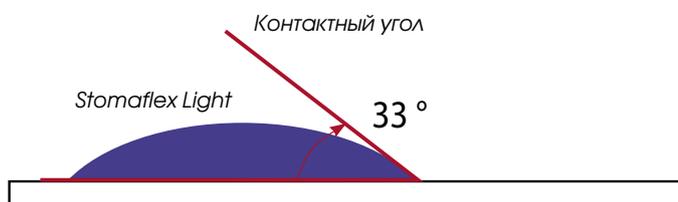

Удобство работы

- Простое дозирование и короткое время замешивания благодаря новому катализатору в виде геля - Gel Catalyst.
- Превосходный контроль однородности замешиваемого материала благодаря высоко-контрастному цвету катализатора Gel Catalyst.
- Материал не липнет к латексным перчаткам благодаря инновационной формуле Stomaflex Putty.



Пропорции замешивания
базы-катализатора: 1 ложка : 8 см.

Stomaflex Putty

Время замешивания: **45 сек.**

Рабочее время: **1 – 1:30 мин.**

Время отверждения в полости рта: **3:30 мин.**



Пропорции замешивания
базы-катализатора: 1: 1

Stomaflex Light

Время замешивания: **30 сек.**

Рабочее время: **1:30 мин.**

Время отверждения в полости рта: **3:30 мин.**

Упаковка

■ Stomaflex Putty 1300 г Кат.№: 4215110

Используется для получения первичных оттисков по двухэтапной методике (putty – wash), оттисков по одноэтапной методике (сэндвич-техника), оттисков по методу «медного кольца», в качестве краевого материала при получении функциональных оттисков; универсальный базовый материал для лабораторий.



■ Stomaflex Light 130 г Кат.№: 4215310

Используется в качестве корректирующего слоя для оттисков по двухэтапной методике, как материал низкой вязкости для оттисков по одноэтапной методике (сэндвич-техника), корректирующий материал для снятия функциональных оттисков в индивидуальной оттисковой ложке, материал для припасовки.



■ Gel Catalyst 60 г Кат.№: 4215330

Катализатор в виде геля
для материалов Stomaflex Putty и Stomaflex Light



■ Stomaflex Liquid Catalyst Кат.№: 4215130

Катализатор в виде жидкости для материалов Stomaflex Putty и Stomaflex Light.



*SpofaDental входит в состав
компании Kerr.
Более чем 100 лет Kerr
является мировым лидером
в разработке и производстве
ИННОВАЦИОННЫХ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ.*



SpofaDental a.s.
Markova 238
CZ-506 46 Jičín
www.spofadental.com
tel.+420 493 583 204
fax: +420 493 583 333
info@spofadental.com

Московское представительство:
4-ая Тверская-Ямская ул., 33/39
125047, Москва
тел.: +7 499 973 2047/1712

