

ЗГІДНО
Декларації про відповідність
№0719/06-1



Інструкція

щодо застосування
«Експерт гель» гель для ультразвукового дослідження

Ця інструкція визначає умови застосування «Експерт гель» гель для ультразвукового дослідження виробництва ТОВ «Лізоформ Медікал», Україна призначеного для зовнішніх ультразвукових досліджень з метою діагностики та терапії в медичній практиці та для проведення косметичних процедур.

Загальні положення.

«Експерт гель» гель для ультразвукового дослідження – тягуча речовина, яка забезпечує максимальну глибину проникнення і мінімальне віддзеркалювання ультразвукової хвилі. Гарантує відмінне зволоження шкіри і правильну передачу ультразвукових хвиль в широкому діапазоні частот, що використовується в сучасних ультразвукових дослідженнях. У відповідності з дерматологічними тестами даний гель класифікують як безпечний для шкіри та слизових.

Склад засобу: вода деіонізована, гліцерин, карбомер, консервант; (РН 5,0-8,0, в'язкість 9000-15000).

Спосіб використання: для ультразвукового дослідження гель наносять на очищену ділянку шкіри. УЗД дослідження відбувається з мінімальним натиском датчика на досліджувану ділянку. Кількість гелю залежить від об'єму досліджуваної ділянки. Після дослідження залишки гелю забирають паперовим рушником. Під час лазерних процедур в косметології гель використовують, як контактне середовище для зниження ймовірності опіків.

Зберігання: засіб зберігається в оригінальній упаковці подалі від нагрівальних приладів і сонячного проміння за температури від +4°C до +25°C. Термін зберігання 3 роки з дати виготовлення. Засіб в упаковці перевозять усіма видами транспорту відповідно до правил перевезення відповідної категорії вантажів.

Пакування: флакон 500 г з кришкою дозатором, пакет 1000 - 5000 г зі штуцером.

Дата останнього перегляду
Маркетолог
ТОВ «Лізоформ Медікал»
Богданенко О.Л.
« 11 » лютого 2021 р.

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be the signature of O.L. Bogdanenko.