

ДЕРЕВЯННАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КРОВАТЬ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



Спасибо, что отдали предпочтение нашей продукции.
Пожалуйста внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией и придерживайтесь ее во время использования изделия.

Это изделие соответствует стандарту европейской Директивы 93/42/ЕЕС



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не используйте кровать, не ознакомившись с инструкцией. Не используйте кровать в случае его повреждения. Не пытайтесь внести изменения в конструкции изделия.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Описание
2. Функции
3. Сборка
4. Технические характеристики
5. Применение
6. Безопасность
7. Уход и обработка
8. Устранение неисправностей
9. Поддержка
10. Гарантия

1. ОПИСАНИЕ

Спасибо, что отдали предпочтение нашей продукции.

Пожалуйста внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией и придерживайтесь ее во время использования изделия.

OSD гарантирует использование высококачественных материалов и контроль производства на всех его стадиях.

1. Обязательно прочитайте все пункты данной инструкции.

2. Не используйте кровать в случае повреждений или дефектов, ведь они могут привести к травме пользователя.

3. Электрические кровати должны использоваться проинструктированными лицами (персоналом).

4. До начала использования кровати непосредственно пациентом, ассистент должен убедиться в том, что кровать не нанесет ему никакого вреда.

5. Для регулирования высоты предусмотрено два независимо действующих мотора. Рекомендуем один раз в день опускать кровать на минимальную высоту, чтобы избежать (возможного) нежелательного перегиба.

6. Если кровать находится в стационарном положении, рекомендуем применять тормоза.

7. Во время использования кровати следите за тем, чтобы никакие посторонние предметы, части тела или одежды не попали к механизму.

8. Кровать работает от сети 220V.

9. Следующие действия можно отнести к опасным:

- подключение к сети с несоответствующим вольтажом:

- использование изделия пациентами младше 12 лет (детьми):

- перемещение кровати без предварительного отключения от сети;

- применение различных функций изделия одновременно;

- использование изделия без ознакомления с инструкцией;

- использование изделия на неровной поверхности;

- матрас не должен быть толще, чем 120 мм;

- избегайте попадания жидкости к электромотору;

- крепления поручней следует менять каждые пять лет;

- ремонт электрических частей изделия должен проводить только квалифицированный персонал с применением оригинальных инструментов;

- электродвигатель работает бесперебойно в течение 2 минут; затем он автоматически отключится и возобновит работу только через 18 минут;


- не создавайте препятствий для работы двигателей;

- не превышайте максимально допустимую нагрузку;

- пациентам с диагнозом, что предусматривает длительное лежачее пребывание, рекомендуется использование специальных противопролежневых матрасов для профилактики и лечения пролежневых ран: производитель кровати не несет ответственности при возникновении у пациента пролежней.

2. ФУНКЦИИ

а) Пульт

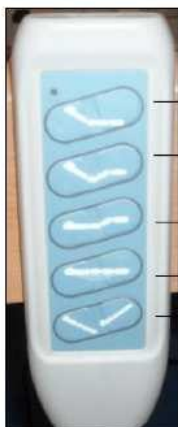

Кнопки регулирования ножной секции (1)

Кнопки регулирования головной секции (2)

Кнопки одновременного регулирования головной и ножной секции (3)

Кнопки регулирования высоты кровати (4)

Кнопки регулирования угла наклона кровати (5)



б) Регулирование положения ножной секции

Регулировка положения ножной секции проводится с помощью левой (подъем) и правой (спуск) кнопок на пульте регулирования (1).

в) Регулирование положения главной секции

Регулировка положения главной секции проводится с помощью левой (подъем) и правой (спуск) кнопок на пульте регулирования (2).



г) Одновременное регулирование ножной и головной секции

Для того, чтобы одновременно поднять ножную и головную секции, нажмите левую часть кнопки (3) на пульте. Для спуска обеих частей нажмите правую часть кнопки (3).



д) Изменение высоты кровати

Для повышения высоты кровати (максимум 73 см) нажмите левую часть кнопки (4). Для уменьшения высоты кровати (минимум 34 см) нажмите правую часть кнопки (4).

е) Регулировка угла наклона кровати

Для поднятия головной части кровати нажмите левую часть кнопки (5) на пульте. Для подъема ножной части кровати нажмите правую часть кнопки (5).



ё) Блокирование колес

Для блокировки колеса следует установить тормозной фиксатор в позицию (см. фото ниже); чтобы разблокировать колеса следует установить тормозной фиксатор в позицию Б.



Позиция А

Позиция Б

ж) Регулирование перил

Для того, чтобы зафиксировать поручни в верхнем положении необходимо поднять поручни из начальной позиции до уровня А кнопки (см. фото ниже), пока не прозвучит звук, который означает, что перила зафиксированы. Для того, чтобы вернуть поручни в исходное положение необходимо немножко поднять поручни, нажать и удерживать кнопку А, медленно опуская поручень.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Во время регулировки высоты перил будьте внимательны: не допускайте попадания элементов одежды или частей тела между перилами и основой кровати! Это может привести к травмам или повреждению функционального состояния кровати.

3. СБОРКА

Распакуйте все элементы кровати.

Отсоедините металлические части кровати с помощью винтов (Рис. 1). Главная секция кровати оснащена креплениями для надкроватной трапеции (Рис.2). Убедитесь в том, что выдвижной замок электродвигателя закрыт. (Рис.3).

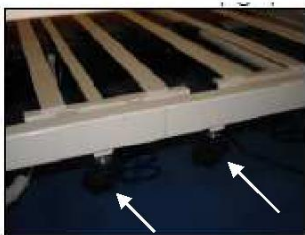


Рисунок 1



Рисунок 2

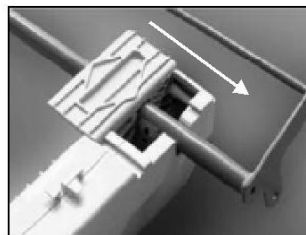


Рисунок 3

Вставьте направляющие спинки в соответствующие отверстия в основании кровати и зафиксируйте их с помощью винта А. (Рис.4). Прикрепите держатель матраса (Рис.5).



Рисунок 4



Рисунок 5

Подключите штекеры электропитания в соответствующие разъемы на электродвигателе (центральный пульт, правый - двигатель главной секции, левый - для ножной секции; см. Рис. 6).



Рисунок 6

Установит надкроватную трапецию в любой из разъемов (см. Рис.2). Данный разъем может использоваться для установки штатива капельницы.



4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер (зависит от выбранной модели): 211x132 (см) и 209x102 (см) Размер ложа (зависит от выбранной модели): 190x116 (см) и 190x87 (см) Высота от пола до ложа: от 34 до 74 (см)

Электродвигатели: Voltage 230V AC 50HZ

Motor rpm: 10% (2 min - 18 min) Motek Actuator

24v dc Voltage

4. ПРИМЕНЕНИЕ

Кровать предназначена для использования как в медицинских учреждениях, так и в домашних условиях. Облегчает уход за пациентом, обеспечивает дополнительный комфорт пациенту.

5. БЕЗОПАСНОСТЬ

Продукт соответствует европейским нормам безопасности CE.

6. УХОД И ОБРАБОТКА

Необходимо регулярно дезинфицировать кровать (применять соответствующие средства чистки согласно их инструкции) для предотвращения возникновения перекрестных инфекций. Особенно это касается использования кровати разными пациентами. НЕЛЬЗЯ мыть кровать в автоматической мойке и подвергать процесса автоклавированию.

ВНИМАНИЕ!

НЕЛЬЗЯ использовать абразивные моющие средства и средства, которые могут повредить поверхность частей кровати. При использовании дезинфицирующих средств придерживайтесь инструкций по применению. Не допускайте попадания влаги в электродвигателя. До обработки ВСЕГДА выключайте двигатель из сети.

Обработка деревянных компонентов

Для обработки деревянных компонентов используйте средства для очистки мебели. Изменение цвета компонентов под действием ультрафиолета, влаги или температуры не является дефектом и не покрываются гарантией.

Виробник: HONG KY CO., LTD.
BINH CHUAN PRODUCTION ZONE 72000, BINH DUONG
PROVINCE, VIETNAM
Імпортер: ТОВ "ОСД Східна Європа",
м. Київ osd.import@gmail.com

CP	№9405/2010
	24.03.2010

8 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Ниже список возможных проблем и путей их решения. Если Вам не удастся устранить проблему с помощью предложенных вариантов решения, не пытайтесь самостоятельно проводить ремонт; обратитесь к дилеру.

Проблема	Возможная причина	Решение
Во время нажатия на кнопки на пульте ничего не происходит	Не подключен электрошнур. Нет напряжения в розетке (сети). Не подключены другие кабели	Включите электрошнур в сеть Проверьте розетку Проверьте соединение пульта, электродвигателя, батарей
Электродвигатель работает со сбоями	Механические препятствия в агрегатах вращения Превышена максимальная нагрузка	Уберите любые предметы, мешающие вращению
Остановка после длительной работы	Перегрев двигателя.	Подождите, пока двигатель остынет
Происходит движение в противоположном направлении	Разъем электродвигателя перевернут	Свяжитесь с Вашим дилером

9. ПОДДЕРЖКА

Поставщик гарантирует безопасность продукта при условии соблюдения инструкции.

Регулярный технический осмотр

Технический осмотр должен проводить квалифицированный техник или специально подготовленный персонал.

Процедура обследования

Все компоненты должны быть тщательно обследованы:

- проверьте изоляцию и соединения всех электропроводов;
- проверьте работу перил;
- проверьте ложе кровати, крепления фиксации;
- проверьте работу электродвигателей;
- проверьте колеса и тормоза.

При обнаружении какого-либо дефекта НЕЛЬЗЯ использовать кровать! Используйте только оригинальные запчасти.

Длительное хранение:

- верните кровать в начальную позицию, отключите их от электросети;
- отсоедините разъемы электродвигателя и пульта;
- снимите все аксессуары;
- накройте кровать простыней;
- учитывайте факторы окружающей среды (влага, температура и прочее).

10. Гарантия

Условия гарантии:

ООО "ОСД Восточная Европа" гарантирует отсутствие заводских дефектов и работу устройства в течение гарантийного периода 12 месяцев с даты покупки при соблюдении правил эксплуатации изделия изложенных в инструкции.

1. Гарантийный ремонт производится только в течение гарантийного срока.

2. Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:

а) нарушение правил эксплуатации, изложенных в инструкции;

б) при наличии признаков постороннего вмешательства (попытка самостоятельного ремонта изделия);

в) если устройство использовался не по назначению.

3. Гарантия не распространяется на:

а) механические повреждения или повреждения вследствие транспортировки;

б) повреждения, вызванные попаданием в изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей и т.п.;

в) повреждения, вызванные бытовыми факторами, внешними действиями

(перепады напряжения в сети), неправильное подключение устройства.

11. Потребитель имеет право на обмен товара надлежащего качества в течение 14 (четырнадцати) дней, не учитывая дня покупки.

В соответствии со статьей 9 ЗАКОНА УКРАИНЫ "О защите прав потребителей":

Обмен товара надлежащего качества производится при условии, что он не использовался и если сохранен его товарный вид (составлен в заводскую упаковку), потребительские свойства, пломбы, ярлыки, а также расчетный документ, выданный потребителю вместе с проданным товаром.

Дата продажу: _____

Підпис/Печатка: _____

