

# Кровать медицинская, деревянная серия 93, 94, 91



## ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Этот продукт соответствует требованиям Директивы 93/42/ЕЕС


# Содержание

1. Введение
2. Общая информация
- 2.1 Меры безопасности
3. Описания продукта
- 3.1. Сборка
4. Технические детали

## 1. Введения

**Внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием.**

## 2. Общая информация

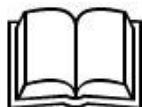

- Убедитесь в том, что Вы внимательно прочитали эту инструкцию, чтобы избежать убытков из-за неправильного использования.

OSD-91, 93,94 соответствует требованиям директивы 93/42/СЕЕ и классифицируется как класс 1 Медицинские.

**Вам нужно полностью соблюдать меры безопасности, перечисленные в этой инструкции; это касается всех пользователей кроватей данной серии.**

### 2.1 Меры безопасности

Следуйте ниже приведенного предупреждения для того, чтобы избежать травмирования персонала, а также повреждения кровати.


- Проведите инструктаж относительно пользования кроватью и проинформируйте пациента о возможных рисках из-за неправильного использования , особенно в отношении использования перил кровати.
- При монтаже деревянной рамы на кровати обращайте внимание на стабильность и правильность фиксации, без риска для пациентов, персонала или других заинтересованных лиц (членов семьи и т.д.) .
- После длительного использования, по крайней мере один раз в год, необходимо проводить осмотр деревянной кровати без матраса, проверять его функциональность, и искать признаки повреждений или износа.
- Убедитесь в том, что набор и кровать собраны специалистами. Убедитесь, что все люди, которые заменяют персонал, также должным образом проинформированы о правилах пользования кроватью.

## 3. Описание продукта

Кровать состоит из металлической рамы с сеткой, которая разделена на 3 секции: одну главную и двойную ножную. Деревянный каркас кровати состоит из главной панели, ножной панели, регулируемых рельсов с закругленными краями. Кровать оснащена механизмом быстрого спуска. В комплект кровати входят колеса с тормозами.

### 3.1 Сборка


При сборке деревянных комплектов кровати без матраса обязательно соблюдайте последовательность процедур, как показано на фотографиях ниже.

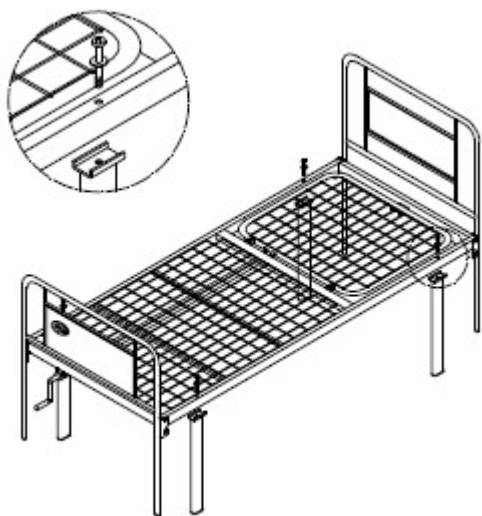


STEP 1




STEP 2

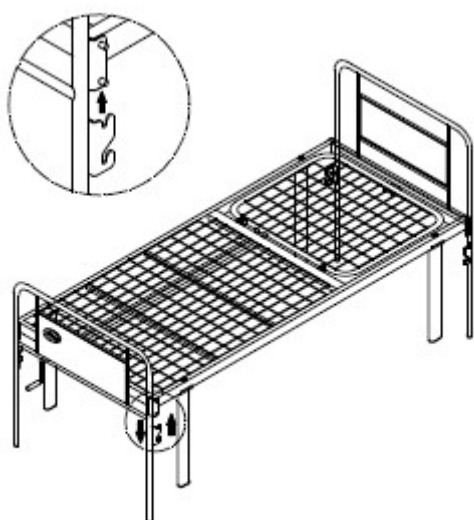

STEP 3

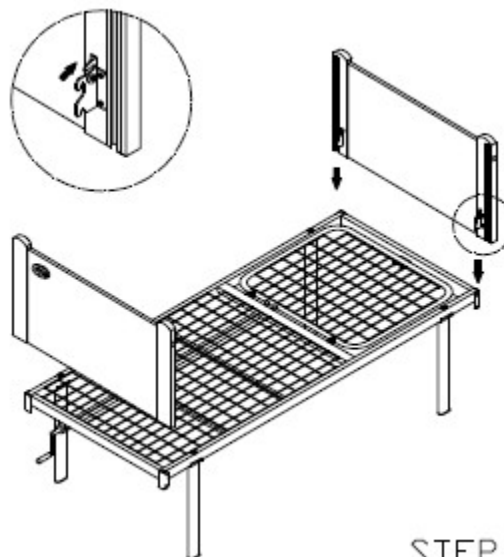

STEP 4

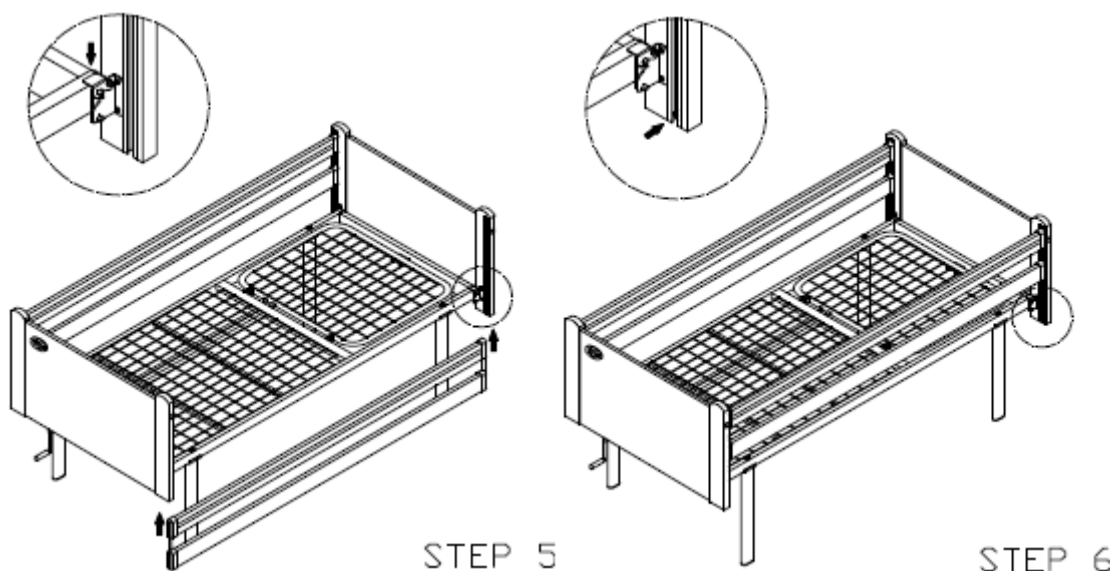

#### 4 Технические детали

Базовая длина матраса: 196 см  
 Общая длина: 200 см  
 Ширина: 87 см  
 Высота от пола: 51 см  
 Угол наклона головной секции: 60  
 Угол наклона ножной секции: 40  
 Максимальная вместимость вес: 120 кг



OrthoSanit Diffusion

#### Условия гарантии:

ООО "ОСД Восточная Европа" гарантирует отсутствие заводских дефектов и корректную работу устройства в течение гарантийного срока 12 (двенадцать) месяцев с даты покупки, при соблюдении правил эксплуатации изделия, изложенных в инструкции.

1. Гарантийный ремонт производится только в течение гарантийного срока.
  2. Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:
    - а) нарушение правил эксплуатации изложенных в инструкции;
    - б) при наличии признаков следов постороннего вмешательства (попытка самостоятельного ремонта изделия и т.п.);
    - в) если устройство использовалось не по прямому назначению.
  3. Гарантия не распространяется на:
    - а) механические повреждения или повреждения в результате транспортировки;
    - б) повреждения, вызванные попаданием в изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей и т.п. ;
    - в) повреждения, вызванные бытовыми факторами, внешними воздействиями .
- 3.Товар подлежит обмену только в условиях неисправности.

Дата: \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_/Печать