



**3 В 1 СТИЛЕЦЬ-ТУАЛЕТ**  
**OSD-RPM-68200**  
**OSD-RB-2109A**  
**ІНСТРУКЦІЯ**



Цей продукт відповідає європейській Директиві 93/42/ЕЕС



Ми вдячні вам за придбання нашого виробу. Уся наша продукція спроектована і виготовлена з матеріалів найвищої якості, щоб запропонувати максимальний комфорт і безпеку користувачеві.

### **Попередження**

- ДО ПОЧАТКУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ РЕТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ.
- ЗАВЖДИ ПЕРЕВІРЯЙТЕ, ЩО ПРИСТРІЙ ЗНАХОДИТЬСЯ В РОБОЧОМУ СТАНІ, Перш ніж ВИКОРИСТАТИ ЙОГО. НЕ ВИКОРИСТАЙТЕ ВИРІБ У РАЗІ ЗНОСУ АБО У РАЗІ УШКОДЖЕННЯ.
- ВИРІБ ПІДГОТОВЛЕНИЙ До ЕКСПЛУАТАЦІЇ І НЕ ПЕРЕДБАЧАЄ ЯКОГО АБО ТЕХНІЧНОГО ВТРУЧАННЯ.
- МАКСИМАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ 130 КГ. НІКОЛИ НЕ ПЕРЕВИЩУЙТЕ ЦЕЙ ЛІМІТ.

## **ЗМІСТ**

- 1. ОПИС**
- 2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**
- 3. СКЛАДАННЯ І РЕГУЛЮВАННЯ**
- 4. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ**
- 5. ГАРАНТІЯ**

### **1. ОПИС**

Стілець-туалет OSD - RPM - 68200(OSD - RB - 2109A)належить до 1-го класу медичних виробів. Виріб виготовлений з міцних алюмінієвих трубок і оснащений облаштуваннями протиковзання. У стільці передбачено відро з протикраплинною системою і зручною кришкою в центральній частині сидіння. Це дуже стійкий і міцний стілець, який так само може використовуватися як стілець для душу або туалету.

### **2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Ширина між підлокітниками 43 см  
Глибина сидіння 40 см  
Відстань від сидіння до підлоги 49/60 см  
Гранично допустима вага пацієнта 130 кг

### **3. СКЛАДАННЯ І РЕГУЛЮВАННЯ**

Стілець-туалет - Перед експлуатацією розкрийте стілець,встановіть знімне відро на шарніри. Переконайтеся втому, що відро зафіксоване правильно. Встановіть гальма на колесах, щоб стілець зайняв статичну позицію.

Стілець для сидіння - Після кожного використання виробу OSD - RPM - 68200 як стільця-туалету, виймайте відро з протикраплинною системою для очищення.

Стілець для душу - Помістите стілець в душовому приміщенні. Виставіть необхідну висоту стільця. Переконайтеся, що стілець коштує стійко і не їздить по підлозі.

**УВАГА:** Сидячи на стільці, дотримуйтеся за підлокітники,з тим, щоб уникнути падіння.

#### **4. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ**

Мити теплою водою з м'якими миючими засобами. Не застосовуйте при чищенні розчинники і абразивні речовини. Протирайте сухим м'яким ветишем. При необхідності обробляти дезинфікуючими речовинами. Після обробки протерти досуха.

#### **Умови гарантії:**

ТОВ "ОСД Східна Європа" гарантує відсутність заводських дефектів і роботу пристрою протягом гарантійного терміну **12 місяців** з дати купівлі при дотриманні правил експлуатації виробу викладених у Інструкції.

1. Гарантійний ремонт проводиться **тільки** протягом гарантійного терміну.

2. Виріб знімається з гарантії у наступних випадках:

а) порушення правил експлуатації викладених у інструкції;

б) при наявності слідів стороннього втручання (наприклад, спроба самостійного ремонту виробу);

в) якщо пристрій використовувався не за призначенням.

3. Гарантія **не розповсюджується** на:

а) механічні пошкодження чи пошкодження внаслідок транспортування;

б) пошкодження, які викликані потраплянням до виробу сторонніх предметів, речовин, рідин;

в) пошкодження, які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями (перепади напруги у мережі тощо), неправильне підключення пристрою.

4. Споживач має право на обмін товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів, не враховуючи день купівлі виробу.

**Обмін товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом із проданим товаром.**

Дата: \_\_\_\_\_

Підпис \_\_\_\_\_