


ЗГІДНО
Висновку державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи МОЗ України
від 16.06.2016 р. № 05.03.02-04/20344

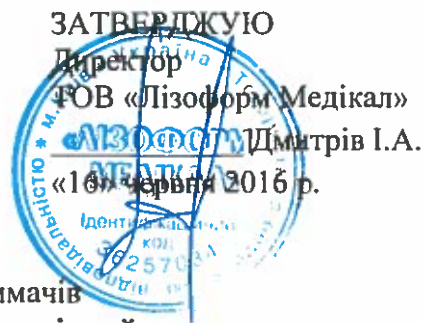

Інструкція щодо застосування настінних тримачів **Медфікс гігієнічний та Медфікс хірургічний**

Ця інструкція визначає умови застосування настінних тримачів «Медфікс гігієнічний» і «Медфікс хірургічний», виробництва ТОВ «Лізоформ Медікал», Україна з метою гігієнічного дозування дезінфікуючих засобів для рук у закладах охорони здоров'я (ЗОЗ) різного профілю, на підприємствах фармацевтичної, хімічної, біотехнологічної, мікробіологічної, харчової та переробної промисловості, підприємствах комунального господарства, громадського харчування і торгівлі, на всіх видах транспорту, в учбових та дошкільних закладах, побуті та в інших установах для дотримання належної гігієни.

Загальні положення.

«Медфікс гігієнічний» і «Медфікс хірургічний» - металеві настінні тримачі з кріпленням. Працюють лише в комплекті з спеціальним кутником, який прикріплений на флакон з дезінфікуючим засобом для рук.



«Медфікс гігієнічний» використовується у ЗОЗ будь якого профілю для гігієнічної дезінфекції рук. Може бути розміщений при вході в палату, в палаті, на посту, в маніпуляційній або процедурній кімнаті, в їдальні тощо.

«Медфікс хірургічний» використовується у ЗОЗ будь якого профілю для хірургічної дезінфекції рук. Може бути розміщений там, де необхідне дозування ліктем (передопераційна, перев'язувальний кабінет тощо).

Розміщення:

- Визначитись з місцем для розміщення Медфікса.
- Відкрити упаковку та вийняти комплектуючі деталі.
- Продезінфікувати місце кріплення Медфікса.
- На стіні відмітити місце для отворів Медфікса (медфікс рекомендовано розміщувати на відстані 1010 мм -1015 мм від рівня підлоги).
- Просверлити отвори та вкрутити дюбелі. Планку Медфікса прикрутити за допомогою шурупів, які йдуть в комплекті.

Увага! Шурупи вкручувати так, щоб головка не заважала розміщенню флакону.

Правила розміщення однакове як для «Медфіксу гігієнічного» так і «Медфіксу хірургічного».