

Інструкція з використання

КИЛИМОК АНТИБАКТЕРІАЛЬНИЙ «ONCLEAN STEP BLUE» («ONCLEAN КРОК СИНІЙ»)

УВАГА! Перед використанням виробу ознайомтесь з Інструкцією.



УВАГА! Використовуйте виріб лише за призначенням.

Призначення: для знищення мікроорганізмів, запобігання занесення та поширення бруду та пилу у приміщеннях закладів охорони здоров'я. Підходить для застосування перед операційними, реанімаційними та інфекційними відділеннями.

Матеріал: полівінілхлорид, антибактеріальний акриловий клей на водній основі.

Виробник: ТОВ «Бланідас», Україна.

Колір: синій.

Розміри: Ш600 x Д900 x Т2 мм.

Комплектність: 1 килимок антибактеріальний «OnClean step blue» («OnClean крок синій»). 30 пронумерованих одноразових липких листів у килимку.

Властивості: килимок антибактеріальний «OnClean step blue» («OnClean крок синій») ефективно знищує мікроорганізми та видаляє бруд і пилюку із взуття персоналу, пацієнтів та відвідувачів, запобігає перенесенню і поширенню збудників інфекційних захворювань в «критичних зонах» лікувальних установ. Виступає надійним гігієнічним бар'єром для росту і переміщення патогенних мікроорганізмів і забруднень в так звані «чисті приміщення» закладів охорони здоров'я.

Сфера застосування: приміщення закладів охорони здоров'я (у т.ч. «критичні зони» лікувально-профілактичних закладів усіх профілів), учбово-виховних закладів, підприємств різних видів діяльності.

Рекомендації щодо розміщення: розміщується на підлозі перед приміщенням, де необхідно дотримуватися чистоти.

Умови використання

1. Килимок антибактеріальний «OnClean step blue» («OnClean крок синій») розміщують перед приміщенням, де необхідно дотримуватися чистоти.

2. Для запобігання неконтрольованого переміщення килимка, поверхню перед застосуванням миють і висушують.
3. Перед використанням покриття необхідно зняти нижню захисну (промарковану) плівку і обережно, в горизонтальному положенні, без складок приклеїти килимок антибактеріальний «OnClean step blue» («OnClean крок синій») до підлоги.
4. Після розміщення килимка на поверхні, необхідно зняти верхню захисну плівку, після чого килимок готовий до використання.
5. Для якісного видалення бруду з підшви взуття необхідно зробити 2 кроки на липкому килимку.
6. Листи килимка знімаються по мірі забруднення. Нумерація листів дозволяє точно визначати остаточний термін експлуатації килимка. При забрудненні останнього листка, потрібно акуратно зняти основу килимка, видалити залишки клею та приклеїти новий липкий килимок.
7. Під час використання килимка антибактеріального «OnClean step blue» («OnClean крок синій») слід уникати потрапляння вологи на поверхню килимка.

Зберігання: килимок антибактеріальний «OnClean step blue» («OnClean крок синій») зберігають в пакуванні виробника у вертикальному положенні. Важливо не допускати скручування і перегинання упаковки. Гарантійний термін зберігання 3 роки з дня виготовлення, за дотримання умов зберігання.

Утилізування: всі вироби потрібно утилізувати відповідно до діючих санітарно-гігієнічних норм.

Гарантії виробника: виробник гарантує термін придатності для експлуатації виробів 3 роки з дати виробництва при дотриманні умов і правил експлуатування, транспортування, монтажу і зберігання.

Виробник: ТОВ «Бланідас», 02099, м. Київ, вул. Добровольчих батальйонів, буд. 17, Тел/Факс: 0 800 33 15 02; e-mail: help@lysoform.ua

